

## Upload Dexcom til Glooko

Data til analyse kan uploades via Glookos mobil-app eller via computer.

Hvis du ikke allerede har en personlig Glooko-konto, skal du oprette en. Det gør du på [my.glooko.com](https://my.glooko.com).

Dit brugernavn er din e-mailadresse. Adgangskoden skal indeholde mindst 8 tegn, heraf mindst ét tal og et specialtegn i form af ! @ eller #.

### Tilslut din Dexcom-konto via Glooko-mobilappen

1. Åbn Glooko-appen på din mobil-enhed.
2. Tryk på **Synkroniser** øverst på skærmens højre side.
3. Tryk på **Ny enhed**.
4. Tryk på (✓) for at sætte et **flueben** ud for **Kontinuerlig glukosemåler**, tryk derefter på **Fortsæt**.
5. Tryk på (✓) for at sætte et **flueben** ud for **Dexcom konto**, tryk derefter på **Fortsæt**
6. Indtast dit Dexcom **brugernavn** og din **adgangskode** og klik derefter på **Log på**.
7. Følg instrukserne på skærmen for at oprette og/eller tilslutte din konto.
8. Når din Dexcom-konto er tilsluttet, vises den som "aktiv" på synkroniseringsskærmen.

### Tilslut din Dexcom-konto via Glooko-webappen

1. Gå til [my.glooko.com](https://my.glooko.com) i din browser og log ind på din Glooko-konto.
2. Klik på rullemenuen øverst til højre i Glooko web-appen og vælg derefter **Indstillinger**.
3. Rul ned til afsnittet Apps og Enheder og klik på **Tilslut Dexcom-konto**.
4. Indtast dit Dexcom **brugernavn** og din **adgangskode** og klik derefter på **Log på**.
5. Følg instrukserne på skærmen for at oprette og/eller tilslutte din konto. Der vises en side med bekræftelse om, at din Dexcom-konto nu er tilsluttet.  
Sæt et **flueben** (✓) i boksen for at dele din Glooko-data med Dexcom (valgfrit).
6. Klik på **Udført** for at vende tilbage til siden med indstillinger.
7. Din Dexcom-konto vises som "tilsluttet" i afsnittet Apps og enheder.

For spørgsmål om din Glooko-konto, upload mv., kontakt venligst Glooko Support på tlf. 031-762 88 88 eller [help@glooko.com](mailto:help@glooko.com). Du kan også finde information på [support.glooko.com](https://support.glooko.com).

Har du spørgsmål til dit Dexcom-system - kontakt Nordic Infucare på tlf. 45 70 28 10 24. Du kan også e-maile dit spørgsmål på [teknisksupport@infucare.dk](mailto:teknisksupport@infucare.dk).

# Dexcom®

Læs mere på: [diabetesinfucare.com](https://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.dk](https://makingdiabeteseasier.dk) | [facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark) | [@makingdiabeteseasier\\_dk](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_dk)