

Gå gjennom sikkerhetskontroll på flyplass med Dexcom G6[®] CGM-system

Dexcom G6 kan være et flott reisefølge; Du kan gå gjennom metalledetektorer, bli håndskannet og til og med ha mottakeren skrudd på under flyturen.

Sikkerhetsutstyret på flyplassen

Både håndskanning, kroppsvisitering, visuell inspeksjon og det å gå gjennom metalledetektorer, er alle metoder som kan benyttes uten at du behøver å være bekymret for at G6-komponentene tar skade.

Hvis du er usikker eller ukonfortabel med å gå gjennom metalledektoren, anbefaler vi deg å informere en sikkerhetsansatt om at du har en kontinuerlig glukosemåler på deg, og at du derfor vil ha en full kroppsvisitering i form av en visuell inspeksjon av sensoren og mottakeren din.



La den sikkerhetsansatte få vite at sensoren din ikke kan fjernes, fordi den er satt inn under huden.

Fordi vi ikke har testet alle avanserte kroppsskannere og røntgenmaskiner, eller kjenner til skadene de kan forårsake på Dexcom G6, anbefaler vi håndskanning eller full kroppsvisitering og visuell inspeksjon for å være på den sikre siden.

Ved bruk av G6 kan du spørre om håndskanning, kroppsvisitering og visuell inspeksjon i stedet for å gå gjennom Advanced Imaging Technology (AIT) kroppsskanner (også kalt en millimeterbølgeskanner).



Ikke send Dexcom G6-komponentene gjennom røntgenmaskiner. Plasser alle komponentene i en egen pose før du overleverer dem til en sikkerhetsansatt. Når det gjelder annet medisinsk utstyr, for eksempel medisiner, blodsuktermålere og teststrimler, sjekk produsentenes retningslinjer eller Avinors nettsider.

På flyet

Slik bruker du smartenheten eller mottakeren din for å få informasjon om glukoseverdien mens du er på flyet:

- Smartenhet: Bytt til flymodus, og slå deretter på Bluetooth.
- Mottaker: La mottakeren være skrudd på.

Kontakt flyselskapet for retningslinjer.