

## Opplasting av Dexcom til Glooko

Data for analyse kan lastes opp via Glookos mobilapp eller datamaskinen.

Dersom du ikke allerede har en personlig Glooko-konto, må du opprette en konto. Det gjør du på [my.glooko.com](https://my.glooko.com).

Brukernavnet ditt er e-postadressen din. Passordet må inneholde minst 8 tegn, og minst ett må være et tall og ett må være et spesialtegn som ! @ eller #.

### Tilkoble din Dexcom-konto via Glooko-mobilappen

1. Åpne Glooko-appen på din mobile enhet.
2. Trykk på **Synkroniser** øverst på skjermens høyre side.
3. Trykk på **Ny enhet**.
4. Trykk for å sette en **hake** (✓) ved siden av **Kontinuerlig glukosemåler**, trykk deretter på **Fortsett**.
5. Trykk for å sette en **hake** (✓) ved siden av **Kontinuerlig glukosemåler**, trykk deretter på **Fortsett**.
6. Oppgi ditt Dexcom **brukernavn** og **passord** og klikk deretter på **Logg inn**.
7. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette og/eller tilkoble kontoen din.
8. Når Dexcom-kontoen din er tilkoblet vises det som «aktivt» på synkroniserings skjermbildet.

### Tilkoble din Dexcom-konto via Glooko-webappen

1. Gå til [my.glooko.com](https://my.glooko.com) i din nettleser og logg inn på din Glooko-konto.
2. Klikk på rullegardinmenyen øverst til høyre i Glooko-webappen og velg deretter **Innstillinger**.
3. Bla ned til avsnittet Apper og enheter og klikk på **Tilkoble Dexcom-konto**.
4. Oppgi ditt Dexcom **brukernavn** og **passord** og klikk deretter på **Logg inn**.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette og/eller tilkoble kontoen din. En bekreftelsesside viser at din Dexcom-konto nå er tilkoblet. Sett en **hake** (✓) i ruten for å dele dine Glooko-data med Dexcom (valgfritt).
6. Klikk på **Klar** for å gå tilbake til siden med innstillinger.
7. Din Dexcom-konto vises som «tilkoblet» i avsnittet Apper og enheter.

Ved spørsmål om din Glooko-konto, opplasting m.m. kan du kontakte Glooko Support på tlf. +46 31-762 88 88 eller [help@glooko.com](mailto:help@glooko.com). Du kan også finne informasjon på [support.glooko.com](https://support.glooko.com).

Dersom du har spørsmål om ditt Dexcom-system - kontakt Nordic Infucare på tlf. +47 22 20 60 00. Du kan også sende spørsmålet ditt på e-post til [diabetessupport@infucare.no](mailto:diabetessupport@infucare.no).

# Dexcom®

Les mer på: [diabetesinfucare.com](https://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.no](https://makingdiabeteseasier.no) | [facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge) | [@makingdiabeteseasier\\_no](https://@makingdiabeteseasier_no)



NordicInfu Care AB (Distributør)  
Blindernveien 5, 0361 Oslo, Norge, +47 22 20 60 00 · [www.infucare.com](https://www.infucare.com)

Dexcom er produsert av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. [dexcom.com](https://dexcom.com)

