

Uppladdning av Dexcom till Glooko

Data för analys kan laddas upp via Glookos mobilapp eller via datorn.

Om du inte redan har ett personlig Glooko-konto behöver du skapa ett konto. Det gör du på my.glooko.com.

Ditt användarnamn är din e-postadress. Lösenordet behöver innehålla minst 8 tecken, varav minst en siffra och ett specialtecken i form av ! @ eller #.

Ansluta ditt Dexcom-konto via Glooko-mobilappen

1. Öppna Glooko-appen på din mobila enhet.
2. Tryck på **Synkronisera** högst upp på skärmens högra sida.
3. Tryck på **Ny enhet**.
4. Tryck för att sätta en **bock** (✓) bredvid **Kontinuerlig glukosmätare**, tryck sedan på **Fortsätt**.
5. Tryck för att sätta en **bock** (✓) bredvid **Dexcom-konto**, tryck sedan på **Fortsätt**.
6. Ange ditt Dexcom-**användarnamn** och **lösenord** och klicka sedan på **Logga in**.
7. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa och/eller ansluta ditt konto.
8. När ditt Dexcom-konto är anslutet visas det som "aktivt" på synkroniseringsskärmen.

Ansluta ditt Dexcom-konto via Glooko-webbappen

1. Gå till my.glooko.com i din webbläsare och logga in på ditt Glooko-konto.
2. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till höger i Glooko-webbappen och välj sedan **Inställningar**.
3. Bläddra ner till avsnittet Appar och enheter och klicka på **Anslut Dexcom-konto**.
4. Ange ditt Dexcom-**användarnamn** och **lösenord** och klicka sedan på **Logga in**.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa och/eller ansluta ditt konto. En bekräftelsesida visar att ditt Dexcom-konto nu är anslutet. Sätt en **bock** (✓) i rutan för att dela dina Glooko-data med Dexcom (valfritt).
6. Klicka på **Klar** för att återgå till inställningssidan.
7. Ditt Dexcom-konto visas som "anslutet" i sektionen Appar och enheter.

Vid frågor om ditt Glooko-konto, uppladdning mm vänligen kontakt Glooko Support på tel 031-762 88 88 eller help@glooko.com. Du kan också hitta information på support.glooko.com.

Om du har frågor om ditt Dexcom-system - kontakta Nordic Infucare på tel 08-601 24 40. Du kan också mejla din fråga på diabetessupport@infucare.se.

Dexcom®

Läs mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se | facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | @makingdiabeteseasier_se