

## BYTE FRÅN DEXCOM G6 TILL G7



### ► Nyheter med Dexcom G7

- Bättre mät noggrannhet jämfört med G6
- Mindre än 30 minuters uppvärmningstid
- Kalibreringsfri men med möjlighet till kalibrering
- Allt-i-ett sensor
- CLARITY och TIR direkt i appen/mottagaren
- Nya varningar för ännu större individuell anpassning
- 12 timmars flexid (extra tid före byte av sensor)

### ► Enkelt att byta över från Dexcom G6 till G7

- Kontrollera att användarens mobil är kompatibel på: [dexcom.com/compatibility](https://dexcom.com/compatibility)
- Ladda ner G7-appen från Appstore eller Google Play
- Behåll G6-appen tills du kommit igång med G7:an
- Logga in i din G7-app med ditt Dexcom-login. Det går fint att göra även när du är uppkopplad till G6. Följ instruktionerna och se filmerna i G7-appen
- Följ instruktionen för att ansluta din nya G7-sensor

### ► För dig som byter från G6- till G7- mottagare

- Tryck på knappen för att starta mottagaren
- Följ instruktionerna i mottagaren

### ► Teknisk support

- Har du några frågor om din G7 är du alltid välkommen att kontakta Teknisk support, tel 08-601 24 40, dagtid 08-22. Du kan också mejla [diabetessupport@infucare.se](mailto:diabetessupport@infucare.se)

Läs mer på: [diabetesinfucare.com](https://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.se](https://makingdiabeteseasier.se) | [facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige) | [@makingdiabeteseasier\\_se](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_se)