

Så här enkelt kommer du igång med mottagaren



Navigering av mottagaren

Navigera med de fyra knapparna längst ned på mottagaren.

- Tryck på **pil nedåt** för att rulla nedåt på skärmen.
- Tryck på **uppåtpil** för att rulla uppåt på skärmen.
- Tryck på och håll en **pil**-knapp intryckt för att rulla snabbare.
- Gå till nästa fält med knappen **Välj**.

1. Starta mottagaren

Starta mottagaren genom att trycka på knappen med cirkeln (Välj/OK). Tryck i ca 3-5 sekunder.

2. Följ instruktionerna på skärmen

Följ instruktionerna på skärmen för att komma igång. Sätt din sensor på vald plats på kroppen och lägg in din sensorkod. Du hittar koden på applikatoren.




3. Uppvärmning av sensor

Din sensor behöver värmas upp innan du kan få några glukosvärden. Timern visar hur långt det är kvar innan du ser dina glukosvärden.

Vad du ser på mottagaren

- Värde:** Ditt senaste glukosvärde
- Trendpil:** Vart ditt glukosvärde är på väg
- Trendgraf:** De små vita prickarna är dina tidigare glukosvärden. Den större pricken längst till höger är ditt senaste glukosvärde:
- Grafvy:** Visar alla dina värden under tidsperioden. Kan enkelt ändras med pil upp eller ner på mottagaren.
- Målområde** (grå ruta bakom grafen): Markerar målområdet mellan 3,9-10 mmol/l
- Högvarning** (gul linje): Visar vid vilket värde din högvarning kommer att varna.
- Lågvarning** (röd linje): Visar vid vilket värde din lågvarning kommer att varna.

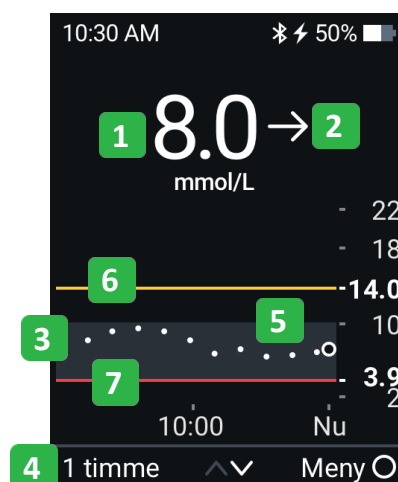

Så här enkelt kommer du igång med mottagaren



Trendpilar

Trendpilarna kan hjälpa dig att förutspå var ditt glukosvärde kommer att vara inom 30 minuter.

-  **Stabilt:** Ändras mindre än 1,7 mmol/l på 30 minuter
-  **Långsamt stigande:** Ändras 1,7-3,3 mmol/l på 30 minuter
-  **Långsamt sjunkande:** Ändras 1,7-3,3 mmol/l på 30 minuter
-  **Stigande:** Ändras 3,3-5,0 mmol/l på 30 minuter
-  **Sjunkande:** Ändras 3,3-5,0 mmol/l på 30 minuter
-  **Snabbt stigande:** Ändras mer än 5,0 mmol/l på 30 minuter
-  **Snabbt sjunkande:** Ändras mer än 5,0 mmol/l på 30 minuter
-  **Ingen pil:** Ingen trend kan ses. Använd blodsockermätare för behandlingsbeslut

Så här gör du när det är dags att byta sensor

När sensortiden börjar närma sig sitt slut efter 10 dagar kommer du att få en notis i mottagaren, Bekräfta med **OK**. (Se bild nedan till vänster)

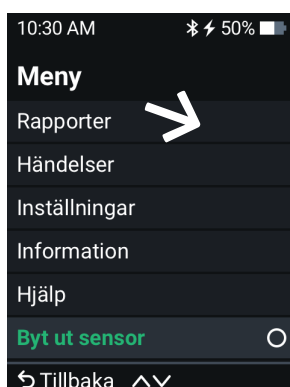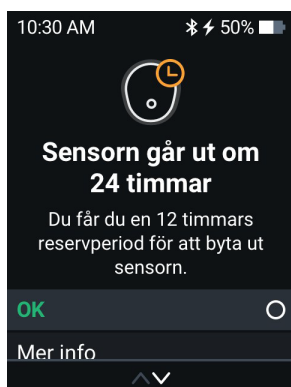

När det är dax att byta sensor går du in under **Meny** på mottagaren och väljer **Byt ut sensor**. Följ instruktionerna på skärmen.