

Dexcom Follow

-sovelluksen käytön aloitus

Dexcom Follow -sovellus vinäyttää sinulle Dexcom-sensoria (Dexcomin jatkuvaa glukoosinseurantaa) käyttävien henkilöiden glukoositietoja. Sovellusta käyttämällä voit tukea sensorin käyttäjiä. Kun Dexcom-sensorin käyttäjä jakaa tietonsa kanssasi, voit seurata jakajan sensorilukemia ja glukoositason muutoksia ja saada ilmoituksia, kun glukoositaso nousee tai laskee.*



*Tietojen jakaminen ja seuraaminen vaatii internetyhteyden. Seuraaminen vaatii lisäksi Follow-sovelluksen. Seuraajien on aina vahvistettava Dexcom-sovelluksen tai Dexcom-vastaanottimen antamat lukemat ennen hoitopäätösten tekemistä.

1 Jakaja lähettää kutsuviestin

Jakajan on lähetettävä kutsuviesti Dexcom-sovelluksesta.

2 Aloita seuraaminen


Asenna Dexcom Follow -sovellus ja hyväksy kutsu. Dexcom Follow -sovelluksen käyttöönotto vaatii Dexcom-tilin. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili ja noudata sovelluksen ohjeita.

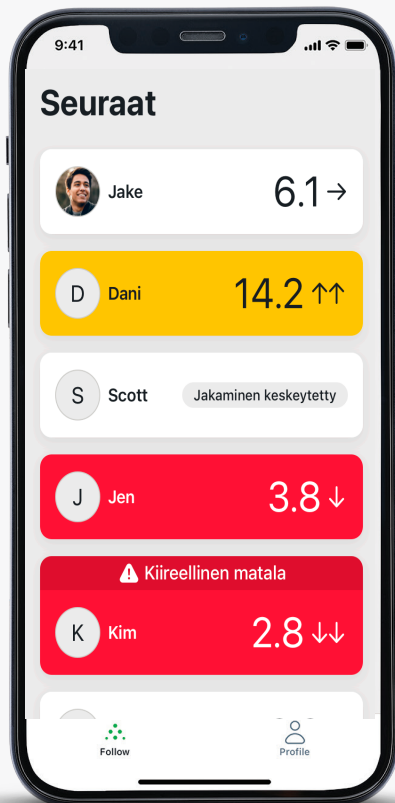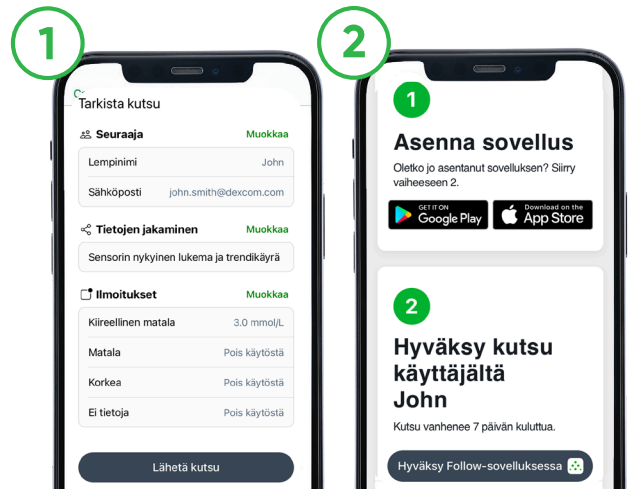

Takaisin aloitusnäyttöön

Jakajan kuva ja nimi

Trendikäyrä (näytetään vain, jos jakaja on sallinut sen jakamisen)

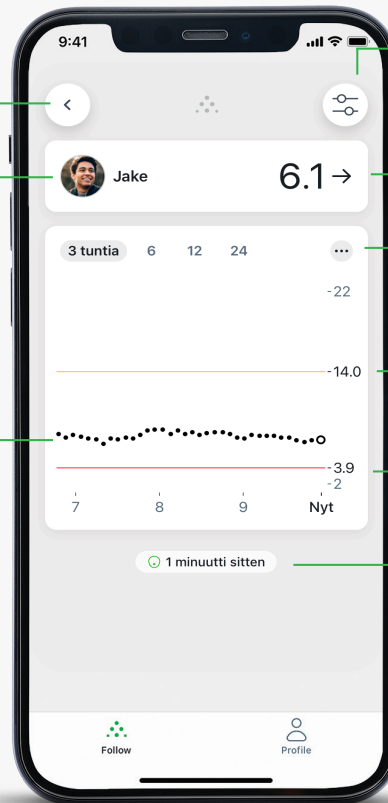

Muokkaa jakajan profiilia (valokuvaa, lempinimeä tai suhdetta)

Sensorilukema ja trendinuoli

Napauta muokataksesi käyttäjän ilmoituksia

Varoitus korkeasta arvosta

Varoitus matalasta arvosta

Päivitetty viimeksi



Aloitussnäyttö, joka näyttää jakajat (enintään 25 henkilöä)

Siirry seurattavan tietoihin valitsemalla henkilön välilehti

Asetusten muokkaaminen

Voit valita, minkälaisia ilmoituksia haluat saada kustakin jakajasta. Muuta asetuksia Dexcom Follow -sovelluksen kohdassa **Profiili > Ilmoitukset**.

Jakaja päättää, näytetäänkö hänen trendikäyränsä sovelluksessasi.

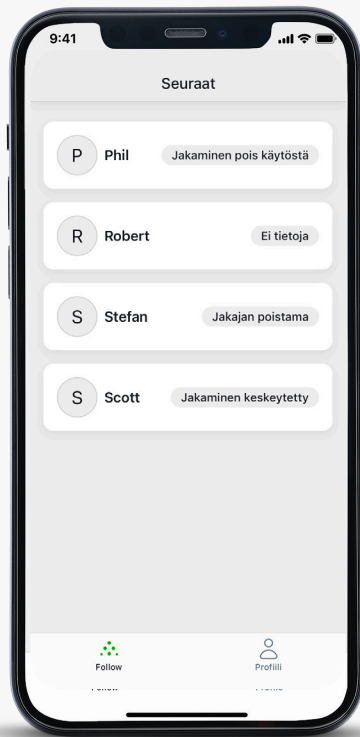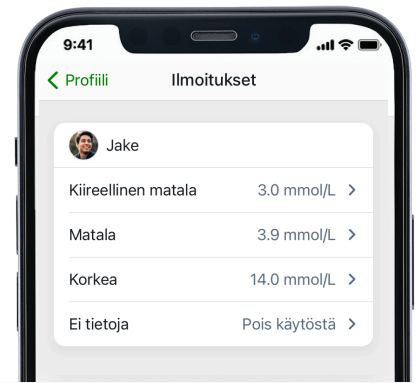

vianetsintä

Miksi en saa glukoosi-ilmoituksia?

Tarkista jakajan status: Jos näet "Jakaminen pois käytöstä", "Ei tietoja", "Jakajan poistama" tai "Jakaminen keskeytetty", ilmoituksia ei lähetetä. Ota yhteys tietojen jakajaan, jos sinulla on kysyttävää.

Tarkista laitteesi asetukset: Mene laitteesi ilmoituksia koskeviin asetuksiin, ja salli ilmoitukset Dexcom Follow -sovellukselta.

Tarkista Dexcom-palvelimen status: Mahdollisista palvelinongelmista ilmoitetaan osoitteessa status.dexcom.com.

Tarkista jakajaa koskevat ilmoitusasetukset: Tarkista, ovatko haluamasi ilmoitukset otettu käyttöön sovelluksen kohdassa **Profiili > Ilmoitukset**. Tarkista myös ilmoitusten viiveasetukset. Jos ilmoitukselle on asetettu viive, saat ilmoituksen vain, jos tilanne kestää viivettä kauemmin.


Tarkista internetyhteydet: Varmista, että sinä ja jakaja olette molemmat yhdistettyjä internetiin.

Tarkista jakajan puhelin: Varmista, että Dexcom-sovellus on auki ja käytössä jakajan puhelimessa.



Vaaka-asento

Pitämällä älylaitetta vaakasuorassa voit tarkastella sensorilukemia enimmillään viimeisten 24 tunnin ajalta.

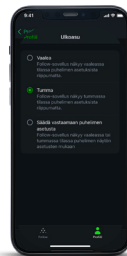

Tumma/vaalea ulkoasu

Voit vaihtaa vaalean ja tumman ulkoasun välillä kohdassa **Profiili > Ulkoasu**.



Yhteensopivuus älykellojen kanssa

Glukoositiedot ja ilmoitukset voi vastaanottaa Apple Watch -kelloon.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo ja kaikki niihin liittyvät logot ja graafiset symbolit ovat Dexcom, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ©2025 Dexcom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dexcomin valmistaja: Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com MAT-7568 v10, DIA.FI.442-01-NOV2025

CE
2797