

HURTIGGUIDE DEXCOM G6

- NÅR DU SKAL SKIFTE SENDER



Dexcom G6 senderen holder i 3 måneder, nogle gange længere.

Det bedste er at vente med at udskifte til batteriet er brugt op. Senderudskiftning sker altid samtidig med sensorudskiftning. Når batteriet begynder at være brugt op får du advarsler i modtageren og/eller i appen. Den første advarsel kommer cirka 3 uger inden udskiftningen skal ske. **Når du ikke længere har tilstrækkeligt batteri til 10 dages sensorbrug, står der "Ny sender" som meddelelse. Først da behøver du aktivere din nye sender.**

dexcomG6®

1. Stop sensoren (hvis den ikke allerede er gået ud). Sørg for at vente 15 minutter inden du starter op igen.
2. Klik på **"Ny sender"** på displayet og følg vejledningerne.


Hvis du af en eller anden grund vil udskifte sender inden den er gået ud, gå da ind i indstillinger og vælg sender. Vælg "Par ny" og følg vejledningerne.



Disse billeder er fra modtageren. Appen ser lidt anderledes ud, men rubrikkerne er de samme.

3. Indtast sensorkoden. Angiv SN-nummeret på den nye sender. Nummeret finder du både på bagsiden af senderemballagen og på senderens bagside.

- Indtast dit serienummer (SN) fra:

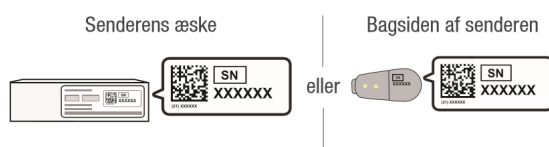

4. Sæt den nye sensor ifølge de almindelige vejledninger, tryk den nye sender fast.
5. Vent på at parring foretages og start derefter sensoren.

Hvis du bruger Dexcom G6-appen skal du fjerne den brugte sender fra mobilens bluetooth-enheder. Gå ind under telefonens indstillinger og bluetooth. Der finder du den tidligere parkoblede Dexcom-sender. Der står DexcomXX, hvor XX står for de to sidste symboler i senderens nummer. Vælg at mobilen skal glemme/fjerne den enhed.

