

Dexcom G6 til **Dexcom G7**



Faktisk størrelse



Faktisk størrelse

OVERGANGSVEILEDNING

Det kan dukke opp spørsmål ved overgangen til et nytt system. Derfor har vi satt sammen denne veiledningen for å hjelpe deg med å bruke Dexcom G7. Dexcom G7 er vårt mest avanserte system for kontinuerlig glukoseovervåking (CGM) hittil, og er designet med nye oppgraderinger som er inspirert av tilbakemeldingene fra dere. Takket være at sensoren er 60 % mindre, er enheten mer diskret, mer nøyaktig og lettere å bruke, slik at det er enklere enn noensinne å håndtere diabetesen din.¹

ENKELT Å KOMME I GANG OG ENKEL I BRUK



ENKELT OPPSETT

Alt-i-ett sensor og sender, med veiledning for overgang og tips for opplæring



30 MINUTTERS OPPVARMING

Den raskeste oppvarmingstiden blant alle CGM-merker, med en 12-timers utsettelsesperiode[™]



APPLIKATOR MED ETT TRYKK

92 % av de spurte Dexcom G7-brukerne synes den er ganske enkel eller veldig enkel å bruke.⁴

NØYAKTIG¹⁻² OG TILKOBLET

Smarterhet selges separat.*



OVERLEGEN NØYAKTIGHET

Vår mest nøyaktige CGM-teknologi for pålitelige beslutninger om behandling



SØMLØS TILKOBLING

Akkurat som Dexcom G6 – fungerer med ledende insulinpumpe, penn og helseapp-partnere



FORBEDRET BLUETOOTH

Dexcom G7-sensoren har en Bluetooth-rekkevidde på opptil 10 meter for sterk og pålitelig tilkobling til smarttelefonen din

TILPASSET DINE BEHOV



NYE VARSLINGSALTERNATIVER

Varsler som kan tilpasses hver enkelt, og nye alternativer som «Utsett første høye varsel» og «Stillemodus» for større fleksibilitet



SKJERMFLEKSIBILITET / DISPLAYFLEKSIBILITET

Se glukosetallene dine på tvers av tre enheter – smarttelefon, mottaker og smartklokke

Sensoren din kan sende data direkte til din Apple Watch via Bluetooth (ikke behov for telefon).³



VANNTETT

Tilpasser seg livsstilen din – eneste med vanntett sensor[™]

NÅ KAN DU ENKELT BYTTE OVER FRA DEXCOM G6 TIL DEXCOM G7

HVORDAN DU SETTER OPP DEXCOM G7



Start her hvis du bruker en smarttelefon

1. Sjekk om smartenheten din er kompatibel på dexcom.com/compatibility.
2. Last ned Dexcom G7-appen fra Apple Store eller Google Play.
3. Logg inn med den aktuelle kontoen din og følg instruksjonene for å sette opp appen.



Start her hvis du bruker en mottaker

1. Forsikre deg om at du bruker en Dexcom G7-mottaker.
2. Søk opp sensoren din. En valgfri overpatch er inkludert for å bidra til at sensoren din forblir sikker under økten når du har den på.
3. Få målingene dine etter en hurtig 30 minutters oppvarming. Valgfri kalibrering er tilgjengelig for å gjøre det enklere for deg når du starter en ny sensor.

TIPS TIL OVERGANGEN

Kan jeg fortsatt koble til min nåværende insulinpumpe?

Dexcom G7 er integrert med de nyeste insulinpumpene, pennene og helse-appene. Besøk nettstedet til produsenten av enheten din for oppdatert informasjon om kompatibilitet og instruksjoner om sammenkobling. Enkelte trinn vil variere avhengig av insulinpumpen, pennen eller andre tilkoblede enheter.

Kan jeg bruke Dexcom G6-mottakeren min med Dexcom G7?

Nei, Dexcom G6-komponenter er ikke kompatible med Dexcom G7. Ønsker du en Dexcom G7-mottaker, kontakt ditt helsepersonell.

Er telefonen eller smarttelefonen min kompatibel med Dexcom G7?

Besøk dexcom.com/compatibility for å se om Apple- eller Android-enheten din er kompatibel.

Behøver jeg å opprette en ny Dexcom Clarity- eller Dexcom Follow-konto?

Nei, hvis du skifter over fra Dexcom G6 behøver du ikke en ny konto. Du kan bruke ditt gjeldende brukernavn og passord med alle Dexcom-apper. Følgerne dine vil også bli automatisk synkronisert.

ENDA FLERE FUNKSJONER DU VIL LIKE



STILLEMODUS LAR DEG VÆRE DISKRET

Tilpass varsler til livsstilen din – perfekt til de gangene du trenger å holde fokus uten å bli avbrutt



EGENTILPASNING MED «UTSETT FØRSTE HØYE VARSEL»

Fininnstill ditt første varsel for høy glukose slik at det er tilpasset dine behov – for færre forstyrrelser og reaktive hypoglykemier

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENSOR		
Alt-i-ett-sensor og -sender	–	✓
Oppvarming	2 timer	30 minutter
12-timers utsettelsesperiode	–	✓
Ytelse i vann	Motstandsdyktig mot vann	Vanntett
Bluetooth hurtigkobling	–	✓
EGENSKAPER		
Lyd og volum kan tilpasses	✓	✓
Varsler om lav og høy glukose	✓	✓
Varsel for «Snart akutt lavt»	✓	✓
Utsett første høye varsel	–	✓
Stillemodus	–	✓
Varslingsplan	✓	✓
KOMPATIBILITET		
Standard smartklokkemodus	✓	✓
Direct to Watch-modus	–	✓
Sømløs integrering med et utvalg av insulinpumper, pennene og helse-apper.	✓	✓

Vi er her for å hjelpe deg med overgangen.

Les mer om Dexcom G7 her: diabetesinfucare.com/no/dexcom-g7



*Sammenlignet med forrige generasjon, Dexcom G6. *Sammenlignet med andre CGM-merker. *Basert på en undersøkelse i Storbritannia med Dexcom G7-brukere, N = 231. *Smartenheter selges separat. Kompatibel smarttelefon kreves for å pare en ny Dexcom G7-sensor med en Apple Watch. For å bruke Dele/følge, må smarttelefonen være innenfor 10 meter. Dexcom G7-sensoren er vannrett og kan være nedsenket til 2,5 meter i vann i opptil 24 timer.

1 Garg SK, et al. *Diabetes Technol Ther.* 2022;24(6):373-380. 2 Laffel LM, et al. *J Diabetes Sci Technol.* 2023;17(4):962-967. 3 Brukerveiledning for Dexcom G7. 4 Dexcom Data on File, 2024. 5. Brukerveiledninger for FreeStyle Libre og Medtronic.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo og eventuelle relaterte logoer og designmerker er enten registrerte varemerker eller varemerker for Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. © 2025 Dexcom, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Dexcom er produsert av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com MAT-11847, DIA.NO.358-01-NOV2025