

KOLME TÄRKEÄÄ TEHTÄVÄÄ ENNEN DEXCOM G6:N KÄYNNISTÄMISTÄ

Jos sinulla on kysymyksiä, älä epäröi soittaa tukeemme 0207 348 761. Olemme tavoitettavissa arkisin klo 9-17. Voit myös lähettää sähköpostia diabetes@infucare.fi

***Tarkasta, että puhelimesi on yhteensopiva:
www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility**



Vaihe yksi:

Lataa sovellukset

- ① Asenna G6-sovellus App Storesta tai Google Play -sovelluskaupasta.
- ② Asenna Diasend-sovellus App Storesta tai Google Play -sovelluskaupasta.

Vaihe kaksi:

Luo tili/kirjaudu sisään Dexcomiin ja Diasendiin.

- ① Luo **Dexcom-tili** G6-sovelluksessa tai kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, jos sinulla on jo sellaiset. HUOM! Tilistä vastaavan tulee olla yli 18-vuotias.
- ② Luo **Diasend-tili** Diasend-sovelluksessa tai kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, jos sinulla on jo sellaiset.

HUOM! Kirjoita muistiin käyttäjätietosi! Jos esimerkiksi puhelimesi rikkoutuu, voit kirjautua sisään käyttäen toista puhelinta, etkä joudu olemaan ilman CGM:ää.

Käyttäjätiedot - Dexcom-tilini

Lempinimi

Sähköpostiosoite

Käyttäjänimi (käytetään sisäänkirjautumisen yhteydessä)

Salasana (käytetään sisäänkirjautumisen yhteydessä)



Käyttäjätiedot - Diasend-tilini

Sähköpostiosoite (=käyttäjänimi, käytetään sisäänkirjautumisen yhteydessä)

Salasana (käytetään sisäänkirjautumisen yhteydessä)

Vaihe kolme:

Liitä Dexcom-tilisi Diasendiin osoitteessa www.diasend.com

- ① Avaa www.diasend.com tietokoneella tai puhelimen selaimella.
- ② Valitse "Liitä sovellus". Dexcom G6:n alta valitse Liitä.
- ③ Syötä **Dexcom-tilisi** käyttäjätunnus ja salasana. Seuraa ohjeita.

Joidenkin tuntien viivellä saat näkyviin Dexcom-arvosi Diasend-sovelluksessa ja osoitteessa www.diasend.com.

Jaa glukoosiarvosi klinikkasi kanssa.

Klikkaa välilehteä "Jaa tiedot" ja kirjoita klinikan ID-tunnusnumero, jos haluat diabetestiimisi voivan nähdä glukoosiarvosi Diasendissä. Jos sinulla on kysymyksiä Diasendista, voit ottaa yhteyttä Pharmanovaan: info@pharmanova.fi tai p. 020 761 9670. Löydät lisätietoa osoitteesta www.diasend.com.

Klinikan tunnus Diasendissä






Jos käytät Seuraajatoimintoa

Dexcom G6:n avulla voit jakaa glukoosiarvosi esimerkiksi vanhempiesi tai jenkun muun läheisen kanssa.

- 1 Seuraaja lataa Dexcom Follow -sovelluksen App Storesta tai Google Play -kaupasta.
- 2 Käyttäjänä voit G6-sovelluksestasi sähköpostia lähettämällä kutsua mukaan henkilön, jonka haluat seuraavan sinua. Voit kutsua enintään viisi seuraajaa ja kaikilla seuraajilla voi olla yksilölliset hälytysasetukset.
- 3 **HUOMAA!** Kun kutsut seuraajasi sähköpostitse, sinun on käytettävä sähköpostiosoitetta, jonka seuraaja voi avata älypuhelimessaan/taulutietokoneessaan eli laitteessa, johon seuraajasovellus on ladattu. Kutsu voi päättyä seuraajan roskapostiin. Pyydä seuraajaasi tarkistamaan roskapostia, jos kutsu ei ole tullut perille.

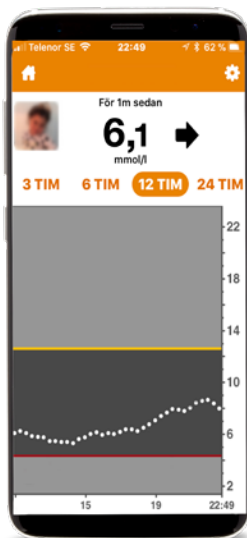

***Tarkasta, että puhelimesi on yhteensopiva:
www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility**



Tee hoitopäätös* Dexcom G6:n tietojen perusteella

Voit tehdä hoitopäätöksen Dexcom G6:n avulla riippumatta siitä, ovatko glukoosiarvosasi korkeat, matalat tai vaihtelevat. Voidaksesi tehdä hoitopäätöksen sinun tulee huomioida kolme tekijää:

- Glukoosiarvo
- Trendinuoli
- Trendikäyrä, jossa näkyvillä kolme viimeistä pistettä



Älä tee hoitopäätöstä Dexcom G6:n tietojen perusteella ...

- jos nuolta ei näy.
- jos käyrässä ei ole kolmea viimeistä pistettä.
- jos oireesi eivät vastaa arvoa.
- jos koet, että glukoosiarvo tai nuolen suunta ei vastaa odotuksiasi.

Käytä tällöin tavallista verensokerimittariasi!

Kaksi tilannetta, joissa kolmesta viimeisimmästä pisteestä on erityisen paljon hyötyä ennen päätöksentekoa

- Nuolet perustuvat glukoositietoihin viimeisten kolmen pisteen ajalta.
- Pisteet päivittyvät 5 minuutin välein ja ne antavat nopeammin tietoa glukoosiarvojen suunnanmuutoksista esimerkiksi silloin, kun nopea glukoosiarvojen lasku tasoittuu.



DEXCOM G6: NÄIN SE


Lähetin – järjestelmän "sydän". Käyttää Bluetooth-tekniologiaa. Ei tarvitse ladata.



6 m:n kantama




6 m:n kantama

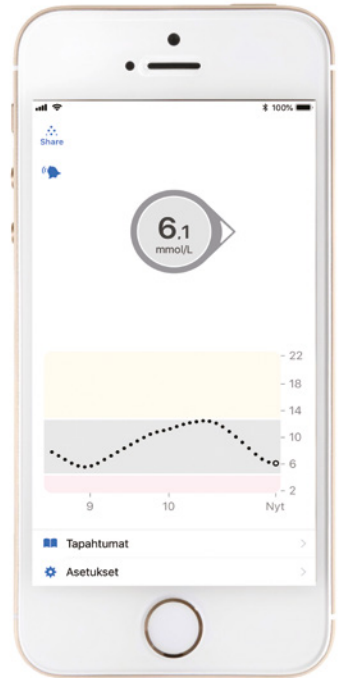


TOIMII

Käyttäjän älypuhelin*, johon on asennettu G6-sovellus

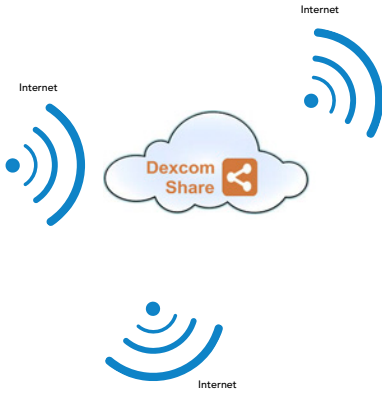

diasend.

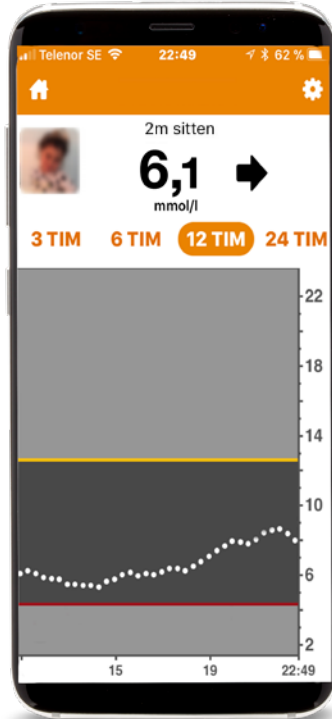

Seuraajan älypuhelin*, johon on asennettu Follow-sovellus

***Tarkasta, että puhelimesi on yhteensopiva: www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility**

Hyödyllisiä vinkkejä!

Ota tavaksesi käynnistää älypuhelimesi uudelleen vähintään kerran viikossa. Tällöin työmuisti tyhjentyy ja sovellukset toimivat vakaammin. Poista aina vanha Dexcom-lähetin valikosta Asetukset/Bluetooth, kun olet aktivoinut uuden lähettimen.

Viivytä puhelimen käyttöjärjestelmän päivitysten (IOS tai Android) asentamista kunnes päivitys on Dexcomin hyväksymä. Katso www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility

Jos "Lähetin ei löydy" tulee näytölle liittäessäsi uutta lähetintä:

1. Sammuta Bluetooth-toiminto, odota noin 30 sekuntia ja käynnistä toiminto uudelleen. Toisinaan voidaan tarvita tämän toistamista muutamia kertoja. Odota 15 minuuttia.
2. Käynnistä puhelin uudelleen.
3. Poista muut Bluetooth-laitteet tilapäisesti (Asetukset/Bluetooth). Useat kytketyt Bluetooth-laitteet voivat häiritä yhteyttä. Kun yhteys on muodostettu, voit yhdistää muut Bluetooth-laitteet uudelleen.
4. Toisinaan sensori ei onnistu aktivoimaan lähettimen virtalähdettä, yritä silloin asettamalla uusi sensori (enintään yksi uusi yritys).

Jos "Signaalin menetysovaritus" on G6-sovelluksen näytöllä yli 30 minuutin ajan:

Jos saat "Anturivika - vaihda anturi"-ilmoituksen tai kun itse keskeytät seurantajakson ennen sen loppumista, odota 15 minuuttia ennen uuden anturin käynnistämistä.

Jos mikään edellämainittu ei auta, ota yhteys Tekniseen tukeemme toimistoaikoina klo 9–17.

- Suorita edellä olevat vaiheet 1–3.
- HUOM! Iphone ilmoittaa signaalin menettämisestä, jos käyttäjä on pyyhkäissyt ylöspäin eli sulkenut G6-sovelluksen. G6-sovelluksen tulee aina olla avoinna.

"Anturivika - odota"

- Viesti "Anturivika - odota" merkitsee, että anturi ei voi juuri nyt antaa varmoja glukosiarvoja (vastaa ??? G4:ssä ja G5:ssä). Tämä johtuu aina sensorista, jokin häiritsee anturin toimintaa.
- Kokeile anturin ympäristön hieromista kevyesti.
- Jos olet juonut liian vähän, voi muutaman vesilasin tai muun nesteen juominen auttaa.
- Odota 3 tuntia, sen jälkeen voit vaihtaa sensoria ja tehdä reklamaation Tekniseen tukeen.

