



PIKAOHJE - DEXCOM G6 - KUN VAIHDAT LÄHETTIMEN

Dexcom G6 -lähetintä voi käyttää 3 kuukauden ajan, joskus kauemmin. Vaihto kannattaa tehdä vasta silloin, kun paristo on loppumassa. Lähetin ja anturi vaihdetaan aina yhtä aikaa. Kun paristo alkaa olla tyhjä, saat varoituksia vastaanottoon ja/tai sovellukseen. Ensimmäinen varoitus annetaan noin 3 viikkoa ennen kuin vaihto on tarpeen. **Kun paristossa ei enää ole riittävästi virtaa 10 vuorokauden anturinkäyttöön, saat viestin "Uusi lähetin". Uuden lähettimen aktivointi on tarpeen vasta silloin.**



1. Pysäytä anturi (jollei sen käyttöjakso ole jo päättynyt). Odota 15 minuuttia ennen uudelleen käynnistämistä.
2. Valitse **"Uusi lähetin"** näytössä ja noudata ohjeita.


Jos jostakin syystä haluat vaihtaa lähettimen ennen kuin se on vanhentunut, valitse päävalikosta "Asetukset" ja sen jälkeen "Lähetin". Valitse "Muodosta uusi laitepari" ja noudata ohjeita.

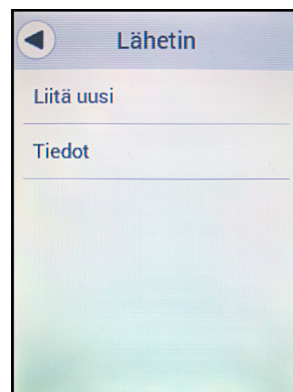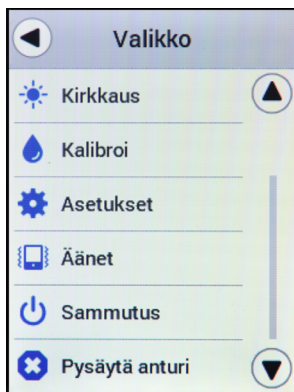

Nämä kuvat ovat vastaanottimesta. Sovellus on hieman erinäköinen, mutta otsikot ovat samat.

3. Anna anturin koodi. Anna uuden lähettimen SN-numero. Numero on sekä lähettimen pakkauksen takapuolella että lähettimen takapuolella.

- Anna sarjanumero:

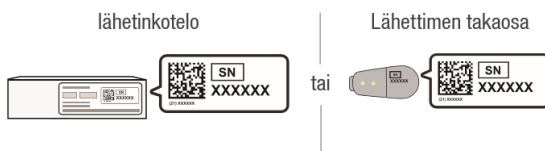

4. Aseta uusi anturi tavalliseen tapaan ja kiinnitä uusi lähetin.
5. Odota, kunnes laitepari on muodostettu, ja käynnistä anturi sen jälkeen.

Jos käytät Dexcom G6 -sovellusta, poista vanha lähetin älylaitteen Bluetooth-laitteista. Mene älylaitteen asetuksiin ja Bluetooth-osioon. Löydät sieltä aiemmin yhdistetyn Dexcom-lähettimen. Lähettimen nimi on DexcomXX, jossa XX:n tilalla on lähettimen tunnuksen kaksi viimeistä merkkiä. Valitse, että älylaite unohtaa tai poistaa lähettimen.