








# DexcomG6™

## Trendinuolet








<b>Ei nuolta</b>

**Tasainen:** Glukoosiarvo on vakaa (arvo nousee tai laskee enintään 0,06 mmol/l minuutissa). Glukoosiarvo voi nousta tai laskea enintään 0,8 mmol/l 15 minuutissa.

**Hidas nousu:** Glukoosiarvo nousee 0,06–0,11 mmol/l minuutissa. Jos se jatkaa nousua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi nousta enintään 1,7 mmol/l 15 minuutissa.

**Nousu:** Glukoosiarvo nousee 0,11–0,17 mmol/l minuutissa. Jos se jatkaa nousua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi nousta enintään 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

**Nopea nousu:** Glukoosiarvo nousee yli 0,17 mmol/l minuutissa. Jos se jatkaa nousua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi nousta enemmän kuin 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

**Hidas lasku:** Glukoosiarvo laskee 0,06–0,11 mmol/l minuutissa. Jos se jatkaa laskua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi laskea enintään 1,7 mmol/l 15 minuutissa.

**Lasku:** Glukoosiarvo laskee 0,11–0,17 mmol/l minuutissa. Jos se jatkaa laskua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi laskea enintään 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

**Nopea lasku:** Glukoosiarvo laskee yli 0,17 mmol/l minuutissa. Jos se jatkaa laskua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi laskea enemmän kuin 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

**Ei muutosnopeustietoja:** Järjestelmä ei pysty juuri nyt laskemaan, miten nopeasti glukoosiarvo nousee tai laskee.

G6 – järjestelmän käyttäminen, LBL016322Rev001 MT25295