

HURTIGVEILEDNING DEXCOM G6 - NÅR DU SKAL BYTTE MOBILTELEFON

Når du kjøper en ny mobiltelefon, mister den gamle eller den går i stykker, er det enkelt å flytte G6-kontoen din til den nye mobiltelefonen eller til en annen kompatibel mobiltelefon.

OBS! Du behøver ikke stoppe din nåværende sensor.



1. Finn frem brukernavn og passord for Dexcom-kontoen din. Brukernavnet ditt finner du under INNSTILLINGER/KONTO i G6 appen.
2. Skriv ned ID-nummeret på den nåværende senderen. Det finner du i din gamle mobiltelefon (innstillinger/sender), på esken til senderen eller i mottakeren dersom du bruker den. Dersom du ikke har noen opplysninger om den aktuelle sender-ID-en, må du fjerne din nåværende sensor, skrive opp nummeret som står under senderen og deretter fortsette med punkt 4.
3. Fjern G6-appen på den gamle mobiltelefonen hvis du har den ennå.
4. Last ned G6-appen på din nye mobiltelefon.
5. Logg inn med Dexcom-kontoen din, brukernavn og passord (du skal IKKE opprette en ny konto).
6. Følg instruksjonene i G6-appen.
7. Godta at dine G6-innstillinger blir importert til den nye mobiltelefonen.
8. Velg INGEN SENSORKODE dersom du allerede har satt inn en sensor tidligere (koden er lagret i senderen). Setter du inn en ny sensor, skriver du inn sensorkoden som vanlig.
9. Skriv inn SENDERENS ID og vent på PARKOBLE.
10. Svar JA på spørsmålet "Har du satt inn en sensor" dersom du har satt inn en sensor tidligere.
11. Når parkoblingen er ferdig, får du verdiene direkte inn i din nye mobiltelefon.
12. Kontroller alarminnstillingene dine.



**Kontroller at din nye mobiltelefon er kompatibel på:
<https://www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility>**

