

HURTIGVEILEDNING DEXCOM G6

- NÅR DU SKAL BYTTE SENDER

Dexcom G6-senderen holder i 3 måneder, noen ganger lengre.



Det beste er å vente med å bytte til batteriet er tomt. Senderbyttet skjer alltid samtidig med sensorbyttet. Når batteriet begynner å bli dårlig, får du varslere i mottakeren og/eller i appen. Det første varselet kommer ca. 3 uker før byttet skal skje. **Når batteriet ikke har mer strøm igjen enn for 10 dagers sensorbruk, vises meldingen "Ny sender". Først da må du aktivere den nye senderen din.**



dexcomG6®

1. Stopp sensoren (hvis den ikke allerede har stoppet). Vent i 15 minutter før du starter en ny sensor.
2. Klikk på **"Ny sender"** i displayet, og følg instruksjonene.


Hvis du av en eller annen grunn vil skifte sender før den går ut, kan du gå inn i hovedmenyen under innstillinger og sendere. Velg parkoble "Par ny", og følg instruksjonene.

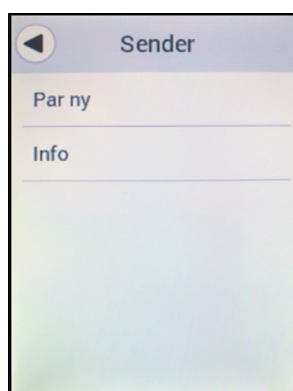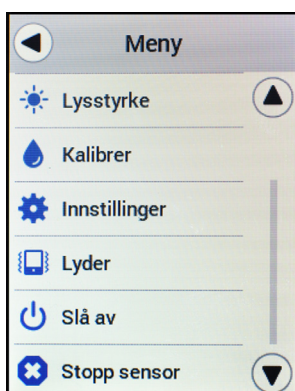

Disse bildene er fra mottakeren. Appen ser litt annerledes ut, men rubrikkene er de samme.

3. Legg inn sensorkoden. Angi SN-nummeret på den nye senderen. Nummeret finner du både på baksiden av senderesken og på senderens bakside.

- Oppgi serienummer (SN) fra:

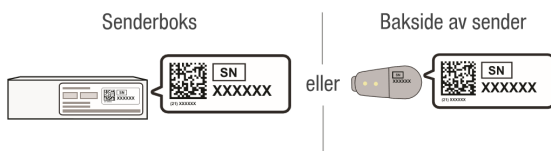

4. Sett i ny sensor i tråd med de vanlige instruksjonene, trykk fast den nye senderen.
5. Vent til parkoblingen er opprettet, og start så sensoren.

Hvis du bruker Dexcom G6-appen, skal du fjerne den utgåtte senderen fra mobilens blåtann-enheter. Gå inn på telefonens innstillinger og blåtann. Der finner du den tidligere parkoblede Dexcom-senderen. Det står DexcomXX, der XX står for de to siste symbolene i senderens nummer. Velg at mobilen skal fjerne/slette den enheten.

