

dexcomG6[®]

START HER

Oppsett



Din smarttelefon

Mottaker

Sender

Sensor

Bruksanvisning

G6-oversikt

Din smartenhet




Dexcom-mottaker




Visningsenhet

- Viser glukoseinformasjon
- Sett opp smartenheten, Dexcom-mottakeren (valgfritt i enkelte områder) eller begge
- For en liste over gjeldende kompatible smartenheter og operativsystemer, gå du til: dexcom.com/compatibility

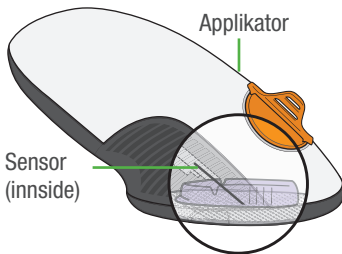

Applikator med innebygd sensor

- Sensor får glukoseinformasjon
- Sensorapplikator setter inn sensor under huden din

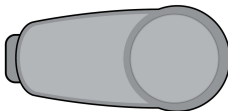

Sender


- Sender glukoseinformasjon fra sensor til visningsenhet

All grafikk er figurativ. Produktet ditt kan se annerledes ut.

Gå gjennom sikkerhetserklæringen i *Bruke G6*, kapittel 2, før du bruker G6.

Hva den gjør

G6 sender G6-sensorglukoseavlesinger (G6-avlesinger) til din visningsenhet

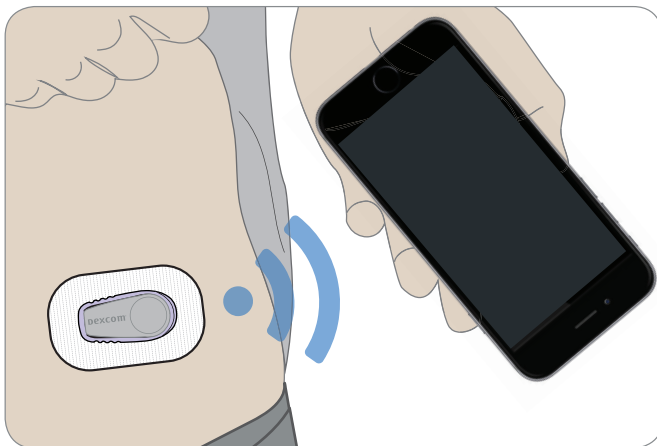

Bruk faner nedenfor for å sette opp appen eller mottakeren

Vil du sette opp begge? Velg en å sette opp først og gå til den fanen. Det siste trinnet viser deg hvordan du setter opp den andre visningsenheten. Ikke bruk begge faner.

For andre måter å finne ut hvordan du setter opp G6:

- Se opplæringen på nett på: dexcom.com/IFU/g6/international
- Kontakt din lokale Dexcom-representant for støtte



Din smarttelefon



Sender



Sensor

Sett opp app

Trinn 1: Sett opp app



A Last ned her og åpne Dexcom G6-appen



B Følg instruksjoner for oppsett på skjermen

1 Når du blir bedt om det:

- Send dine data til skyen.
Dette lar deg bruke:
 - Del: Send dine G6-data til følgere.
 - KLARHET: Reflekter over data med leger; se mønstre (kanskje ikke tilgjengelig i alle områder).
- Oppgi sensorkoden din (fra sensorapplikatoren du setter inn).
 - Ingen sensorkode?
Se Bruke G6, Vedlegg A Feilsøking.

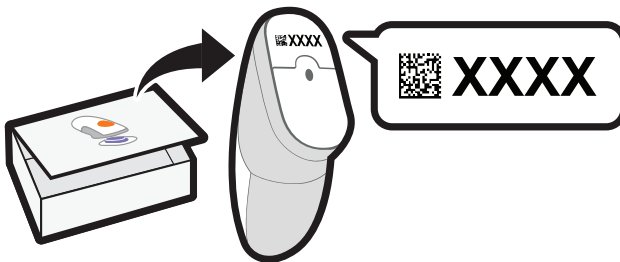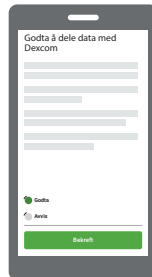

- Oppgi serienummer (SN) fra:



- 2** Ser du den blå sensoroppvarmingstimeren?
Det betyr at den blå sensoren blir vant med kroppen din.


Under oppvarming:

- Ingen G6-avlesinger, alarm/varsler
- Hold smartenheten innen 6 meter av sender



C Vent 2 timer


- Når sensoroppvarmingen er fullført, trykker du på **OK** for å se hjemskjermen
- Nå får du G6-avlesinger, alarm/varsler

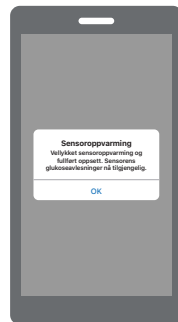

Trinn 2: Se Bruke G6

Lær deg å:

- Lese hjemskjermen
- Bruke alarm og varsler
- Ta behandlingsbeslutninger
- Feilsøke problemer

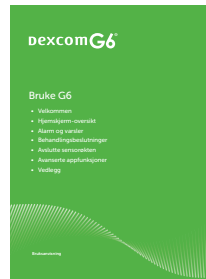

Trinn 3: Valgfritt – Sett opp mottaker

Slå på mottakeren ved å holde nede strømknappen i 2-3 sekunder. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

Ikke bruk Sett opp mottaker-fane i disse instruksjonene. Disse trinnene er for å sette opp å sette opp mottakeren før du setter opp appen.





Mottaker

Sensor

Sender

Sett opp mottaker

Trinn 1: Sett opp mottaker

A Ta mottaker ut av boksen




B Slå på mottaker

Hold inne strømknappen
i 2-3 sekunder.




C Følg instruksjonene på skjermen


- 1 Når du blir bedt om det, skriv inn:
 - Sensorkoden (fra sensorapplikatoren du setter inn)
 - Ingen sensorkode?
Se Bruke G6, Vedlegg A Feilsøking

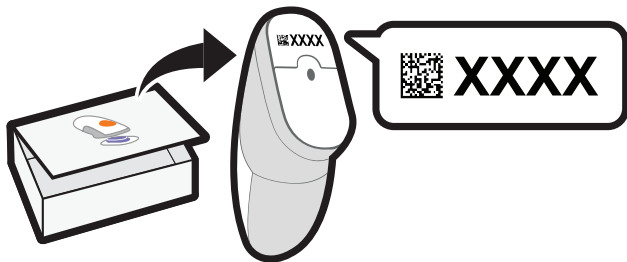

- Serienummer (SN) fra:

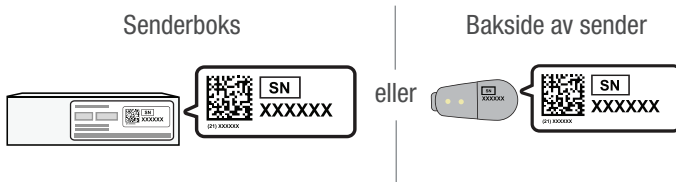


- 2** Du er ferdig med dette trinnet når du ser denne skjermen:

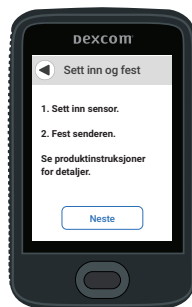


Trinn 2: Bruk applikator for å sette inn innebygd sensor

A Ta applikator med innebygd sensor ut av sensorboksen

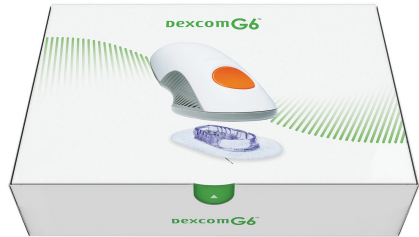


B Velg sensorsted

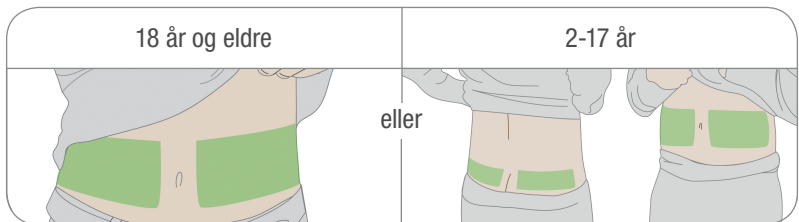


C Bruk applikator for å sette inn innebygd sensor


1 Vask og tørk hender; rengjør sensorsted med våtserviett

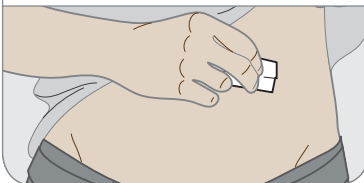


2 Bruk applikator med sensorkode oppgitt under oppsett av visningsenhet

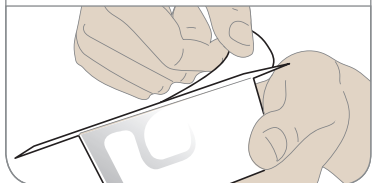


3 Fjern begge beskyttelsene for selvheftende delen; ikke rør ved klisteret

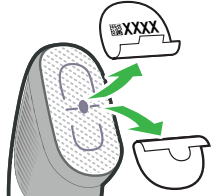


4 Flytt applikator til sensorstedet

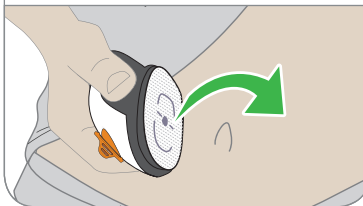

5 Plasser klebemiddel på hud

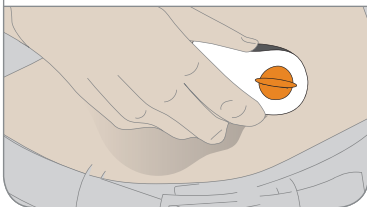


6 Fold og bryt av beskyttelsesskjerm

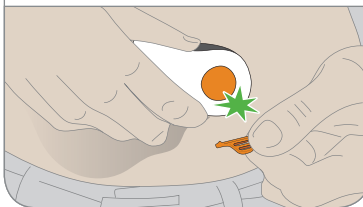

7 Trykk på knapp for å sette inn



8 Kasser applikator (følg lokale retningslinjer)

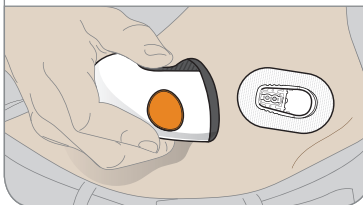


Trinn 3: Fest sender

A Ta sender ut av boksen




B Smekk fast senderen


1 Rengjør sender med alkohol

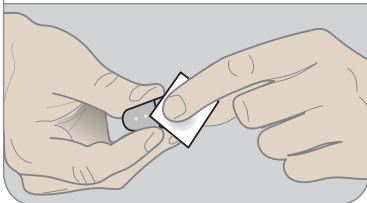


2 Sett inn senderens flik i sporet

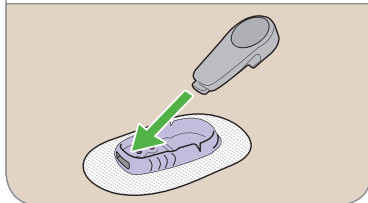

3 Smekk sender godt på plass (lytt etter klikket)

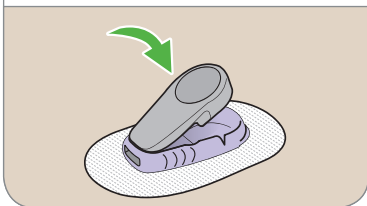

4 Gni rundt plasteret 3 ganger

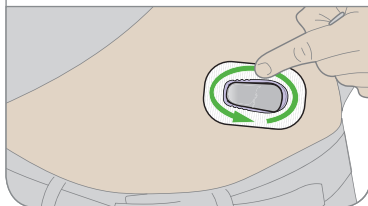

Trinn 4: Start sensor på mottaker


A Vent i opptil 30 minutter for parkobling



B Trykk på Start sensor for å begynne 2 timers oppvarming

Under oppvarming:

- Ingen G6-avlesinger, alarm/varsler
- Hold mottaker innen 6 meter av sender

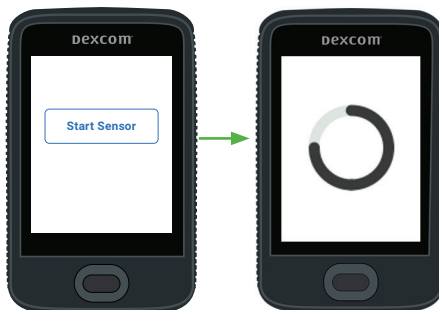

C Vent 2 timer


- Når du er ferdig, trykker du Neste for å gå til hjemskjermen
- Nå får du G6-avlesinger, alarm/varsler



Trinn 5: Se Bruke G6

Lær deg å:

- Lese hjemskjermen
- Bruke alarm og varslers
- Ta behandlingsbeslutninger
- Feilsøke problemer

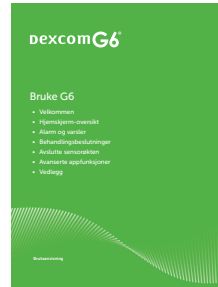

Trinn 6: Valgfritt – Sett opp app

Last ned appen på smartenheten og åpne den. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

Ikke bruk Sett opp app-fane i disse instruksjonene. Disse trinnene er for å sette opp appen før du setter opp mottakeren.





© 2018 Dexcom, Inc. Med enerett.

Beskyttes av patent dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom G5 Mobile CGM System, Dexcom G6, Dexcom Share, Dexcom Care er enten registrerte varemerker eller varemerker for Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. *Bluetooth* er et registrert varemerke eid av *Bluetooth* SIG. Apple er et registrert varemerke eid av Apple Inc. Android er et registrert varemerke eid av Alphabet Inc. Alle andre produkter eller selskapsnavn som kan være nevnt i denne publikasjonen er varenavn, varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere.

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Utenfor USA: Kontakt din lokale
Dexcom-representant



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland

CE
0086