


dexcomG6

BÖRJA HÄR

Ställa in

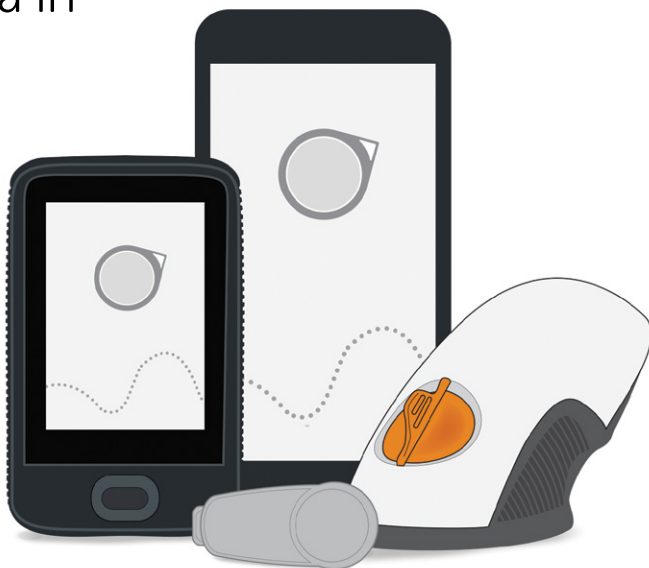

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
Bruksanvisningar

Dexcom G6 CGM (G6) – Översikt

Displayenhet

- Visar glukosinformation
- Ställa in din smarta enhet, Dexcom-mottagare eller båda
- Besök dexcom.com/compatibility för en lista över nuvarande kompatibla smarta enheter och operativsystem
- G6-appen och -mottagaren är kompatibla med alla G6-system

Din smarta enhet




Dexcom-mottagare




Applikator med inbyggd sensor

- Sensorn tar emot glukosinformation
- Sensorapplikatorn för in sensorn under huden

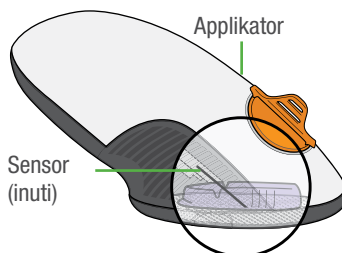

Sändare

- Skickar glukosinformation från sensorn till displayenheten

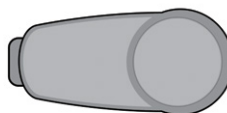

Alla bilder är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.

Läs säkerhetsanvisningen i *Att använda G6, kapitel 2* innan du använder din G6.

Vad den gör

G6 skickar G6-sensorns glukosvärden (G6-värden) till din displayenhet.



Välj app, mottagare eller båda

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
Mottagaren är medicinteknisk utrustning. Din smarta enhet är det inte, trots att du kan köra G6-appen på den. Din smarta enhet är inte medicinteknisk utrustning eftersom appen kan missa larm/varningar – till exempel på grund av inställningar på den smarta enheten, att den smarta enheten eller appen stängs av, låg batteriladdning osv.

Under flikarna nedan kan du ställa in app, mottagare eller båda

Vill du ställa in båda? Välj en att ställa in först och gå till denna flik. Det sista steget visar hur du ställer in den andra displayenheten. Använd inte bägge flikarna.

För andra sätt att lära dig hur du ställer in din G6:


- Se vägledningen på: dexcom.com/downloadsandguides
- Kontakta din lokala Dexcom-representant för support




Din smarta enhet




Dexcom-mottagare

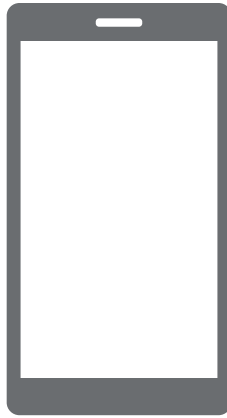

Din smarta enhet

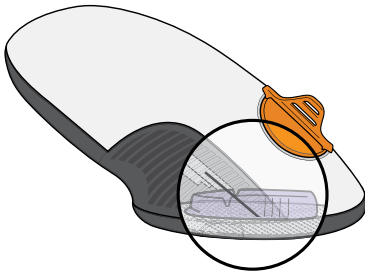

Applikator med
inbyggd sensor

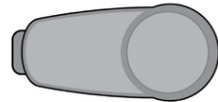

Sändare

Ställa in app

Steg 1: Ställa in app


A Ladda ned och öppna Dexcom G6-appen



B Följ instruktionerna på skärmen


1 På uppmaning:

- Skicka dina uppgifter till molnet.
Det gör att du kan använda:
 - Dela: Skicka dina G6-data till följare.
 - CLARITY: Diskutera uppgifter med läkare, upptäcka mönster (kanske inte tillgängligt i alla regioner).
- Ange din sensorkod
(från sensorapplikatoren du ska föra in).
 - Ingen sensorkod?
Se Att använda G6, bilaga A felsökning.

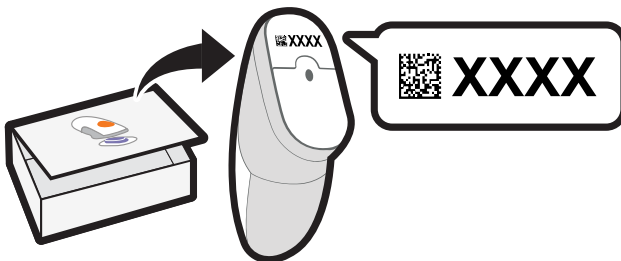

- Ange ditt serienummer (SN) från:

Förpackning för sändare

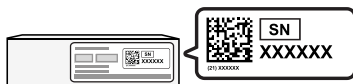

eller

Sändarens baksida



När du har matat in ditt SN söker din G6 efter sändaren. Under tiden den söker får du inte några G6-värden eller varningar.

- 2** Ser du timern för sensoruppvärmning? Det betyder att din sensor vant sig vid din kropp.


Under uppvärmning:

- Inga G6-värden eller larm/varningar
- Den smarta enheten ska alltid vara inom 6 meter från sändaren



C Vänta 2 timmar


- Tryck på **OK** för att se startskärmen när sensoruppvärmningen är klar
- Nu får du G6-värden och larm/varningar

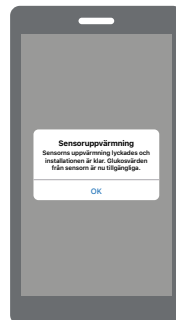

Steg 2: Se Att använda G6

Lär dig att:

- Läs din startskärm
- Använda larm och varningar
- Fatta behandlingsbeslut
- Felsöka problem

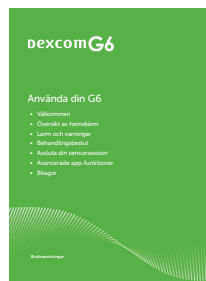


Steg 3: Valfritt – Ställa in mottagare


Slå på mottagaren genom att hålla strömbrytaren intryckt i 2–3 sekunder. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Använd inte fliken Ställ in mottagare. Dessa steg är för att ställa in mottagaren innan du installerar appen.




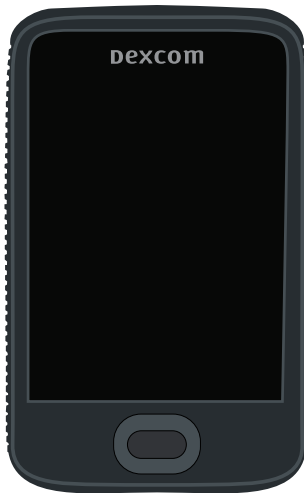

Mottagare

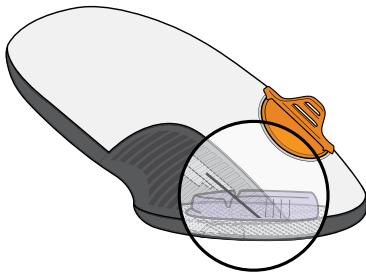

Applikator med
inbyggd sensor

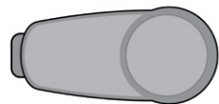

Sändare

Ställa in mottagare

Steg 1: Ställa in mottagare

A Ta upp mottagaren ur förpackningen



B Slå på mottagaren


Håll strömbrytaren intryckt i 2–3 sekunder.



C Följ anvisningarna på skärmen

1 På uppmaning, ange din:

- Sensorkoden från den sensorapplikator du ska föra in
- Ingen sensorkod?
Se Att använda G6, bilaga A felsökning.

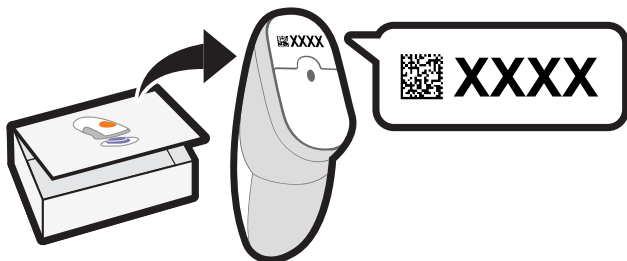

- Serienummer (SN) från:

Förpackning för sändare



eller

Sändarens baksida



När du har matat in ditt SN söker din G6 efter sändaren. Under tiden den söker får du inte några G6-värden eller varningar.


- 2** Du är klar med det här steget när du ser den här skärmen:




Steg 2: Använda applikatorn för att föra in inbyggd sensor

A Ta ut applikatorn med inbyggd sensor ur förpackningen

Ta fram materialet: applikator (med den kod som du just angivit), sändare och rengöringsservetter.

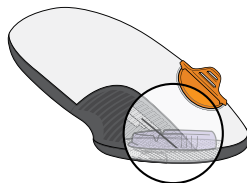


B Välj placering av sensorn

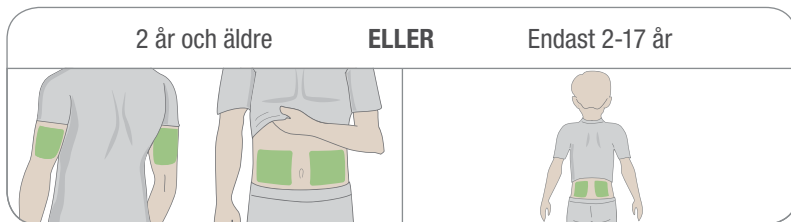


Undvik ben, irriterad hud, tatueringar och områden som utsätts för stötar.

C Använd applikatorn för att föra in den inbyggda sensorn


1 Få en sensorapplikator och en rengöringsservett.

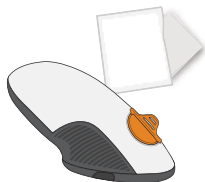


2 Tvätta och torka händerna.

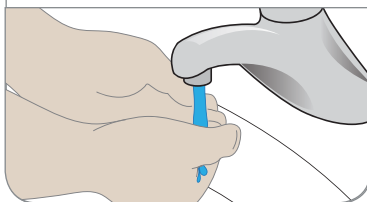


- 3** Rengör platsen för sensorn med en rengöringsservett.

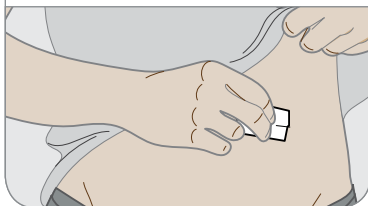


- 4** Dra av skyddspappret. Rör inte vid den självhäftande delen.

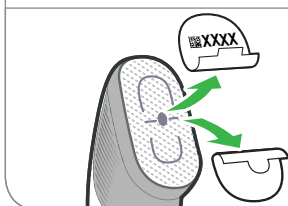


- 5** Fäst applikatorn på huden.

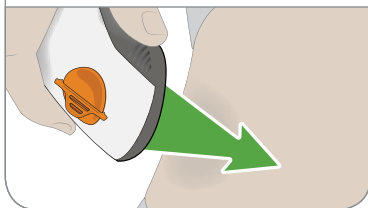


- 6** Vik och bryt av säkerhetsspärren.

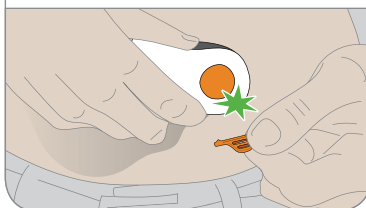


- 7** För in sensorn genom att trycka på knappen.

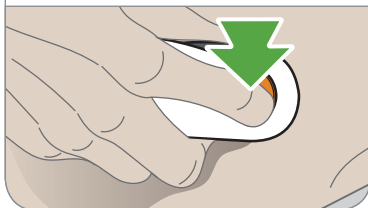

- 8** Ta bort applikatorn från huden och låt klisterlappen och hållaren sitta kvar.


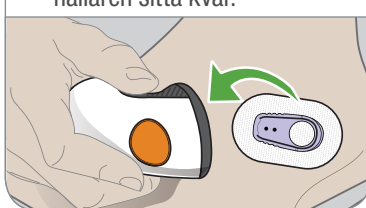


- 9** Kassera applikatorn. Följ lokala riktlinjer för komponenter som kommer i kontakt med blod.

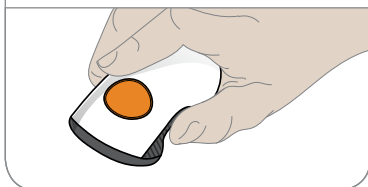


Steg 3: Fästa sändaren

A Ta upp sändaren ur förpackningen

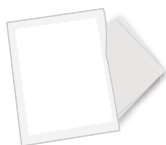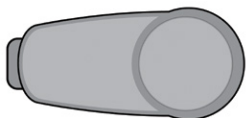


B Snäpp fast sändaren


- 1** Rengör sändaren med en rengöringsservett.

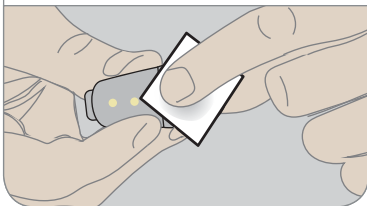


- 2** Sätt i sändaren i hållaren med fliken först.

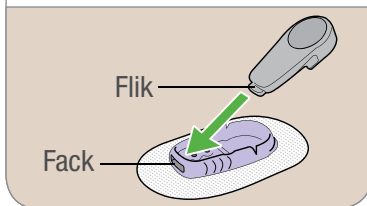

- 3** Snäpp fast sändaren. Den klickar fast. Kontrollera att den sitter plant och tätt mot hållaren.

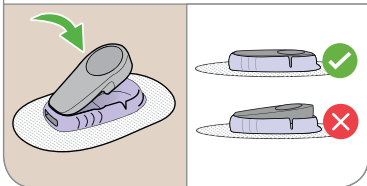

- 4** Gnugga runt plåstret 3 gånger.

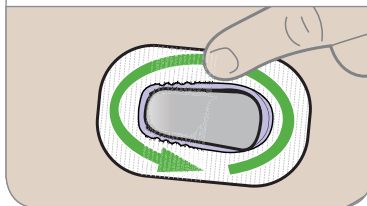

Steg 4: Starta sensor på mottagaren

A Vänta upp till 30 minuter för parkoppling


Under koppling:

- Inga G6-värden eller larm/varningar
- Mottagaren ska alltid vara inom 6 meter från sändaren



B Aktivera uppvärmningen av sensorn genom att trycka på Starta sensor

Under uppvärmningen får du inte några G6-värden eller varningar

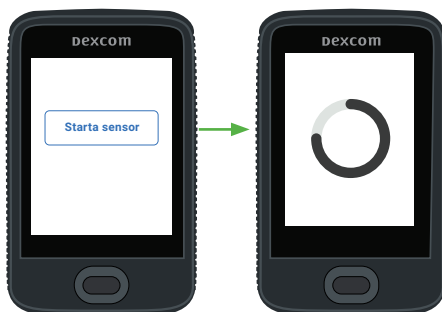

C Vänta


- När detta är klart trycker du på **Nästa** för att gå till startskärmen
- Nu får du G6-värden och larm/varningar



Steg 5: Se Att använda G6

Lär dig att:

- Läs din startskärm
- Använda larm och varningar
- Fatta behandlingsbeslut
- Felsöka problem

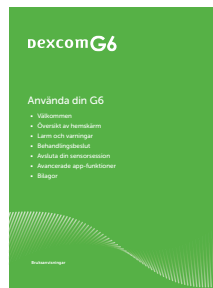

Steg 6: Valfritt – Ställa in app

Ladda ned appen till din smarta enhet och öppna den. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Använd inte fliken Ställ in app. Dessa steg är för att ställa in appen innan du installerar mottagaren.





© 2019 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

Skyddas av patent, dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care, Dexcom Clarity och Share är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i USA och eventuellt i andra länder.

Dexcom



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1 858 200 0200
dexcom.com

Utanför USA: kontakta din lokala
Dexcom-representant.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

