

Steg 1: Hur du skapar ett patientkonto

Du kommer att få ett e-mail från din sköterska/läkare med titeln "Din vårdgivare har bjudit in dig till diasend®". Klicka på länken i mailet som säger **Klicka här för att komma igång** och följ sedan stegen här nedanför.

Om du inte har fått någon inbjudan, kan du registrera ett konto på www.diasend.com genom att välja "Sverige" i rullgardinsmenyn och sedan klicka på knappen "Skapa ditt diasend®-konto".


Boendeland

 Sverige

Skapa ditt diasend®-konto

1 Inloggningsuppgifter


Fyll i din e-postadress, som blir ditt användarnamn, samt ett valfritt lösenord för ditt diasend®-konto. Klicka därefter på "gå vidare" längst ner i höger hörn.

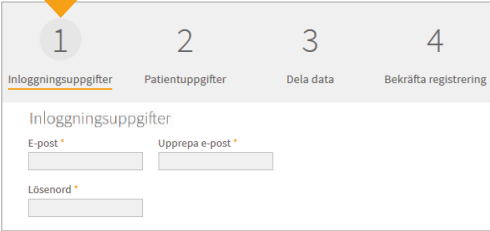

Skärmdump av inloggningsuppgifter. Överstaket visar fyra steg: 1 Inloggningsuppgifter, 2 Patientuppgifter, 3 Dela data, 4 Bekräfta registrering. Steg 1 är markerat. Formuläret innehåller fält för E-post (med en upprepning), Lösenord och en "Gå vidare"-knapp i höger hörn.

2 Patientuppgifter

Fyll i dina personliga uppgifter och klicka sedan på gå vidare.

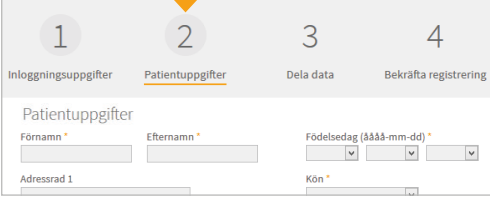

Skärmdump av patientuppgifter. Steg 2 är markerat. Formuläret innehåller fält för Förnamn, Efternamn, Födelsedag (åååå-mm-dd) och Adressrad 1. En "Gå vidare"-knapp finns i höger hörn.

3 Dela data

Om du fick en inbjudan från din vårdgivare via e-mail, så kommer numret med vårdgivarens Klinik-ID redan att vara ifyllt. Detta är din vårdgivares unika id-nummer som gör att du delar din data med dem. Klicka på gå vidare.


Om du inte fick någon inbjudan, kan du lägga till Klinik-ID senare. Slutför registreringen och logga sedan in på ditt konto och gå till fliken Kontoadm.



Skärmdump av dela data. Steg 3 är markerat. Formuläret innehåller ett fält för Klinik-ID (HCP-ID) med värdet 12-34567. En "Gå vidare"-knapp finns i höger hörn.

4 Bekräfta registrering


Bocka för rutan som säger att du godkänner våra villkor och därmed bekräftar registreringen av kontot. Klicka på gå vidare.

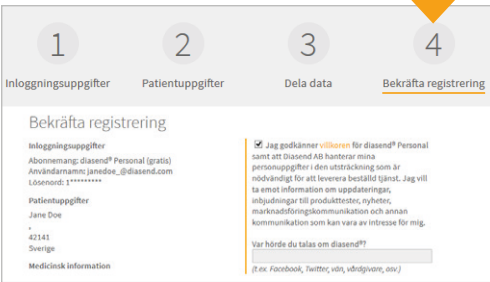

Skärmdump av bekräfta registrering. Steg 4 är markerat. Formuläret innehåller en text om villkoren för diasend® Personal-konto och en checkbox som är markerad. En "Gå vidare"-knapp finns i höger hörn.

5 Ladda ned och installera diasend® Uploader

Installera diasend® Uploader på din PC eller Mac, genom att klicka på relevant ikon. Följ installationsinstruktionerna på skärmen.

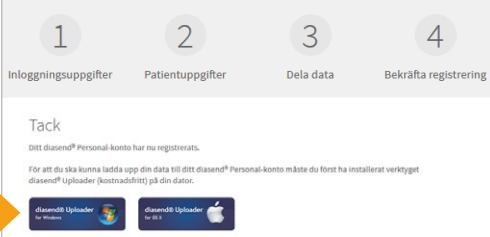

Skärmdump av tack. Steg 5 är markerat. Texten säger "Tack" och "Ditt diasend® Personal-konto har nu registrerats." Det finns länkar till diasend® Uploader för Windows och macOS. En "Gå vidare"-knapp finns i höger hörn.

Behöver du support?

Kontakta oss på sweden@diasend.com eller +46 (0) 31 762 88 88

Steg 2: Hur du överför data till diasend®

1

Starta diasend® Uploader

Dubbelklicka på ikonen för diasend® Uploader på din dator.




2

Anslut USB-kabeln

Anslut kabeln för din mätare/pump till en USB-port på din dator.

OBS! För att överföra data från en Omnipod® PDM till en Mac-dator som är tillverkad tidigare än mitten av 2012, och som kör OS X El Capitan, rekommenderar vi att du använder en USB hub.

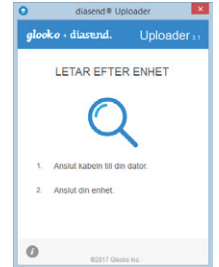


3

Anslut din mätare/pump

Anslut din mätare eller pump till USB-kabeln, eller placera den framför en IR-dongel.


OBS! För mer specifika instruktioner om hur du överför data från din mätare eller pump, vänligen använd vår diasend® Personal Quickguide som finns på support.diasend.com.

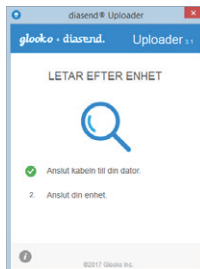

4

Överföringen påbörjas


Vänligen vänta tills överföringen är helt klar innan du kopplar från eller flyttar din mätare/pump.

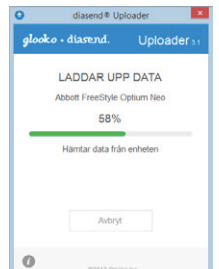

5

Bekräfta dina kontouppgifter


Fyll i dina användaruppgifter (fullständig e-postadress och det lösenord du valde när du skapade ditt konto). Klicka på Validera.

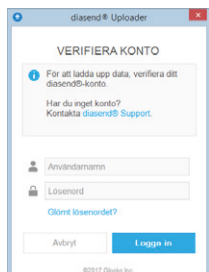

6

Se datan i tabeller och grafer

Logga in på www.diasend.com, genom att först välja svenska som språk och därefter fylla i dina användaruppgifter.

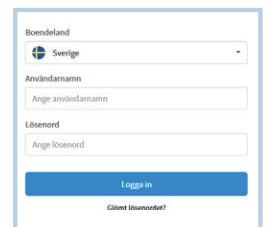

Exempel på rapporter och grafer

