

SNABBGUIDE DEXCOM G6

- NÄR DU SKA BYTA SÄNDARE

Dexcom G6 sändaren håller 3 månader, ibland längre.



Det bästa är att vänta med byte till dess att batteriet tagit slut. Sändarbytet sker alltid samtidigt som sensorbyte. När batteriet börjar ta slut får du varningar i mottagaren och/eller i appen. Den första varningen kommer ungefär 3 veckor innan byte ska ske. **När du inte längre har batteri kvar för 10 dagars sensoranvändning står det "Ny sändare" som meddelande. Först då behöver du aktivera din nya sändare.**



dexcomG6®

1. Stoppa sensor (om den inte redan gått ut). Se till att vänta 15 minuter innan du startar upp igen.
2. Klicka på **"Ny sändare"** i displayen och följ instruktionerna.


Om du av någon anledning vill byta sändare innan den gått ut, gå in i huvudmenyn under inställningar och sändare. Välj "Parkoppla ny" och följ instruktionerna.

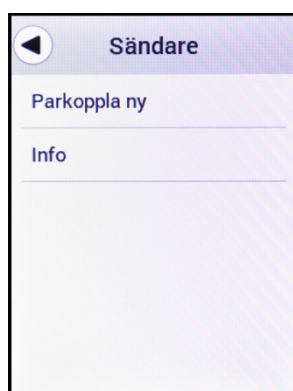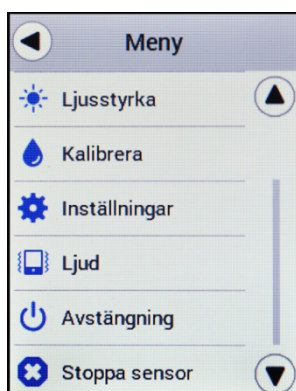

Dessa bilder är från mottagaren. Appen ser något annorlunda ut, men rubrikerna är samma.

3. Lägg in sensorkoden. Ange SN-numret på den nya sändaren. Numret hittar du både på baksidan av sändarkartongen och på sändarens baksida.

- Serienummer (SN) från:

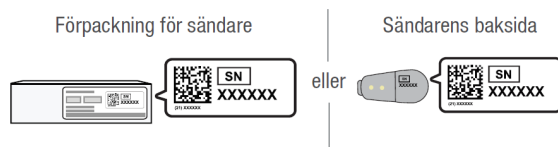

4. Sätt ny sensor enligt de vanliga instruktionerna, tryck fast den nya sändaren.
5. Vänta på att parkoppling ska ske och starta sedan sensorn.

Om du använder Dexcom G6-appen ska du ta bort den förbrukade sändaren från mobilens bluetooth-enheter. Gå in under telefonens inställningar och bluetooth. Där hittar du den tidigare parkopplade Dexcomsändaren. Det står DexcomXX, där XX står för de två sista symbolerna i sändarens nummer. Välj att mobilen ska glömma/ta bort den enheten.



NordicInfu Care AB, Box 14026, 167 14 Bromma, 08 601 24 40,
diabetes@infucare.se www.infucare.com