

Dexcom G7

KOLME **TÄRKEÄÄ** VAIHETTA
ENNEN KUIN ALOITAT
DEXCOM G7:N
KÄYTÖN
OMNIPOD 5:N KANSSA



Dexcom-sensorointijärjestelmän käyttöönotto on helppoa. Ennen ensimmäisen sensorin käynnistämistä sinun on suoritettava kolme pientä mutta tärkeää vaihetta, jotka on kuvattu seuraavassa.

Kysy diabeteshoitajaltasi, tehdäänkö Dexcom G7 -järjestelmän käyttöönotto etäaloituksena vai klinikakäynnillä.

Dexcom G7 -sovellusta voi käyttää
useimmilla älypuhelimilla.
Tarkista puhelinmallisi
yhteensopivuus täältä:
www.dexcom.com/compatibility



Vaihe 1

Lataa
sovellukset

- (1) Lataa Dexcom G7 -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- (2) Lataa Glooko-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Vaihtoehtoisesti voit mennä osoitteeseen my.glooko.com ja tehdä seuraavat vaiheet siellä.

Vaihe 2

Luo Dexcom-
ja Glooko-tilit
ja kirjaudu
sisään tileille

- (1) Dexcom G7 -sovelluksessa: luo tili sovelluksen ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Dexcom-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (2) Glooko-sovelluksessa tai osoitteessa my.glooko.com: luo tili ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Glooko-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (3) Kirjoita ylös käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja säilytä niitä turvallisessa paikassa, jotta voit tarvittaessa kirjautua sisään toisesta puhelimesta.



Alle 18-vuotiailla käyttäjillä on oltava täysi-ikäinen huoltaja, jolla on Dexcom-tili. Täysi-ikäisen huoltajan on ensin luotava tavallinen Dexcom-tili ohjeiden mukaisesti omalla puhelimellaan. Tämän jälkeen alaikäisen käyttäjän tili luodaan samalla puhelimella. Lopuksi alaikäisen käyttäjän tilille kirjaudutaan alaikäisen käyttäjätunnuksella ja salasamalla tämän omalta puhelimelta.

Vaihe 3

Liitä Dexcom-tili Glooko-tiliin

Jaa glukoosi-arvosi klinikan kanssa

Tähän tarvitaan klinikan ProConnect-koodia.



Ota yhteys klinikkaan, jos sinulla ei ole sitä.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Siirry kohtaan "Synk laite" ja napauta "Lisää uusi laite".
- (2) Valitse "CGM-laitteet" ja sen jälkeen "Dexcom". Paina "Lisää(1)".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Sovellukset ja laitteet" Paina Laitteet -välilehteä, Lisää laite, Verengluukoosilaitteet, Jatkuvan glukoosin seurannan monitori ja valitse "Dexcom".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa henkilökuvaketta ja valitse "Profiili".
- (2) Napauta "ProConnect" ja sen jälkeen "Lisää hoitotiimi". Anna koodi ja vahvista.
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Tili" sekä "ProConnect-koodi" / "Esisijainen terveydenhuollon tarjoaja" "Lisää uusi koodi" ja "Lähetä".
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Dexcom G7

Jos aiot käyttää seuraajatoimintoa

Dexcom G7:n avulla voit helposti jakaa glukoosiarvosi esimerkiksi ystävän, vanhemman tai kumppanin kanssa. Hän voi näin olla sinulle ylimääräisenä tukena.

Dexcom G7-käyttäjä

- (1) Mene kohtaan Liitännät näytön alaosassa ja napauta "Share".
- (2) Napauta "Kutsu seuraaja". Kirjoita seuraajan nimi, sähköpostiosoite ja valitse, mitä haluat jakaa. Käytä sähköpostiosoitetta, jota seuraaja voi lukea älypuhelimellaan.

Seuraaja

- (1) Lataa Dexcom Follow -sovellus App Storesta tai Google Playsta
- (2) Noudata saamasi sähköpostiviestin ohjeita. Jos et näe viestiä, tarkasta roskapostisi.
- (3) Aseta haluamasi varoitukset.

Ota tarvittaessa yhteyttä tukeemme!

Katso aukioloajat nettisivuiltamme:
diabetesinfucare.com

Soita numeroon 020 734 8760
sähköpostitse: diabetessupport@infucare.fi

Voit myös ottaa meihin yhteyttä täyttämällä
yhteydenottolomakkeemme osoitteessa
makingdiabeteseasier.com/fi-fi/tuki/ota-yhteytta

?

Onnea
Dexcom G7-
ja
Omnipod® 5 -
järjestelmien
käyttöön

