

Dexcom G7

CGM-tietojen jakaminen klinikalle Glookon avulla



KOLME TÄRKEÄÄ VAIHETTA ENNEN DEXCOM G7:N KÄYTTÖÖNOTTOA



Dexcomin käytön aloitus on helppoa. Ennen ensimmäisen sensorisi käynnistämistä sinun on suoritettava seuraavat kolme pientä mutta tärkeää vaihetta.

Kun olet päässyt alkuun Dexcom G7:n kanssa, voit jakaa CGM-tietosi klinikallesi. Tämän ansiosta hoitohenkilökunnan on helpompi antaa sinulle neuvontaa, joka perustuu ajantasaisiin tietoihisi. Tämä esite näyttää sinulle miten.


Kysy diabeteshoitajaltasi, aloitatko Dexcom G7:n etäaloituksena vai klinikkakäynnillä.

Dexcom G7 -sovellusta voi käyttää useimmilla älypuhelimilla. Tarkista puhelintasi yhteensopivuus täältä: www.dexcom.com/compatibility



Vaihe 1

Lataa
sovellukset

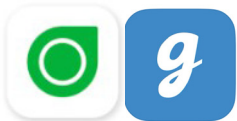


- (1) Lataa Dexcom G7 -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- (2) Lataa Glooko-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Vaihtoehtoisesti voit mennä osoitteeseen my.glooko.com ja tehdä seuraavat vaiheet siellä.

Vaihe 2

Luo Dexcom-
ja Glooko-tilit
ja kirjaudu
sisään tileille

- (1) Dexcom G7 -sovelluksessa: luo tili sovelluksen ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Dexcom-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (2) Glooko-sovelluksessa tai osoitteessa my.glooko.com: luo tili ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Glooko-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (3) Kirjoita ylös käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja säilytä niitä turvallisessa paikassa, jotta voit tarvittaessa kirjautua sisään toisesta puhelimesta.

Nyt olet valmis aloittamaan ensimmäisen Dexcom G7 -sensorisi!

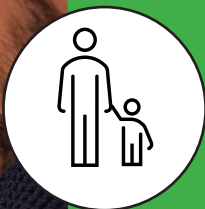

Alle 18-vuotiailla käyttäjillä on oltava täysi-ikäinen huoltaja, jolla on Dexcom-tili. Täysi-ikäisen huoltajan on ensin luotava tavallinen Dexcom-tili ohjeiden mukaisesti omalla puhelimellaan. Tämän jälkeen alaikäisen käyttäjän tili luodaan samalla puhelimella. Lopuksi alaikäisen käyttäjän tilille kirjaudutaan alaikäisen käyttäjätunnuksella ja salasamalla tämän omalta puhelimelta.

Vaihe 3

Liitä Dexcom-tili Glooko-tiliin

Jaa glukoosi-arvosi klinikan kanssa

Tähän tarvitaan klinikan ProConnect-koodia.



Ota yhteys klinikkaan, jos sinulla ei ole sitä.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Siirry kohtaan "Synk laite" ja napauta "Lisää uusi laite".
- (2) Valitse "CGM-laitteet" ja sen jälkeen "Dexcom". Paina "Lisää(1)".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Sovellukset ja laitteet" Paina Laitteet -välilehteä, Lisää laite, Verengluukoosilaitteet, Jatkuvan glukoosin seurannan monitori ja valitse "Dexcom".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa henkilökuvaketta ja valitse "Profiili".
- (2) Napauta "ProConnect" ja sen jälkeen "Lisää hoitotiimi". Anna koodi ja vahvista.
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Tili" sekä "ProConnect-koodi" / "Esisijainen terveydenhuollon tarjoaja" "Lisää uusi koodi" ja "Lähetä".
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Dexcom G7

Jos aiot käyttää seuraajatoimintoa

Dexcom G7:n avulla voit helposti jakaa glukoosiarvosi esimerkiksi ystävän, vanhemman tai kumppanin kanssa. Hän voi näin olla sinulle ylimääräisenä tukena.

Dexcom G7-käyttäjä

- (1) Mene kohtaan Liitännät näytön alaosassa ja napauta "Share".
- (2) Napauta "Kutsu seuraaja". Kirjoita seuraajan nimi, sähköpostiosoite ja valitse, mitä haluat jakaa. Käytä sähköpostiosoitetta, jota seuraaja voi lukea älypuhelimellaan.

Seuraaja

- (1) Lataa Dexcom Follow -sovellus App Storesta tai Google Playsta
- (2) Noudata saamasi sähköpostiviestin ohjeita. Jos et näe viestiä, tarkasta roskapostisi.
- (3) Aseta haluamasi varoitukset.

Ota tarvittaessa yhteyttä tukeemme!

Katso aukioloajat nettisivuiltamme:
diabetesinfucare.com

Soita numeroon 020 734 8760
sähköpostitse: diabetessupport@infucare.fi

Voit myös ottaa meihin yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomakkeemme osoitteessa
makingdiabeteseasier.com/fi-fi/tuki/ota-yhteytta

?



Onnea Dexcom G7:n
kanssa