

Dexcom G7

Deling til klinikk via glooko



TRE VIKTIGE TRINN Å GJØRE I FORBINDELSE MED AT DU SKAL STARTE DIN DEXCOM G7



Det er enkelt å starte Dexcom. Her hjelper vi deg med 3 små, men viktige trinn før du kan starte din første sensor.

Når du har kommet godt i gang med din Dexcom G7, kan du dele CGM-dataene dine med klinikken din. Dette gjør det lettere å få veiledning fra behandleren din, basert på de oppdaterte dataene dine. Denne brosjyren viser deg hvordan.


Spør din diabetessykepleier om du skal starte Dexcom G7 via et digitalt eller et fysisk møte.

Dexcom G7-appen fungerer på de fleste mobiler! Du kontrollerer om din mobil er kompatibel her:
www.dexcom.com/compatibility



Steg 1

Last ned appen

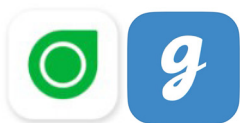


- (1) Last ned Dexcom G7-appen fra App Store eller Google Play
- (2) Last ned Glooko-appen fra App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå inn på websiden my.glooko.com for neste steg

Steg 2

Lag en konto og logg inn på din Dexcom og Glooko konto

- (1) I Dexcom G7-appen: følg instruksjonene for å skape en konto. Om du allerede har en Dexcom-konto, logg inn med brukernavn og passord
- (2) I Glooko-appen eller på websiden my.glooko.com: følg instruksjonen for å skape en konto. Om du allerede har Glooko-konto, logg inn med ditt eksisterende brukernavn og passord
- (3) Skriv ned ditt brukernavn og passord på et sikkert sted, så du kan logge inn og bruke en annen mobil ved behov

Nå er du klar til å starte din første Dexcom G7-sensor!

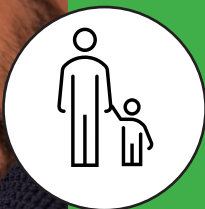

Brukere under 18 år behøver en myndig person med Dexcom-konto. Følg instruksjonen for å skape en vanlig Dexcom-konto for den voksne på den voksnes telefon. Lag så en ny konto for de mindreårige på samme telefon. Avslutt med å logge inn med den mindreåriges kontoopplysninger på brukerens telefon.

Steg 3

Koble
sammen din
Dexcom-konto
til Glooko-konto

Del
glukose-
målingene
dine med
klinikken din

ProConnect-kode
fra klinikken din
kreves.



Kontakt klinikken
om den mangler

Via Glooko-appen

- (1) Gå til "Synkronisering" klikk på "Ny enhet"
- (2) Velg "Kontinuerlig glukosmonitor" og deretter "Dexcom"
- (3) Skriv inn brukernavn og passord for Dexcom-kontoen. Følg instruksjonene

Via my.glooko.com

- (1) Klikk på sirkelen med initialene dine øverst til høyre og klikk på "innstillinger"
- (2) Bla ned til "Apper og enheter" og klikk på Dexcom
- (3) Skriv inn brukernavn og passord for din Dexcom-konto. Følg instruksjonene

Via Glooko-appen

- (1) Klikk på person-ikonet øverst til høyre og klikk på "Profil"
- (2) Klikk på "ProConnect" og klikk på "Add Care team" Tast inn kode og bekreft.
- (3) Du vil motta en bekreftelsesmelding på epost

Via my.glooko.com

- (1) Klikk på sirkelen med initialene dine øverst til høyre og klikk på "Innstillinger"
- (2) Bla ned til "Konto" og "ProConnect-kode"/stjerne med "Primær Klinik". Skriv inn koden og bekreft
- (3) Du vil motta en bekreftelsesmelding på epost.

Dexcom G7

Om du skal ha følgere

Med Dexcom G7 kan du enkelt dele dine glukoseverdier, for eksempel med en venn, forelder eller partner som kan være støttende og gi deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Dexcom G7-bruker

- (1) Gå til Tilkoblinger i bunden av skjermen og klikk på "Share"
- (2) Klikk på "Inviter følgere". Skriv inn følgerens navn og e-post-adresse og velg hva du vil dele. Bruk kun en e-postadresse som kan åpnes på følgerens mobiltelefon

Følger

- (1) Last ned Dexcom Follow appen fra App Store eller Google Play
- (2) Følg instruksjonene i e-posten du får. Sjekk søppelpostmappen din om du ikke finner e-posten
- (3) Still inn varslene du ønsker

Kontakt vår support ved behov!

Se åpningstider på nettsiden vår:
diabetesinfucare.com

Tel: 22 20 60 00

E-post: diabetessupport@infucare.no

Du kan også komme i kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet vårt på makingdiabeteseasier.com/no/support/kontakt-oss

?



Lykke til med
din
Dexcom G7