

dexcom one⁺

Delning till klinik via glooko



TRE VIKTIGA STEG ATT GÖRA I SAMBAND MED ATT DU SKA STARTA DEXCOM ONE+



Det är enkelt att starta Dexcom. Här hjälper vi dig med 3 små men viktiga steg när du ska starta din första sensor.

När du har kommit igång med din Dexcom ONE+, kan du dela dina CGM-data till din klinik. Det gör det lättare att få rådgivning från din vårdgivare, baserat på dina uppdaterade data. Denna broschyr visar dig hur.

Fråga din diabetessköterska om du ska starta Dexcom ONE+ vid ett digitalt eller ett fysiskt möte.

Dexcom ONE+-appen funkar på de flesta mobiler! Du kontrollerar om din mobil är kompatibel här:
www.dexcom.com/compatibility



Steg 1

Ladda ner appar




- (1) Ladda ner Dexcom ONE+ appen från App Store eller Google Play
- (2) Ladda ner Glooko-appen från App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå in på websidan my.glooko.com för nästa steg

Steg 2

Skapa konto och logga in på Dexcom och Glooko

- (1) I Dexcom ONE+-appen: följ instruktionen för att skapa ett konto. (Vi rekommenderar att använda mailadress och inte telefonnummer) Om du redan har ett Dexcom-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösenord
- (2) I Glooko-appen eller på websidan my.glooko.com: följ instruktionen för att skapa ett konto. Om du redan har ett Glooko-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösenord
- (3) Skriv ner dina användaruppgifter på ett säkert ställe, så du kan logga in och använda en annan mobil vid behov

Nu är du redo för att starta din första Dexcom ONE+ sensor!

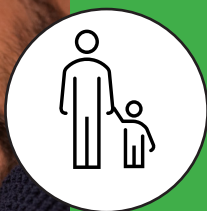

Användare under 18 år behöver en myndig anhörig med Dexcom-konto. Följ instruktionerna för att skapa ett vanligt Dexcom-konto för den myndige på den myndiges telefon. Skapa sen ett nytt konto för omyndige på samma telefon. Slutför genom att logga in med den omyndiges kontouppgifter på dennas telefon.

Steg 3

Anslut
Dexcom-konto
till Glooko-
konto

Dela dina
glukos-
värden med
din klinik

ProConnect-kod
från din klinik
krävs.



Kontakta kliniken
om den saknas.

Via Glooko-appen

- (1) Gå till "Synkronisera" och klicka på "Ny enhet"
- (2) Välj "Kontinuerliga glukosmätare" och sedan "Dexcom"
- (3) Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna

Via my.glooko.com

- (1) Klicka på cirklen med dina initialer högst upp till höger och klicka på "Inställningar"
- (2) Skrolla ner till "Appar och enheter" och klicka på "Dexcom"
- (3) Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna

Via Glooko-appen

- (1) Klicka på person-ikonen högst upp till höger och klicka på "Profil"
- (2) Klicka på "ProConnect" och klicka på "Lägga till vårdteam". Fyll i koden och bekräfta
- (3) Du får ett bekräftelsesmeddelande på mejl

Via my.glooko.com

- (1) Klicka på cirklen med dina initialer högst upp till höger, och klicka på "Profil"
- (2) Skrolla ner till "Konto" och "ProConnect-kod" / stjärnan med "Primär vårdgivare". Fyll i koden och bekräfta
- (3) Du får ett bekräftelsesmeddelande på mejl

Om du ska använda Följarkfunktionen

Med Dexcom ONE+ kan du enkelt dela dina glukosvärden, till exempel med en vän/förälder/partner som kan vara ett extra stöd och ge extra trygghet.

Dexcom ONE+-användaren

- (1) Gå till Anslutningar i botten av skärmen och klicka på "Share"
- (2) Klicka på "Bjud in följare".
Skriv in följarens namn och mejladress och välj vad du vill dela.
Använd endast den mejladress som kan öppnas på följarens mobiltelefon

Följaren

- (1) Ladda ner Dexcom Follow appen från App Store eller Google Play
- (2) Följ instruktionerna i mejlet du får. Kontrollera din skräppost om du inte hittar mejlet
- (3) Ställ in vilka varningar du vill ha

Kontakta vår support vid behov!

Se öppettider på vår hemsida:
diabetesinfucare.com

Tel: 08-601 24 40

E-post: diabetessupport@infucare.se

Du kan också komma i kontakt med oss genom att fylla i vårt kontaktformulär på makingdiabeteseasier.com/se/kontakta-oss.

?



Lycka till med
Dexcom ONE+