## Dexcom

## Så här kommer du igång med Dexcom Clarity

Öppna din webbläsare och skriv in följande adress: www.clarity.dexcom.eu



Klicka till höger där det står Dexcom Clarity för kliniker

## III Dexcom

Clarity.



## Skapa nytt konto



Klicka på "Registrera Nu" för att registrera din vårdcentral

älkommen till Dexcom Clarity för vårdgivare					
Dexcom Uploader för motta	gare måste köras eller installeras	s. Installera nu.			
Logga in med ditt Dexco	m Clarity vårdpersonalk	conto			
Användarnamn Glömt ditt användarnamn?	Glömt ditt lösenord?	Inloggning			



Leta upp Sverige i rullistan och tryck på Skicka



Tack för att du valt Dexcom Clarity. Börja registreringen med att välja ditt land.

Land Sverige



Klicka på "Lägg till en ny patient". Fyll i patientents uppgifter och dela klinikkoden med patienten. Patienten kan nu lägga in koden i appen och inom kort kommer patientens data att synas i Clarity.

Sök på patientnamn eller patient-ID		Dexcom Uploader för mottagare måste köras eller installeras.		iöras eller installeras. Installera nu. en ny patient Visa kod	
PATIENTENS NAMN	FÖDELSEDATUM	⇔ PATIENT-ID	$\begin{array}{ c c } & & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \end{array}$ SENASTE UPPLADDADE	GMI % (14 DAGAR)	$\begin{array}{c} & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \end{array}$

lakinc



9

diabetesinfucare.com I makingdiabeteseasier.se facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | @makingdiabeteseasier\_se

NordicInfu Care AB (Distributor) Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · www.infucare.com Dexcom tillverkas av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com. Dexcom ONE+ är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

