


Vejledning til Omnipod DASH®-systemet

Nemmere
insulintilførsel

Myrthe Heida
PODDER™ SIDEN 2019

omnipod[®]
DASH[®]

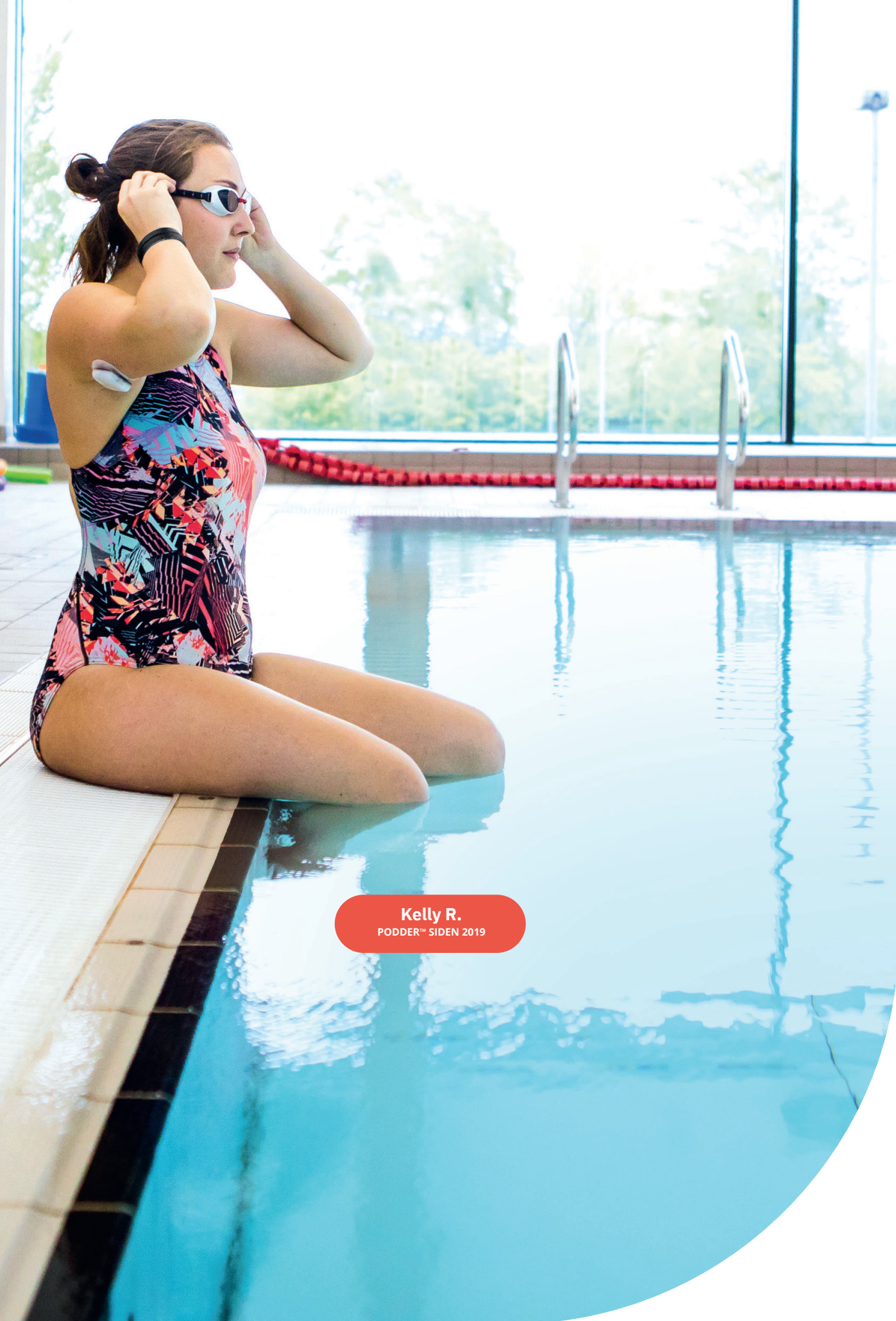

Kelly R.
PODDER™ SIDEN 2019

* Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

Sådan virker Omnipod DASH®

Indledning	2
> Hvad er Omnipod DASH-systemet?	2
> Omnipod DASH-pod'en	3
> Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM)	4
Omnipod DASH-systemets fordele	5
> Slangeløs fleksibilitet	5
> Diskret, let og vandtæt*	6
> Kontinuerlig insulintilførsel	7
> Nemt at komme i gang	8
> Nemt at programmere	9
> Omnipod DASH PDM: alternativer og indstillinger	10
Support og tjenester	11
Kundesupportteam	12

* Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

Hvad er Omnipod DASH-systemet?

Omnipod DASH-systemet er en slangeløs, vandtæt* insulinpumpe til personer, som har insulinkrævende diabetes.

Systemet består af to hovedkomponenter: en slangeløs pod og en håndholdt Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM), som anvendes til at programmere insulintilførslen via trådløs Bluetooth-teknologi***.

- > Den slangeløse pod er diskret, vandtæt* og tilfører insulin kontinuerligt i op til 3 dage***
- > Den moderne Omnipod DASH PDM med touchskærm er intuitiv, og patienterne lærer hurtigt at anvende den
- > Personligt tilpasset insulintilførsel til dine patienter med unikke insulinbehov. Mulighed for at programmere nul i basalen og insulin-kulhydrat-forholdet i trin på 0,1 betyder, at Omnipod DASH-systemet passer til flere af ambulatoriets patienter
- > Pod-placeringskort, som gør det lettere at rotere injektionsstederne for at skåne huden og sørge for, at insulinet optages effektivt
- > Hurtig adgang til patientdata, når de uploades til data behandlingssystemet Glooko®



* Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

**Ved start skal PDM'en og pod'en placeres op mod hinanden og være i kontakt enten på eller uden for bakken for stabil kommunikation under priming. Inden for 1,5 meter ved normal drift.

***Op til 72 timers kontinuerlig insulintilførsel.

Skærbilledet er kun ment som illustration.

Omnipod DASH-pod'en

En diskret, slangeløs og vandtæt* pod kan give op til 3 dages kontinuerlig insulintilførsel.**

Pod'en kan placeres overalt, hvor man normalt injicerer insulin. Den lille, fleksible kanyle indføres automatisk, og med et tryk på en knap starter den personligt tilpassede tilførsel af insulin.

Pod'en kan bæres diskret under tøjet, og da den er vandtæt, giver det større frihed for patienten.

FORSIDE



BAGSIDE



Egenskaber:

- > Indbygget insulinreservoir til 200 enheder, vinklet infusionssæt og automatisk indføring af kanylen.
- > Letvægtspod
- > Et tryk på en knap på PDM'en sørger for automatisk indføring af kanylen.
- > Rude til rosa indikator og kontrol af, at kanylen er indført.
- > Holdbar, vandtæt* podskal

Specifikationer:

- > Størrelse 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
- > Vægt: 26 g uden insulin
- > Insulinreservoirets volumen: 200 enheder
- > Kanylens indføringsdybde: 4-7 mm
- > Vandtæt med IP28-klassificering: 7,6 m i op til 60 minutter*
- > Temperaturinterval for anvendelse: 5 °C til 40 °C
- > Anvendelsestid: 72 timer**

* Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

** Op til 72 timers kontinuerlig insulintilførsel.

Omnipod DASH-PDM

Personal Diabetes Manager (PDM) med Bluetooth®, som styrer alle podfunktioner og programmeres ud fra den enkelte patients behov.



Hjem-skærmen:


- > Vis aktuel status for pod og PDM
- > Adgang til indstillingsmuligheder via menuikonet
- > Vis meddelelser og alarmer
- > Aktiv Insulin (AI) i Dashboard-fanen
- > Gennemgå og rediger basalprogrammer i Basal-fanen
- > Vis detaljer om pod og alternativer til at skifte pod i Pod info-fanen
- > Viser sidste bolus og sidste glukoseværdi (BG)
- > Nemt at tage bolusdosis via Bolus-knappen

TIPS: Følgende vises, hvis du trykker på menuikonet:

- > **Skift mellem basal- og pod-information**
- > **Indstil midlertidig basal**
- > **Angiv BG/glukoseværdi**
- > **Pausér insulin**
- > **Håndter forudindstillinger for midlertidig basal og bolus**
- > **Vis historik**
- > **Andre indstillinger**


Slangeløs fleksibilitet

Systemet kræver ikke nogen slanger, og der er derfor behov for færre komponenter end til insulinpumper med slanger. Pod'en både opbevarer og tilfører insulin uden en slange, som kan være i vejen.

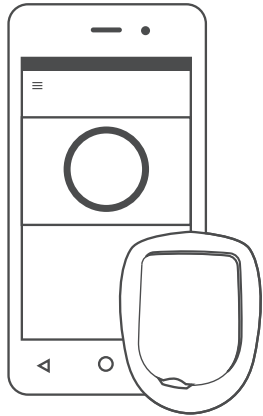


OMNIPOD DASH®-SYSTEMET


ELLER

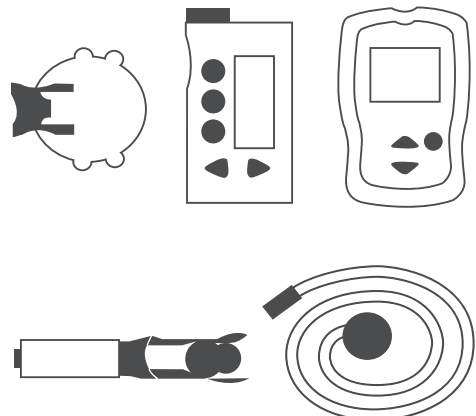

TRADITIONELLE PUMPER MED SLANGE

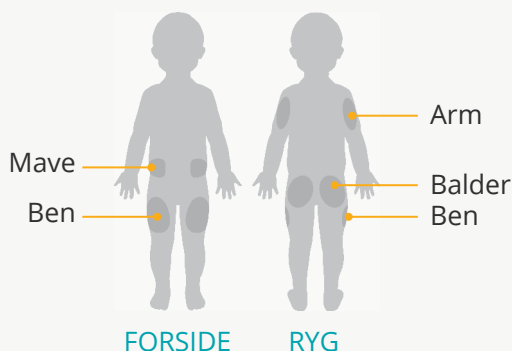

Pod'en kan placeres alle steder på kroppen, hvor patienten normalt ville injicere. Og uden slanger får patienten større frihed til at bevæge sig, lege, træne, svømme*, sove, have sex og leve livet fuldt ud på alle måder.

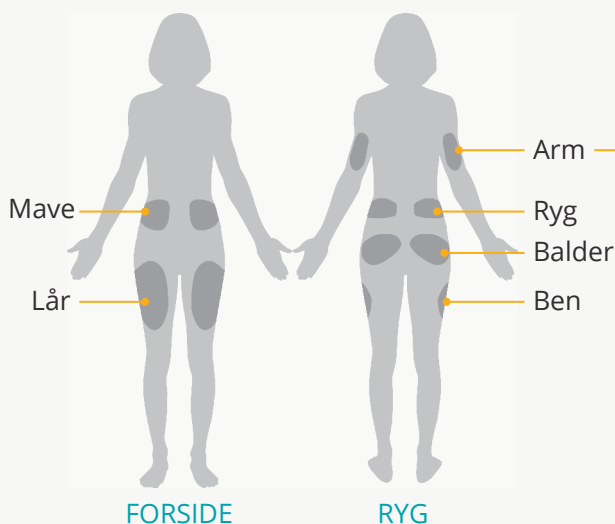

* Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

Diskret, let og vandtæt*



Marcus B.
PODDER™ SIDEN 2017

Pod'en er lille, let og kan bæres diskret under tøjet.

Desuden er pod'en vandtæt*. Den kan bæres, når patienten tager brusebad og bader og til svømning, uden at insulintilførslen bliver afbrudt.



Alexis B.
PODDER™ SIDEN 2013

* Pod'en er vandtæt* med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

Kontinuerlig insulintilførsel

Selv kortvarige afbrydelser i insulintilførslen kan bevirke, at blodglukoseniveauet stiger og er forhøjet i flere timer bagefter.¹

Da pod'en placeres direkte på kroppen og er vandtæt*, behøver brugeren ikke at tage den af under brusebad, badning, træning eller sex. Det betyder, at den til forskel fra traditionelle insulinpumper aldrig behøver at blive koblet fra, og at der virkelig bliver tilført insulin helt uden afbrydelser.

I et prospektivt, åbent studie, som blev publiceret i Diabetes Care, blev effekten af kortvarige frakoblinger af insulininfusionssæt målt på glukoseniveauerne. Konklusionen var, at "30 minutters afbrydelse i infusionen af basalinsulin førte til en signifikant glukoseforhøjelse på ca. ~0,06 mmol/l for hvert minuts afbrydelse i basalinsulinet."



* Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

1. Zisser H. Quantifying the Impact of a Short-Interval Interruption of Insulin-Pump Infusion Sets on Glycemic Excursions. Diabetes Care. 2008; 31:238-239. Studiet blev udført med en tidligere generation af insulinbehandlingssystemet Omnipod®.

Nemt at komme i gang

Det er nemt at klargøre pod'en. Den skal bare fyldes med insulin og den automatiske priming startes. Kanylen indføres med et tryk på en knap på Omnipod DASH-PDM.

Trin 1. Fyld pod'en

Pod'en primer sig selv automatisk og udfører nogle sikkerhedskontroller for at forberede insulintilførslen.



Trin 2. Sæt pod'en på

Pod'en kan placeres alle steder, hvor patienten ville injicere insulin.



Trin 3. Tryk på Start på Omnipod DASH PDM

Kanylen indføres automatisk, altid i samme vinkel og i samme dybde. Insulintilførslen begynder med det samme, patienten behøver ikke at se eller røre ved kanylen.



Nemt at programmere

Pod'en og Omnipod DASH PDM kommunikerer trådløst via Bluetooth®*.



Omnipod DASH PDM giver tydelige, letforståelse, trinvisse instruktioner i, hvordan du indstiller pod'en og programmerer en individuelt tilpasset insulintilførsel.

Det betyder, at du ikke skal bruge så meget tid på teknikken og får mere tid til at tage hånd om, hvordan dine patienter håndterer deres diabetes.

Med Omnipod DASH PDM programmeres insulintilførslen ud fra de faste og variable doser, diabetesteamet anbefaler. PDM'en har en indbygget bolusberegner, som gør det lettere at tage de rigtige bolusdosser. Bolusberegneren anvender aktuelle indtastninger af blodglukoseværdien, angivne kulhydrater og aktivt insulin til at foreslå en bolusdosis.

* Ved start skal PDM'en og pod'en placeres op mod hinanden og være i kontakt enten på eller uden for bakken for stabil kommunikation under priming. Inden for 1,5 meter ved normal drift. Skærbilledet er kun ment som illustration.

Omnipod DASH PDM: alternativer og indstillinger

Bolus	> Min. bolus: 0,05 U > Maks. bolus: 30 U > Maks. bolushastighed: 1,5 U/min. > Forlænget bolus: %
Basal	> 12 basalprogrammer > 24 segmenter i trin på 30 minutter > Maks. basalrate: 30 U/time > Basalrate, trin: 0,05 U/time > Midlertidig basalrate : % eller U > Mulighed for at programmere nul i basalrate
Bolusberegner	> Aktivt insulin (AI) > 8 segmenter til blodglukosemålværdi > 8 segmenter til insulin-kulhydrat-forhold. Kan indstilles i trin på 0,1 g kulhydrat/E > 8 segmenter til korrektionsfaktor
Forudindstillinger	> 7 boli > 12 midlertidig basal
Hukommelse	> Kan rumme op til 90 dages data

Nordic Infucare support og tjenester

Nordic Infucare tilbyder support og service for at gøre det så nemt som muligt at komme i gang med at anvende Omnipod DASH. Der er en række ekstratjenester, som kan hjælpe dig og din patient med at få det størst mulige udbytte af Omnipod DASH. Få mere information – kontakt vores kundesupportteam eller din lokale Omnipod-repræsentant.

> **Pod Experience Kit**

En gratis, ikke-fungerende demo-pod* til patienter, som vil prøve at anvende en pod.

> **Virtuel Omnipod DASH PDM**

Simulator, for at patienten kan se og opleve, hvordan Omnipod DASH PDM virker, og teste funktioner. Altid tilgængelig via diabetesinfucare.com

> **Oplæring i Omnipod DASH-systemet**

Vores lokale repræsentanter kan hjælpe med oplæring af sundhedspersonale og af personer, som skal begynde med eller allerede anvender Omnipod DASH-systemet.

> **Undervisningsmateriale**

Instruktionsvideoer, brugervejledning, hurtigvejledninger og praktiske tips er altid tilgængelige på diabetesinfucare.com

> **Udlån af ferie-PDM**

Mulighed for at låne en reserve-PDM ved udlandsrejse. Kontakt kundesupportteamet for yderligere information.

> **Omnipod-returprogram**

Gratis returprogram for brugte pod'er. Kontakt kundesupportteamet for information og bestilling af returemballage.

> **Spørgsmål til bestilling**

Ved spørgsmål til bestillinger og leverancer direkte fra Nordic Infucare – kontakt ordreafdelingen i kundesupportteamet

> **Dataupload til Glooko®**

Giver sundhedspersonalet og brugeren adgang til diabetesdata på en brugervenlig platform ved upload af data fra Omnipod DASH PDM. Mulighed for at se mønstre og data på smartphone eller computer for lettere at forstå sammenhængen mellem glukoseværdi, insulin og aktiviteter og give grundlag for ændringer i behandlingen.



* demo-pod'en er en nålefri, ikke-fungerende pod, som kan bæres i op til 3 dage.

Land:	Telefonnummer:	E-mail:
Sverige	+46 (0) 8 601 24 40	diabetessupport@infucare.se
Danmark	+45 70 28 10 24	teknisksupport@infucare.dk
Norge	+47 22 20 60 00	diabetessupport@infucare.no
Finland	+358 (0) 207 348 760.	diabetessupport@infucare.fi

BESØG [DIABETESINFUCARE.COM](https://diabetesinfucare.com)

Vigtig sikkerhedsinformation:

Insulinbehandlingssystemet Omnipod DASH er beregnet til subkutan insulintilførsel i faste og variable doser til behandling af diabetes mellitus hos personer, som har behov for insulin. Omnipod DASH-systemet er testet og dokumenteret sikkert at anvende med følgende U-100-insuliner: Novolog®/ NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Insulin lispro Sanofi® og Apidra®. Se brugervejledningen til Omnipod DASH-systemet for fuldstændig sikkerhedsinformation, herunder indikationer, kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner.



Kelly R.
PODDER™ SIDEN 2019

Nordic Infucare Kundesupportteam 43 27 03 13
teknisksupport@infucare.dk

diabetesinfucare.com

 [makingdiabeteseasierdanmark](https://www.facebook.com/makingdiabeteseasierdanmark)

 [@makingdiabeteseasier_dk](https://www.instagram.com/makingdiabeteseasier_dk)

Nordic Infucare distributør © 2023 Insulet Corporation fremstiller. Omnipod, Omnipod-logotypen, DASH, Omnipod DASH er CE-mærket i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger. DASH-logotypen og Podder er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Insulet Corporation i USA og andre jurisdiktioner. Bluetooth®-ordmærkerne og -logotyperne er registrerede varemærker, som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af sådanne mærker af Insulet Corporation sker på licens. Glooko er et varemærke, som tilhører Glooko, Inc. og anvendes med tilladelse. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere. Anvendelse af tredjepartsvaremærker indebærer ikke godkendelse, forretningsforhold eller anden forbindelse. Med eneret. Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland.
OMNI.DK.051-01-AUG2023 INS-ODS-07-2023-00008 V1. Omnipod DASH er CE-mærket i henhold til MDD93/42/EEC

