

UUSI HELPPO SIIRTO OMNIPOD DASH™ JÄRJESTELMÄÄN

Opas asetusten löytämiseen



AIEMPIEN PUMPPUASETUSTEN SIIRTÄMINEN OMNIPOD DASH -JÄRJESTELMÄÄN

Tee vaiheet 1 ja 2 ennen kuin käynnistät Omnipod DASH -järjestelmän.

1. Hae asetukset vanhasta PDM-laitteesta. Ks. tarkemmat ohjeet seuraavalta sivulta.
2. Kirjoita PDM-asetuksesi Omnipod DASH -järjestelmälle tarkoitettuun lomakkeeseen.

Lomake ("Omnipod DASH PDM -asetukset")
on ladattavissa osoitteesta
www.diabetesinfucare.com/fi-fi.

Omnipod DASH -järjestelmän käyttö aloitetaan
aina hoitavan klinikan kanssa sovitulla tavalla.

Aloita Omnipod DASH -PDM-laitteen käyttö
asettamalla paristo, lataamalla laite ja painamalla
sen jälkeen käynnistyspainiketta.

Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja anna
asetukset täyttämästäsi lomakkeesta.

Asetusten määrittämisen jälkeen PDM-laite
käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Tarkista huolellisesti, että siirrät järjestelmään oikeat
asetukset. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma
asetuksistasi, käänny aina diabeteshoitajasi puoleen.

Aikasetukset Omnipod DASH™ PDM -laitteelle, tarvaydenhuollon ammattilaisen määrittämät			
1.	Maksimibasaalitaso*		U/h
2.	Basaali 1*	Aikasegменти 00:00 -	U/h U/h U/h U/h U/h U/h U/h
3.	Täpänen basaali (%)		<input type="radio"/> Käytössä <input type="radio"/> Ei käytössä
4.	VS-tavoitealueen rajat		Alaraja mmo/L Yläraja mmo/L
5.	Boluslaskuri		<input type="radio"/> Käytössä <input type="radio"/> Ei käytössä
6.	VS-Tavoite*	Aikasegменти 00:00 -	Tavoite mmo/L Korjas, kun yli mmo/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L
7.	Minimi-VS boluslaskentoihin		mmol/L
8.	Insulini-hiljhydraatti-suhde (I:HI)*	Aikasegменти 00:00 -	1 insulinyksikkö kattaa g g g g g
9.	Korjauksen*	Aikasegменти 00:00 -	1 insulinyksikkö laskee VSa mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L
10.	Käänteinen korjaus*		<input type="radio"/> Käytössä <input type="radio"/> Ei käytössä
11.	Aktiivisen insulinin kesto*		tuntia
12.	Maksimibolus*		yksikköä
13.	Jatkettu bolus (%)		<input type="radio"/> Käytössä <input type="radio"/> Ei käytössä
Huomio! Kun yllä mainitut asetukset on tehty, PDM käynnistyy uudelleen ja tallentaa asetukset.			
Alla olevissa toiminnoissa on valmiit esiasetukset. Niitä voidaan helposti muuttaa kohdassa Asetukset/Muistutukset			
• Pumppu vanhenee (esiasetus 4 tuntia)			
• Sallii lähes tyhjä (esiasetus 10 U)			
Podder, Omnipod ja Omnipod Dash -logo ovat Insulet Corporationin (valmistaja) tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. OMNIFL001-01-FEB2020. NORDICINFU CARE AB (jakelija) www.infucare.fi			

NÄIN LÖYDÄT ASETUKSET VANHASTA PDM-LAITTEESTA

Hae kukin alla lueteltu asetus laitteen asetusvalikosta.

Kirjoita PDM-asetuksesi Omnipod DASH -järjestelmälle tarkoitettuun lomakkeeseen.



Se on ladattavissa osoitteesta www.diabetesinfucare.com/fi-fi.

	ASETUKSEN NIMI LOMAKKEESSA	ASETUKSEN SIJAINTI PDM-LAITTEESSA:
1.	Maksimibasaalitaso	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken.
2.	Basaali 1	Asetukset / Basaali ohjelmat
3.	Tilapäinen basaali (%)	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken.
4.	VS-tavoitealueen rajat	Asetukset / Järjestelmäasetus / VS-mittari
5.	Boluslaskuri	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken.
6.	VS-tavoite	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken. / Suhteet/kertoimet/kohteet
7.	Minimi-VS boluslaskentoihin	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken. / Suhteet/kertoimet/kohteet
8.	Insuliini-hiilihydraatti-suhde (I:HH)	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken. / Suhteet/kertoimet/kohteet
9.	Korjauskerroin	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken. / Suhteet/kertoimet/kohteet
10.	Käänteinen korjaus	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken. / Suhteet/kertoimet/kohteet
11.	Aktiivisen insuliinin kesto	Asetukset / Järjestelmäasetukset / Bolus/basaali/lasken. / Suhteet/kertoimet/kohteet / Insuliinin toiminta
12.	Maksimibolus	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken.
13.	Jatkettu bolus (%)	Asetukset / Järjestelmäasetus / Bolus/basaali/lasken.

Lähes tyhjän säiliön varoituksen esiasetus on 10 U, kun Omnipod DASH otetaan käyttöön. Pumpun vanhenemista koskevan varoituksen esiasetus on 4 tuntia. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, voit tehdä sen kohdassa Asetukset/Muistutukset, kun olet syöttänyt asetuksesi ja Omnipod DASH -PDM-laite on käynnistynyt uudelleen.

Tarkista huolellisesti, että siirrät järjestelmään oikeat asetukset.

Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma asetuksistasi, käänny aina diabeteshoitajasi puoleen. Omnipod DASH -järjestelmän käyttö aloitetaan aina hoitavan klinikan kanssa sovitulla tavalla. Kun käynnistät PDM-laitteen ensimmäistä kertaa ja määrität asetuksesi, noudata näytön ohjeita vaihe vaiheelta.

Lue lisää osoitteesta: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.fi | facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi | [@makingdiabeteseasier_fi](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_fi)