


Veiledning for Omnipod DASH®-systemet

Enklere insulintilførsel

Myrthe Heida
PODDER™ SIDEN 2019

omnipod[®]
DASH[®]

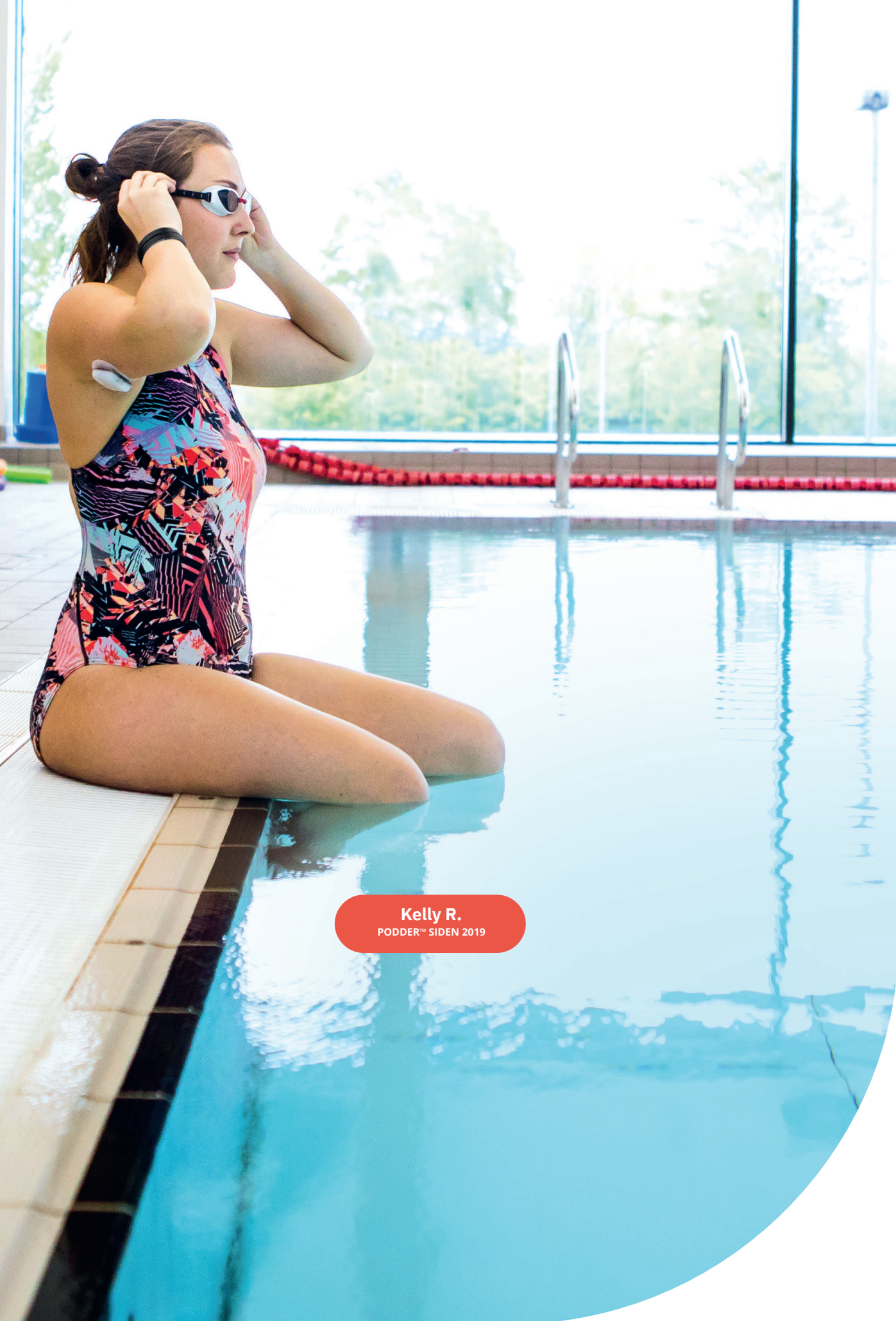

Kelly R.
PODDER™ SIDEN 2019

* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

Slik fungerer Omnipod DASH®

Innledning	2
> Hva er Omnipod DASH-systemet?	2
> Omnipod DASH-poden	3
> Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM)	4
Fordelene ved Omnipod DASH-systemet	5
> Slangefri fleksibilitet	5
> Diskré, vanntett og lett å bære*	6
> Kontinuerlig insulintilførsel	7
> Enkelt å komme i gang	8
> Enkel å programmere	9
> Omnipod DASH PDM: alternativer og innstillinger	10
Support og tjenester	11
Supportteam	12

* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

Hva er Omnipod DASH-systemet?

Omnipod DASH-systemet er en slangefri, vanntett* insulinpumpe for personer med insulinavhengig diabetes.

Systemet består av to hovedkomponenter: en slangefri pod og en håndholdt Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) som brukes til å programmere insulintilførselen ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi**.

- > Den slangefrie poden er diskret, vanntett* og tilfører insulin kontinuerlig i inntil 3 dager***
- > Den moderne Omnipod DASH PDM-en med berøringsskjerm er intuitiv, og man lærer raskt hvordan å håndtere den.
- > Personlig tilpasset insulintilførsel for pasientene dine med unike insulinbehov. Muligheten for å programmere null i basaldose og karbohydratkvote i trinn på 0,1 gjør at Omnipod DASH-systemet passer for en større pasientgruppe.
- > Podplasseringskartet gjør det lettere... gjør det lettere å rotere injeksjonsstedene for å skåne huden og sikre at insulinet tas effektivt opp.
- > Rask tilgang til pasientdata når de lastes opp til databehandlingssystemet Glooko®



* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

**Ved oppstart skal PDM-en og poden plasseres inntil hverandre og være i kontakt enten på eller utenfor brettet for å oppnå stabil kommunikasjon under fylling. Innenfor 1,5 meter ved normal drift.

*** Opptil 72 timers kontinuerlig insulintilførsel.

Skjermbildet er bare ment som en illustrasjon.

Omnipod DASH-poden

En diskre, slangefri og vanntett* pod kan gi opp til 3 dagers kontinuerlig insulintilførsel.**

Poden kan plasseres overalt der du vanligvis injiserer insulin. Den lille, fleksible kanylen føres inn automatisk, og med et trykk på en knapp starter du den personlig tilpassede tilførselen av insulin.

Poden kan bæres diskre under klærne, og siden den er vanntett gir den pasienten større frihet.

FORSIDE



BAKSIDE



Egenskaper:

- > Innebygd insulinreservoar for 200 enheter, vinklet infusjonssett og automatisk innføring av kanyle.
- > Lettvektspod
- > Ett knappetrykk på PDM-en for automatisk innføring av kanyle.
- > Rute for rosa indikator og kontroll av at kanylen er ført inn.
- > Slitesterkt, vanntett* pod-hus

Spesifikasjoner:

- > Størrelse 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
- > Vekt: 26 g uten insulin
- > Insulinreservoarets volum: 200 enheter
- > Kanylens innføringsdybde: 4–7 mm
- > Vanntett med IP28-klassifisering: 7,6 meter i opptil 60 minutter*
- > Temperaturintervall for bruk: 5 °C til 40 °C
- > Brukstid: 72 timer**

* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

** Opptil 72 timers kontinuerlig insulintilførsel.

Omnipod DASH PDM

Personal Diabetes Manager (PDM) med Bluetooth® som styrer alle podfunksjoner og programmeres i henhold til pasientens individuelle insulinbehov.



Startskjermbildet:


- > Vise aktuell status for pod og PDM
- > Tilgang til innstillingsalternativer via menyikonene
- > Vise meldinger og alarmer
- > Aktivt Insulin (AI) i Dashboard-fanen
- > Se gjennom og rediger basalprogram i Basal-fanen
- > Vise detaljer om pod og alternativer for å bytte pod i Pod-info-fanen
- > Viser siste bolus og siste glukoseverdi (BS)
- > Enkelt å ta bolusdose via Bolus-knappen

TIPS: Følgende vises hvis du trykker på menyikonet:

- > **Veksle mellom basal- og pod-informasjon**
- > **Still inn midlertidig basal**
- > **Angi BS/glukoseverdi**
- > **Sett insulin på pause**
- > **Behandle forhåndsinnstillinger for midlertidig basal og bolus**
- > **Vis historikk**
- > **Endre innstillinger**


Slangefri fleksibilitet

Ettersom det ikke er nødvendig å bruke slange i systemet, har man bruk for færre komponenter enn til insulinpumper med slange. Poden både lagrer og tilfører insulin uten noen slange som kan være i veien.

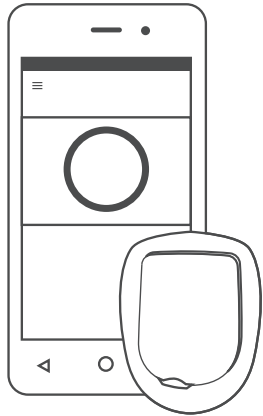


OMNIPOD DASH®-SYSTEMET


ELLER

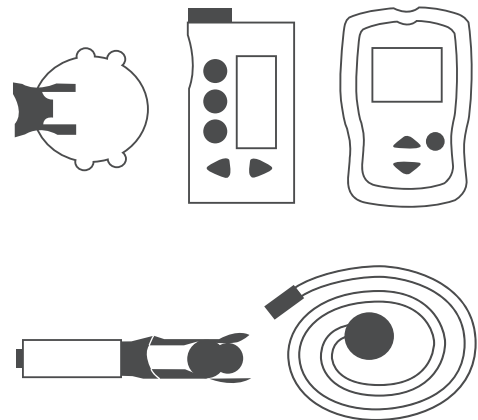

TRADISJONELLE PUMPER MED SLANGE

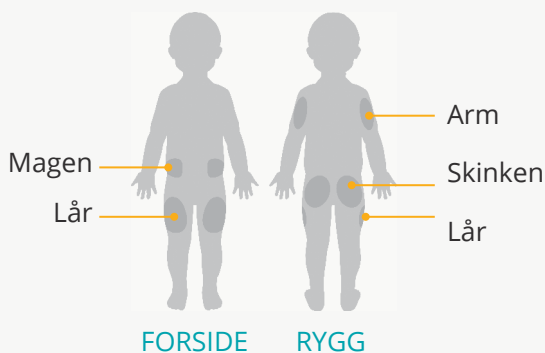

Poden kan plasseres overalt på kroppen der pasienten vanligvis ville ha injisert insulin. Og uten slanger får pasienten større frihet til å bevege seg, leke, trene, svømme*, sove, ha sex og leve livet til fulle på alle måter.

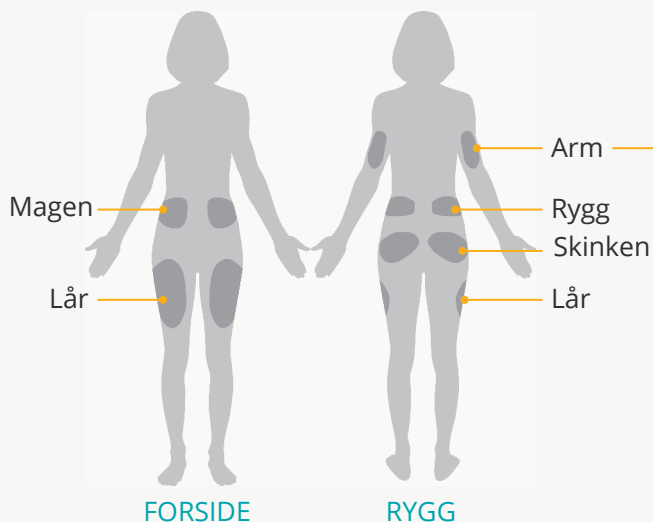

* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

Diskré, vanntett og lett å bære*



Marcus B.
PODDER™ SIDEN 2017

Poden er liten, lett og kan bæres diskre under klærne.

Dessuten er poden vanntett*. Den kan bæres på kroppen når pasienten dusjer og bader og ved svømming, uten at insulintilførselen avbrytes.



Alexis B.
PODDER™ SIDEN 2013

* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

Kontinuerlig insulintilførsel

Også kortvarige avbrudd i insulintilførselen kan føre til at glukosenivået stiger og forblir høyt i flere timer etterpå.¹

Ettersom poden plasseres rett på kroppen og er vanntett, er det ikke nødvendig å ta den av ved dusjing, bading, trening eller sex. Det vil si at den til forskjell fra tradisjonelle insulinpumper aldri behøver å kobles fra, og at insulin virkelig blir tilført helt uten avbrudd.

I en prospektiv, åpen studie som ble publisert i Diabetes Care, målte man effekten av kortvarige frakoblinger av infusjonssett for insulin på glukosenivåene. Konklusjonen var at "30 minutters avbrudd i infusjonen av basalinsulin førte til en signifikant økning i glukosenivået på ca. ~0,06 mmol/l for hvert minutt som avbruddet i basalinsulinet varte."¹



* Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.

1. Zisser H. Quantifying the Impact of a Short-Interval Interruption of Insulin-Pump Infusion Sets on Glycemic Excursions. Diabetes Care. 2008; 31:238-239. Studien ble gjennomført med en tidligere generasjon av insulinhåndteringssystemet Omnipod®.

Enkelt å komme i gang

Poden er lett å klargjøre. Det er bare å fylle den med insulin og starte den automatiske primingen. Kanylen føres inn med et knappetrykk på Omnipod DASH PDM.

Trinn 1. Fyll poden

Poden primer seg selv automatisk og gjennomfører en rekke sikkerhetskontroller for å forberede insulintilførselen.



Trinn 2. Sett fast poden

Poden kan plasseres hvor som helst der pasienten ville injisert insulin.



Trinn 3. Trykk på Start på Omnipod DASH PDM

Kanylen føres inn automatisk, alltid i samme vinkel og til samme dybde. Insulintilførselen starter opp med det samme, pasienten behøver ikke å se eller røre ved kanylen.



Skjermbildet er bare ment som en illustrasjon.

Enkelt å programmere

Poden og Omnipod DASH PDM kommuniserer trådløst med Bluetooth®-teknologi*.



Omnipod DASH PDM gir tydelige, lettfattelige og trinnvise instruksjoner om hvordan du stiller inn poden og programmerer en individuelt tilpasset insulintilførsel.

Det vil si at du kan bruke mindre tid på teknologien og får mer tid til pasientene dine og hvordan de håndterer diabetesen sin.

Med Omnipod DASH PDM programmeres insulintilførselen utifra de faste og variable dosene som anbefales av diabetesteamet. PDM-en har en innebygd boluskalkulator som gjør det lettere å ta korrekte bolusdosser. Boluskalkulatoren benytter inntastede verdier for blodglukose, angitt karbohydratinntak og aktivt insulin for å foreslå en bolusdose.

* Ved oppstart skal PDM-en og poden plasseres inntil hverandre og være i kontakt enten på eller utenfor plastholderen for å oppnå stabil kommunikasjon under fylling. Innenfor 1,5 meter ved normal drift. Skjermbildet er bare ment som en illustrasjon.

Omnipod DASH PDM: alternativer og innstillinger

Bolus	> Min. bolus: 0,05 E > Maks. bolus: 30 E > Maks. bolus – flythastighet: 1,5 E/min > Forlenget bolus: %
Basal	> 12 basalprogrammer > 24 segmenter i trinn på 30 minutter > Maks. basalhastighet: 30 E/time > Basalhastighet, trinn: 0,05 E/time > Midlertidig basaldose: % eller E > Mulighet for å programmere null i basaldose
Boluskalkulator	> Aktivt Insulin (AI) > 8 segmenter for blodglukosemålverdi > 8 segmenter for karbohydratkvote. Kan stilles inn i trinn på 0,1 g karbohydrat/E > 8 segmenter for korreksjonsfaktor
Forhåndsinnstillinger	> 7 bolus > 12 midlertidig basal
Lagring av logg	> Lagrer data for inntil 90 dager

Nordic Infucare support og tjenester

Nordic Infucare tilbyr support og service for å gjøre det så enkelt som mulig å komme i gang med og bruke Omnipod DASH. Det finnes en rekke tilleggstjenester for å hjelpe deg og pasienten din med å få mest mulig ut av å bruke Omnipod DASH. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte supportteamet vårt eller din lokale Omnipod-representant.

> **Pod Experience Kit**

En kostnadsfri, ikke-fungerende demo-pod* for pasienter som vil prøve hvordan det er å bruke en pod.

> **Virtuell Omnipod DASH PDM**

Simulator for at pasienten skal kunne se og kjenne hvordan Omnipod DASH PDM fungerer og prøve ut funksjonene. Alltid tilgjengelig via diabetesinfucare.com

> **Opplæring i bruk av Omnipod DASH-systemet**

Våre lokale representanter kan hjelpe til med å lære opp helsepersonell og de som skal begynne å bruke eller allerede bruker Omnipod DASH-systemet.

> **Opplæringsmaterieell**

Instruksjonsvideoer, brukerhåndbok, hurtigveiledninger og nyttige tips er alltid tilgjengelig på diabetesinfucare.com

> **Omnipod returprogram**

Kostnadsfritt returprogram for brukte poder. Kontakt supportteamet for å få informasjon og bestille retur-esker.

> **Spørsmål til bestillingen**

Ved spørsmål om bestillinger og leveringer som gjennomføres direkte fra Nordic Infucare – kontakt ordreavdelingen i supportteamet

> **Opplasting av data til Glooko***

Gir helsevesenet og brukeren tilgang til diabetesdata på en brukervennlig plattform gjennom opplasting av data fra Omnipod DASH PDM. Mulighet for å se mønstre og data på smarttelefonen eller PC-en for lettere å forstå sammenhengen mellom glukoseverdier, insulin og aktiviteter, og gi grunnlag for behandlingsendringer.



* demo-poden er en nålefri, ikke-fungerende pod som kan bæres i opptil 3 dager.

Land:	Telefonnummer:	E-post:
Sverige	+46 (0) 8 601 24 40	diabetessupport@infucare.se
Danmark	+45 70 28 10 24	teknisksupport@infucare.dk
Norge	+47 22 20 60 00	diabetessupport@infucare.no
Finland	+358 (0) 207 348 760.	diabetessupport@infucare.fi

BESØK [DIABETESINFUCARE.COM](https://diabetesinfucare.com)

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Insulinhåndteringssystemet Omnipod DASH er beregnet for å brukes til subkutan insulintilførsel i faste og variable doser for å håndtere diabetes mellitus hos personer som behøver insulin. Omnipod DASH-systemet er testet og har vist seg å være sikkert for bruk med følgende U-100 insuliner: Novolog®/ NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Insulin lispro Sanofi® og Apidra®. Se bruksanvisningen for Omnipod DASH-systemet for fullstendig sikkerhetsinformasjon, inkludert indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner.



Kelly R.
PODDER™ SIDEN 2019

Nordic Infucare Supportteam 22 20 60 00
diabetessupport@infucare.no

diabetesinfucare.com

 [makingdiabeteseasiernorge](#)

 [@makingdiabeteseasier_no](#)

Nordic Infucare forhandler © 2023 Insulet Corporation produsent. Omnipod, Omnipod-logoen, DASH, Omnipod DASH er CE-merket i henhold til MDD93/42/EØF. DASH-logoen og Podder er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Insulet Corporation i USA og andre jurisdiksjoner. Bluetooth®-ordmerkene og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Insulet Corporation skjer på lisens. Glooko er et varemerke som tilhører Glooko, Inc. og brukes med tillatelse. Alle øvrige varemerker tilhører respektive eiere. Bruk av tredjeparts varemerker innebærer ikke godkjenning, forretningsforhold eller annen tilknytning. Med enerett. Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland.
OMNI.NO.044-01-AUG2023 INS-ODS-07-2023-00007 V1. Omnipod DASH er CE-merket i henhold til MDD93/42/EEC

