

TERVETULOA OMNIPOD DASH™ INSULIN MANAGEMENT SYSTEM -JÄRJESTELMÄÄN



PIKAOHJE

SISÄLTÖ



3 PUMPUN VAIHTAMINEN

4 INSULIINI- JA VS-HISTORIAN TARKASTELEMINEN

6 BOLUKSEN ANTAMINEN

8 BASAALIOHJELMAN MUOKKAAMINEN


10 UUSIEN BASAALIOHJELMIEN LUOMINEN

12 TILAPÄISEN BASAALIN ASETTAMINEN


13 INSULIININANNON KESKEYTTÄMINEN JA JATKAMINEN

14 I:HH-SUHTEEN JA KORJAUSKERTOIMEN MUOKKAAMINEN


PUMPUN VAIHTAMINEN

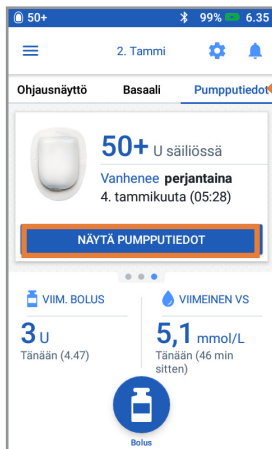


- + Napauta aloitusnäytön kohtaa Pumputiedot
+ Valitse NÄYTÄ PUMPPUTIEDOT

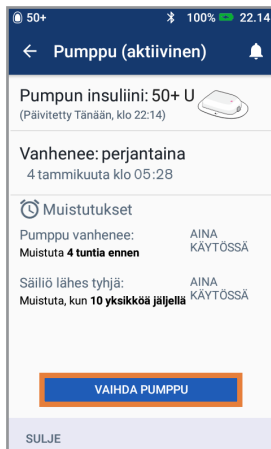


- + Valitse VAIHDA PUMPPU
+ Noudata näytössä näkyviä ohjeita tarkasti
+ Pumppu deaktivoituu

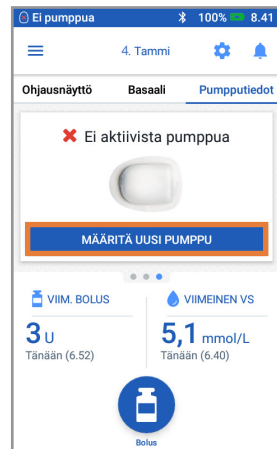

- + Valitse MÄÄRITÄ UUSI PUMPPU

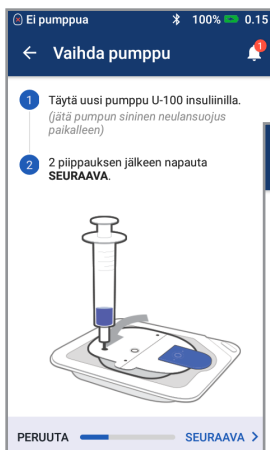

- + Noudata näytössä näkyviä ohjeita tarkasti

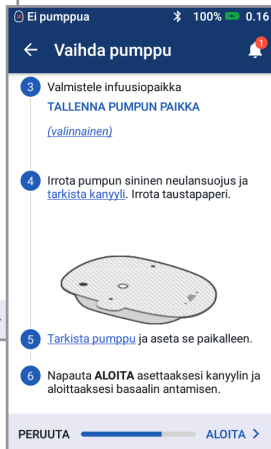

Muista!


- Pidä pumppu muovisella alustallaan täytön ja liittämisen aikana
- Aseta pumppu ja Omnipod DASH PDM valmistelun ajaksi vierekkäin niin, että ne koskettavat toisiaan

Katso tarkemmat ohjeet Omnipod DASH Insulin Management System -järjestelmän käyttöoppaasta

INSULIINI- JA VS-HISTORIAN TARKASTELEMINEN



1. + Napauta aloitusnäytön valikkokuvaketta

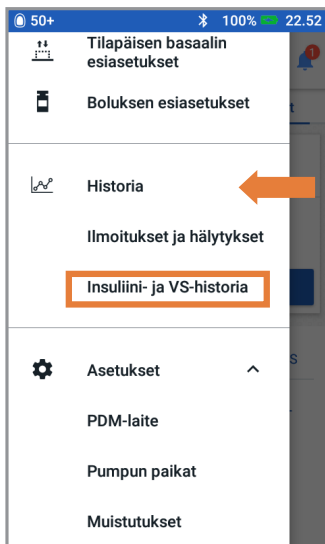

2. + Avaa luettelo valitsemalla Historia
+ Valitse Insuliini- ja VS-historia

Tiesitkö?

- Bolusmerkinnän kuvake osoittaa, oliko boluslaskuri käytössä



Boluslaskuri oli käytössä




Boluslaskuri oli sammutettu/poistettu käytöstä

- Katso tarkemmat bolustiedot napauttamalla riviä, jossa on bolusmerkintä


- Katso, laskettiinko bolus laskurilla vai manuaalisesti

- Valitse NÄYTÄ BOLUSLASKELMAT tarkistaaksesi, tehtiinkö manuaalisia muutoksia

INSULIINI- JA VS-HISTORIAN TARKASTELEMINEN (JATKUU)

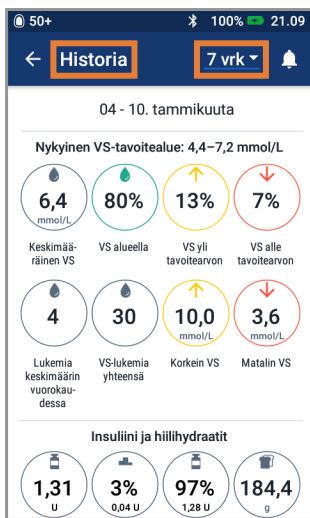

3. + Tarkastele yhden tai usean päivän tietoja napauttamalla avausnuolta

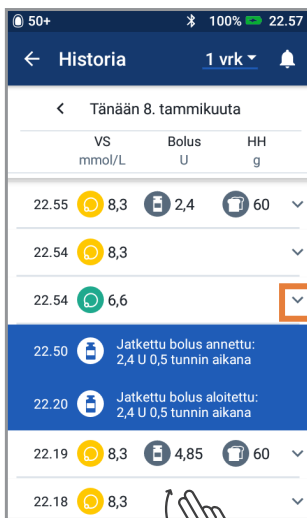

4. + Jatka pyyhkäisemällä ylös ja katso tiedot
+ Voit tuoda lisää tietoja näkyviin napauttamalla nuolta


Historia hyppysissäsi!

- VS-tiedot:
 - Keskimääräinen VS
 - VS alueella
 - VS alueen ylä- ja alapuolella
 - Lukemia keskimäärin vuorokaudessa
 - VS-lukemia yhteensä (yhtenä päivänä tai tietyllä ajanjaksolla)
 - Korkein ja matalin VS
- Insuliinitiedot valitulla ajanjaksolla:
 - Insuliinia yhteensä
 - Basaali-insuliini
 - Bolusinsuliini
 - Hiilihydraatteja yhteensä
- Omnipod DASH PDM -laitteen tai pumpun tapahtumat:
 - Jatettu bolus
 - Basaali ohjelman aktivointi/ uudelleenaktivointi
 - Tilapäisen basaalin aloitus/lopetus/ peruutus
 - Pumpun aktivointi ja deaktivointi


BOLUKSEN ANTAMINEN



1. + Napauta aloitusnäytön boluspainiketta

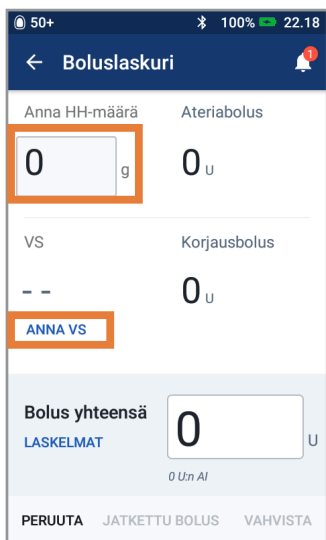

2. + Anna hiilihydraattien määrä grammoina (jos syöt)
+ Napauta kohtaa ANNA VS

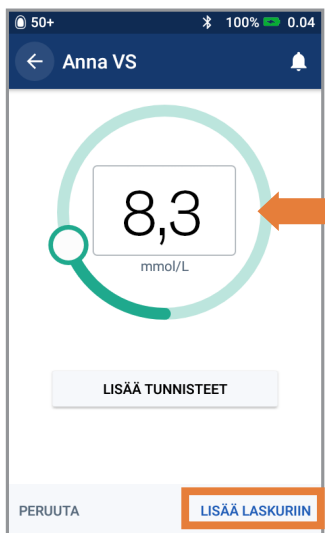

3. + Kirjoita VS manuaalisesti
+ Napauta kohtaa LISÄÄ LASKURIIN

BOLUKSEN ANTAMINEN (JATKUU)

50+ 100% 22.18

Boluslaskuri

HH-määrä yhteensä Ateriabolus

60 g 4 U

VS (22:18) Korjausbolus

8,3 mmol/L 0,85 U

ANNA VS

Bolus yhteensä 4,85 U

LASKELMAT

Korjattu 0 Un A:lle

PERUUTA JATKETTU BOLUS VAHVISTA

4. + Kun olet tarkistanut antamasi arvot, napauta kohtaa VAHVISTA

50+ 100% 22.55

Vahvista bolus

HH 60 g

VS (22:54) 8,3 mmol/L

Bolus yhteensä 3,2 U

LASKELMAT Korjattu 4,50 Un A:lle

ALOITA

LUO VS-MUISTUTUS

PERUUTA

5. + Aloita boluksen anto napauttamalla ALOITA-painiketta

Muistutus

Kun välitöntä bolusta annetaan, aloitusnäytössä näkyy boluksen edistymispalkki ja tiedot. Omnipod DASH PDM -laitetta ei voi käyttää välittömän boluksen aikana.

50+ 100% 13.37

Annetaan bolusta

Annettu n. 0,50 yks. 2 yksiköstä (25%)

PERUUTA


VIIMEINEN VS

3,75 U

6,0 mmol/L

Tänään (5 min sitten)


BASAALIOHJELMAN MUOKKAAMINEN

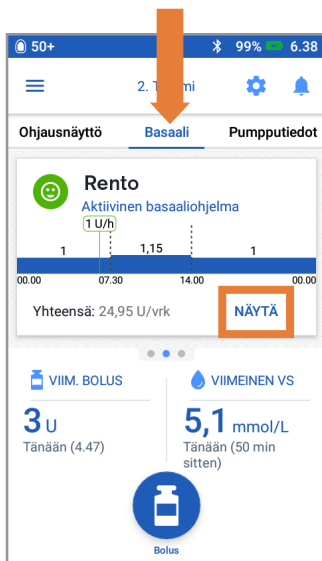


- + Valitse aloitusnäytössä Basaali
+ Napauta kohtaa NÄYTÄ



- + Napauta muutettavan basaali ohjelman kohdalta MUOKKAA-painiketta

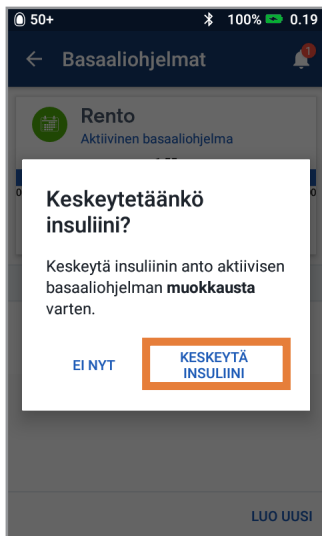

- + Jos vaihdat aktiivista basaali ohjelmaa, napauta kohtaa KESKEYTÄ INSULIINI

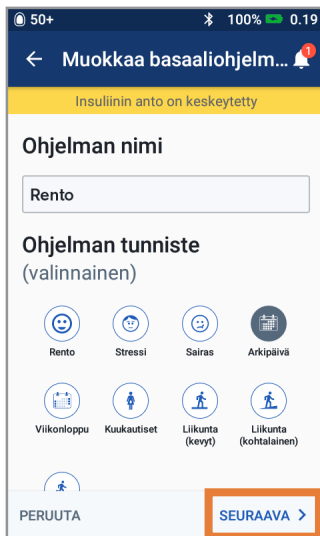


- + Voit muokata ohjelman nimeä tai tunnustetta napauttamalla tai siirtä muokkaamaan basaalin aikasegmenttejä ja tasoja napauttamalla kohtaa SEURAAVA


BASAALIOHJELMAN MUOKKAAMINEN (JATKUU)




5. + Napauta muokattavaa segmenttiä

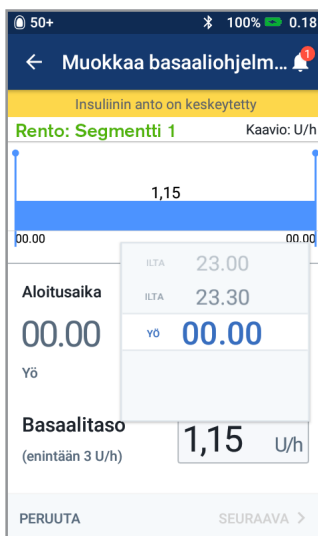

6. + Muokkaa aikoja ja basaalitasoja 24 tunnin jaksolle

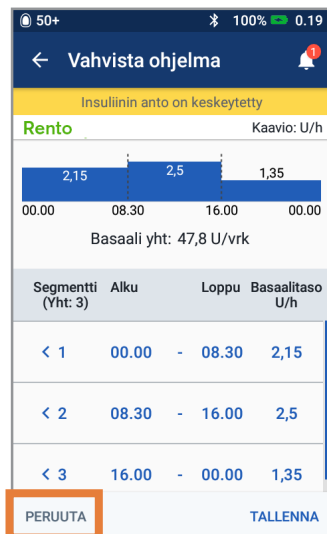


7. + Kun olet valmis, napauta kohtaa TALLENNA

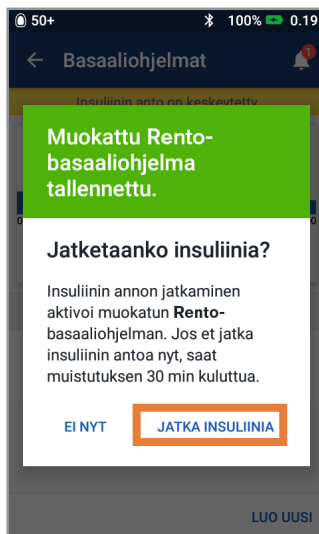

8. + Valitse JATKA INSULIINIA


UUSIEN BASAALIOHJELMIEN LUOMINEN

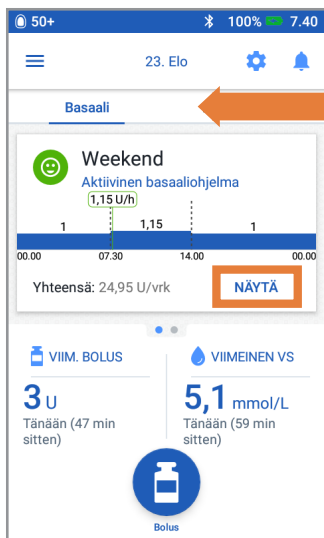

- + Valitse aloitusnäytössä Basaali
+ Napauta kohtaa NÄYTÄ

- + Napauta kohtaa LUO UUSI

The screenshot shows the 'Luo basaaliohjelma' screen. The 'Ohjelman nimi' field contains 'arkipäivä'. The 'Ohjelman tunnist' field is empty. A keyboard is visible at the bottom.

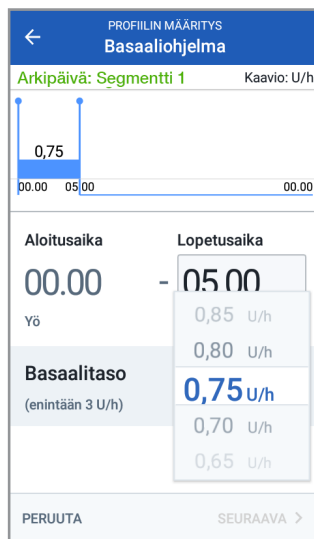


- + Nimeä ohjelma uudelleen tai pidä oletusnimi. Esimerkiksi "Arkipäivä"
+ Valitse ohjelman tunnist napauttamalla
+ Napauta kohtaa SEURAAVA

- + Muokkaa lopetus aikaa ja basaalitasoa
+ Napauta kohtaa SEURAAVA
+ Lisää segmentit samalla tavalla koko 24 tunnin ajalle
+ Jatka valitsemalla SEURAAVA

UUSIEN BASAALIOHJELMIEN LUOMINEN


(JATKUU)

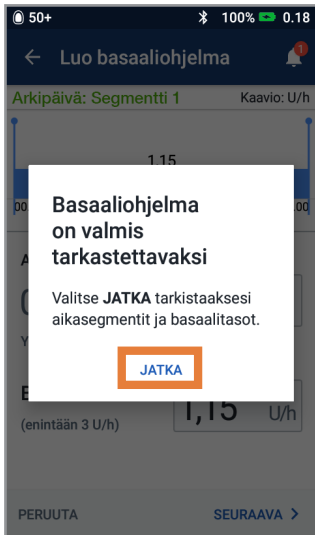


5. + Siirry tarkistamaan aikasegmentit ja basaalitaset valitsemalla JATKA



6. + Tarkista uusi basaali ohjelma
+ Jos se on oikein, valitse TALLENNA

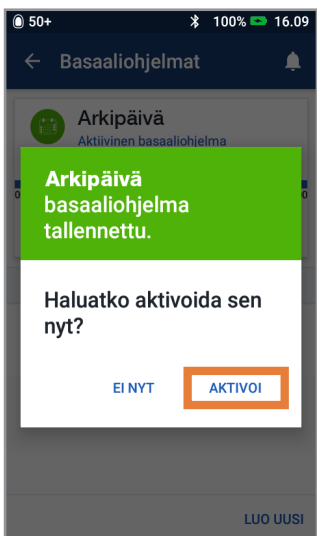

7. + Valitse, aktivoitko uuden basaali ohjelman heti vai myöhemmin

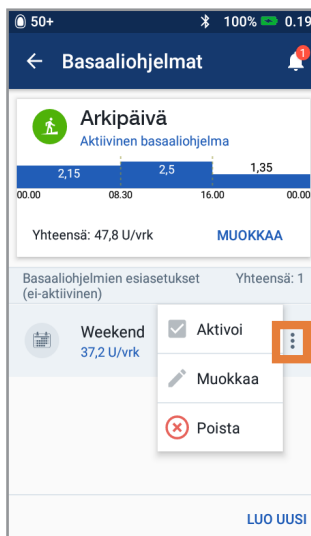


8. + Napauta Basaali ohjelmat-sivun Valinnat-kuvaketta, jos haluat aktivoida, muokata tai poistaa eri ohjelmia

TILAPÄISEN BASAALIN ASETTAMINEN




1. + Napauta aloitusnäytön valikkokuvaketta

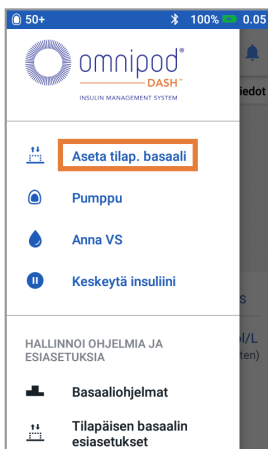

2. + Valitse Aseta tilap. basaali




3. + Napauta Basaalitaso-kenttää ja valitse prosentuaalinen muutos
 + Napauta Kesto-kenttää ja valitse kesto
 + Tai napauta VALITSE ESIASETUKSISTA -painiketta (jos olet tallentanut esiasetuksia)

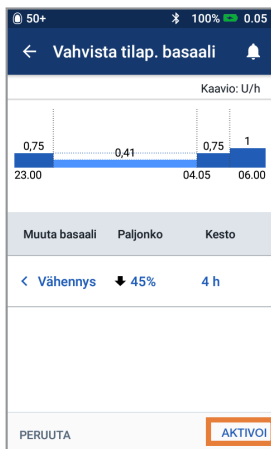

4. + Kun olet tarkistanut antamasi arvot, napauta kohtaa AKTIVOI

Tiesitkö?


- Kohta Tilap. basaali on korostettu vihreällä, jos käynnissä on aktiivinen tilapäinen basaalitaso
- Voit peruuttaa tilapäisen basaalin koska vain painamalla PERUUTA

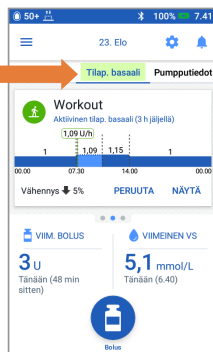


INSULIININANNON KESKEYTTÄMINEN JA JATKAMINEN




1. + Napauta aloitusnäytön valikkokuvaketta

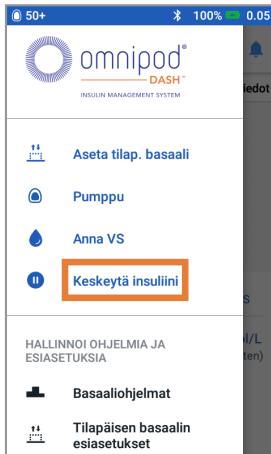


2. + Napauta Keskeytä insuliini -painiketta

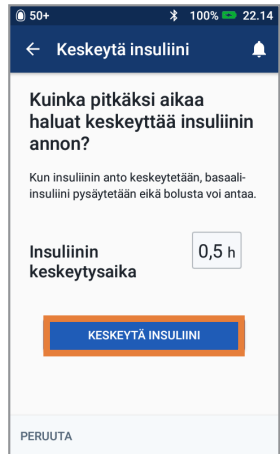

3. + Valitse haluamasi insuliinin keskeytyksen kesto vierittämällä
+ Napauta KESKEYTÄ INSULIINI -painiketta
+ Valitse Kyllä vahvistaaksesi, että haluat lopettaa insuliininannon

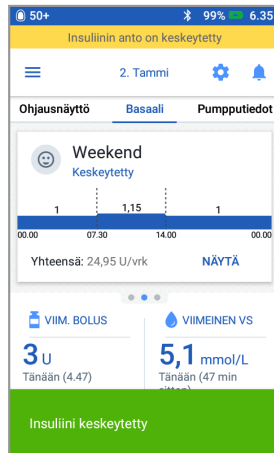

4. + Aloitusnäytössä on keltainen banneri, joka kertoo insuliinin keskeytyksestä

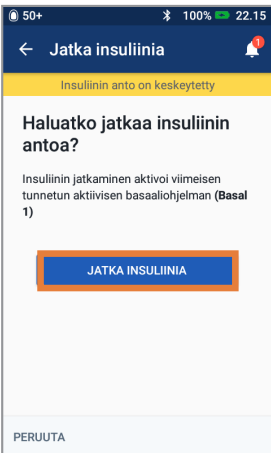

5. + Aloita insuliinin antaminen napauttamalla JATKA INSULIINIA -painiketta


Muistutus

- Sinun **TÄYTYY** jatkaa insuliininantoa. Insuliininanto ei jatku automaattisesti keskeytysajan kuluttua
- Pumppu antaa äänimerkin 15 minuutin välein koko keskeytysjakson ajan muistutukseksi siitä, että insuliinia ei anneta
- Tilapäiset basaalitasosi tai jatkettut boluksesi perutaan, kun insuliininanto keskeytetään
- Keskeytyksen kestoksi voi ohjelmoida 0,5–2 tuntia
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa missä tapauksissa on tarkoituksenmukaista keskeyttää insuliininanto.


I:HH-SUITEEN JA KORJAUSKERTOIMEN MUOKKAAMINEN





1. + Napauta aloitusnäytön valikkokuvaketta

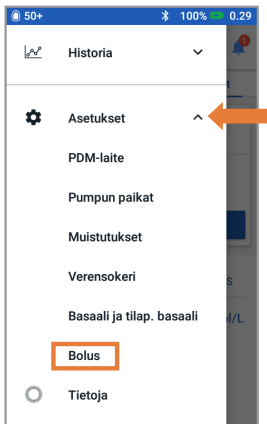


2. + Avaa luettelo valitsemalla Asetukset
+ Napauta kohtaa Bolus

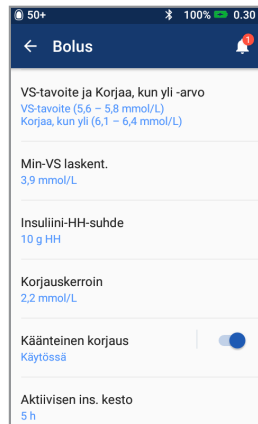

3. + Napauta kohtaa Insuliini-HH-suhde tai Korjauskerron

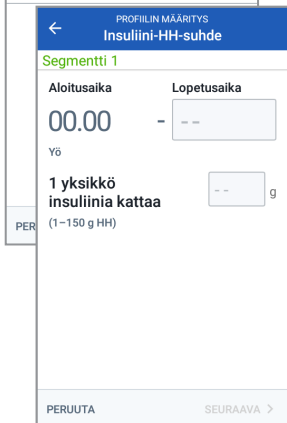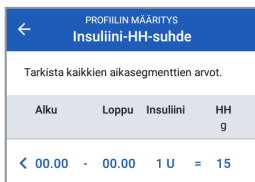

Insuliinin ja hiilihydraattien suhde

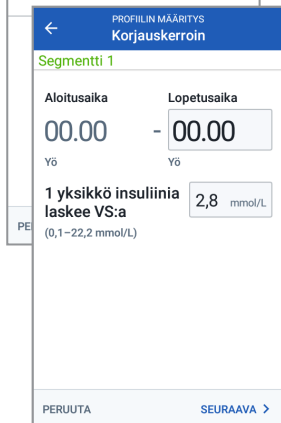

Korjauskerron

Tiesitkö?

- Yllä olevia vaiheita seuraamalla voit säätää VS-tavoitetta ja Korjaa, kun yli-arvoa
- Voit säätää Min-VS laskent., Käänteinen korjaus- ja Aktiivisen ins. kesto -asetuksia kohdassa Asetukset > Bolus
- I:HH-suhteen ohjelmointiväli on 0,1 g hiilihydraatteja / U
- I:HH-suhteesi merkitsee montako grammaa hiilihydraatteja yksi yksikkö insuliinia kattaa
- Korjauskertoimesi merkitsee paljonko yksi yksikkö insuliinia laskee verensokeriasi.


4. + Napauta segmenttiä, jota haluat muokata. Muokkaa aikasegmenttiä ja/tai määrää
+ Lisää tarvittaessa segmenttejä valitsemalla SEURAAVA
+ Napauta kohtaa TALLENNA



PDM:n näyttökuvat ovat vain havainnollistavia, eikä niitä pidä pitää ehdotuksina käyttäjän asetuksille.

Tärkeitä turvallisuustietoja: Omnipod DASH® Insulin Management System on tarkoitettu subkutaaniseen insuliinin antoon määritetyillä ja muuttuvilla nopeuksilla diabeteksen hoidossa insuliinia tarvitseville henkilöille. Omnipod DASH™ Insulin Management System on suunniteltu käytettäväksi nopeavaikutteisen U-100-insuliinin kanssa. Katso Omnipod DASH™ Insulin Management System -järjestelmän käyttöoppaasta, mitkä U-100-insuliinianalogien kanssa pumpputtu on testattu turvallisesti käyttää, samoin kuin täydelliset turvallisuustiedot, mukaan lukien käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja ohjeet.

Omnipod DASH® Insulin Management System Käyttöopas on saatavilla osoitteessa www.diabetesinfucare.com tai ottamalla yhteyttä Nordic Infucareen numeroon 0207 348 760.

Pohjoismainen Infucaren jakelija © 2023 Insulet Corporation . Valmistaja Omnipod, Omnipod-logo, DASH ja DASH-logo ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja useilla muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521AZ Utrecht, Alankomaat

OMNI.FI.004-02-APR2023



Tekniikantie 14 02150 Espoo
www.infucare.fi 0207 348 760
Jakelija