

VELKOMMEN TIL OMNIPOD DASH™-SYSTEMET



HURTIGREFERANSE

INNHOOLD



3 SLIK BYTTER DU POD

4 SLIK VISER DU HISTORIKK FOR INSULIN OG BS

6 SLIK TILFØRER DU EN BOLUS

8 SLIK REDIGERER DU ET BASALPROGRAM

10 SLIK OPPRETTER DU FLERE BASALPROGRAMMER

12 SLIK ANGIR DU EN MIDLERTIDIG BASAL

13 SLIK STOPPER OG GJENOPPTAR DU INSULINTILFØRSEL

14 SLIK REDIGERER DU IKH-FORHOLD OG KORREKSJONSFAKTOR


SLIK BYTTER DU POD




- + Trykk på "Podinfo" på startskjermen
+ Trykk på "VIS PODDETALJER"




- + Trykk på "BYTT POD"
+ Følg anvisningene på skjermen nøye
+ Pod vil bli deaktivert

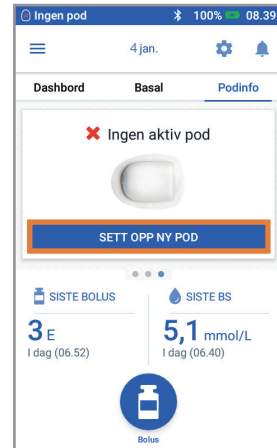

- + Trykk på "SETT OPP NY POD"

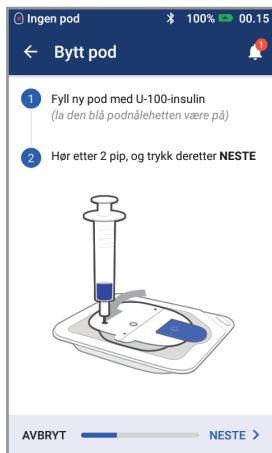

- + Følg anvisningene på skjermen nøye

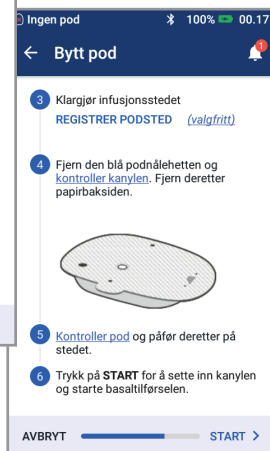

Ikke glem!


- La poden ligge i plastbrettet under fylling og priming
- Plasser poden og Omnipod DASH PDM ved siden av hverandre, slik at de berører hverandre under priming

Se brukerhåndboken for Omnipod DASH Insulin Management System for mer detaljerte instruksjoner.

SLIK VISER DU HISTORIKK FOR INSULIN OG BS



1. + Trykk på menyikonet på startskjermen

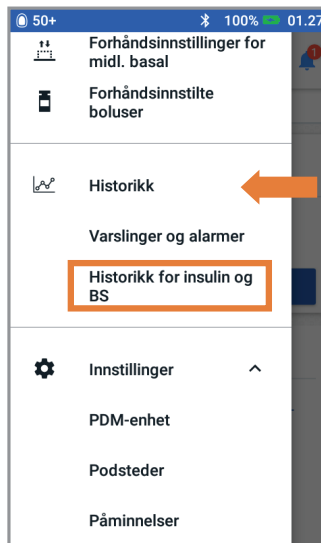


2. + Trykk på "Historikk" for å utvide listen
+ Trykk på "Historikk for insulin og BS"

SLIK VISER DU HISTORIKK FOR INSULIN OG BS


Visste du?

- Ikonet som vises med en bolusoppføring, angir om boluskalkulatoren ble brukt
 - 🔒 Boluskalkulator var aktivert
 - 🔓 Boluskalkulator var deaktivert/av
- Trykk på en rad med en bolusoppføring for å vise flere bolusdetaljer
 - Vis om boluskalkulatoren ble brukt eller om det var en manuell bolus
 - Trykk på "VIS BOLUSBEREGNINGER" for å vise om det ble utført en manuell justering

SLIK VISER DU HISTORIKK FOR INSULIN OG BS (FORTS.)

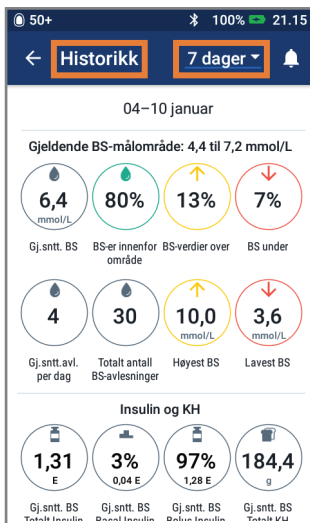

3. + Trykk på rullegardinpilen for dag for å vise 1 dag eller flere dager

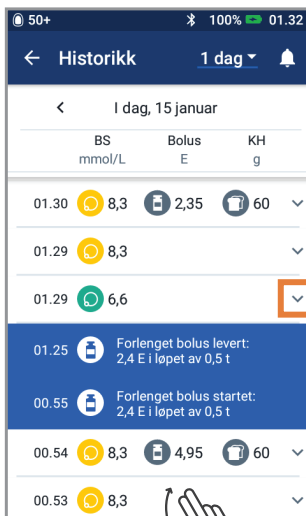


4. + Fortsett med å sveipe opp for å se detaljdelen
+ Trykk på pil ned for å vise flere detaljer


Historikk lett tilgjengelig!

- BS-info:
 - Gj.snitt BS
 - BS innenfor område
 - BS over og under område
 - Gj.snitt målinger per dag
 - BS totalt (denne dagen eller dette datoområdet)
 - Høyest og lavest BS
- Insulininfo (gjennomsnitt for flere dager eller informasjon for en dag):
 - Totalt insulin
 - Basalinsulin
 - Bolusinsulin
 - Total IKH-verdi
- Omnipod DASH PDM- eller podhendelser:
 - Utvidet bolus
 - Aktivering/reaktivert av et basalprogram
 - Start/avslutt/avbryt en midlertidig basal
 - Aktivert og deaktivert av pod


SLIK TILFØRER DU EN BOLUS

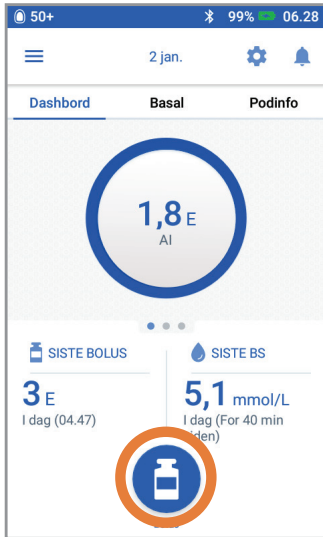

1. + Trykk på Bolus-knappen på startskjermen

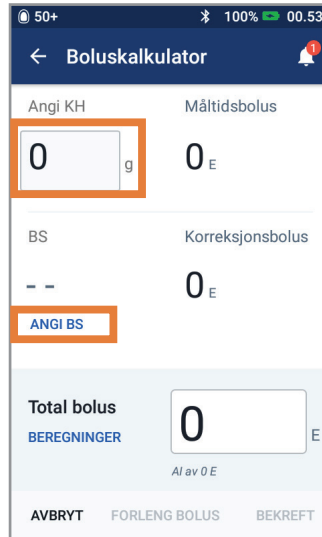

2. + Legg inn gram karbohydrater (hvis du spiser)
+ Trykk på "ANGI BS"

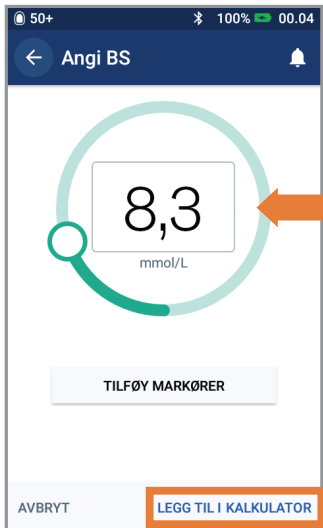

3. + Angi BS manuelt
+ Trykk på "LEGG TIL I KALKULATOR"

SLIK TILFØRER DU EN BOLUS (FORTS.)

Boluskalkulator

Total KH-verdi: 60 g

Måltidsbolus: 4 E

BS (00:53): 8,3 mmol/L

Korreksjonsbolus: 0,95 E

Total bolus: 4,95 E

Justert for AI på 0 E

AVBRYT FORLENG BOLUS **BEKREFT**

4. + Trykk på "BEKREFT" når du har gjennomgått de angitte verdiene

Bekreft bolus

KH: 60 g

BS (01:29): 8,3 mmol/L

Total bolus: 3,15 E

Justert for AI på 4,55 E

START

OPPRETT BS-PÅMINNELSE

AVBRYT

5. + Trykk på "START" for å starte bolustilførsel

Påminnelse

Startskjermen viser en fremdriftslinje og detaljer mens du tilfører en umiddelbar bolus. Du kan ikke bruke Omnipod DASH PDM under en umiddelbar bolus.

Tilfører bolus

Ca: 0,55 E av 2 E tilført (27%)


AVBRYT

SISTE BS


6,0 mmol/L
i dag (Nå)

6,45 E
AI

SLIK REDIGERER DU ET BASALPROGRAM

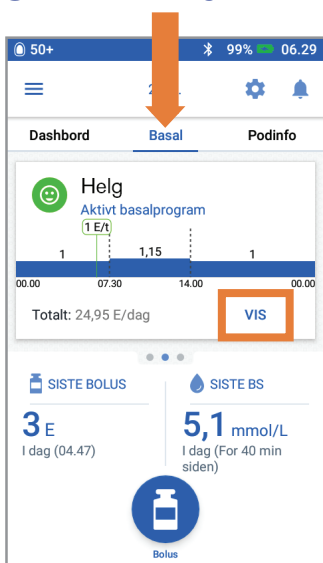


1. + Trykk på "Basal" på startskjermen
+ Trykk på "VIS"

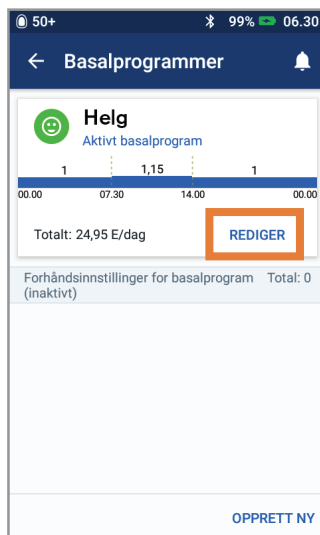

2. + Trykk på "REDIGER" i basalprogrammet for å endre




3. + Trykk på "STOPP INSULIN" hvis du endrer det aktive basalprogrammet

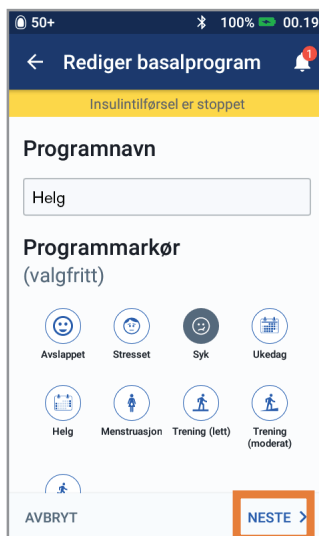


4. + Trykk for å redigere programnavn og etikett, eller trykk på "NESTE" for å redigere basale tidssegmenter og doser


SLIK REDIGERER DU ET BASALPROGRAM (FORTS.)

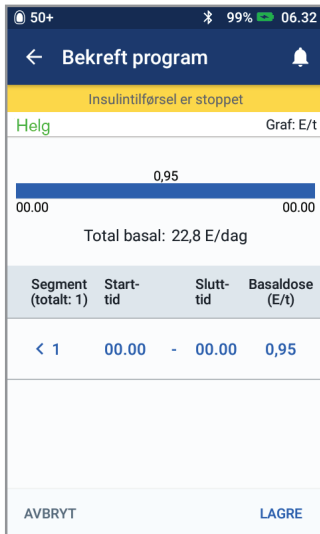

5. + Trykk på segmentet for å redigere

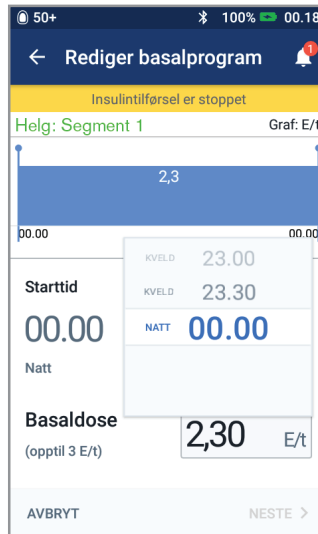

6. + Rediger tid og basaldoser for 24-timers-perioden

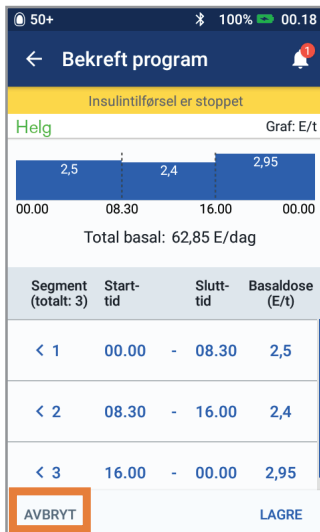


7. + Trykk på "LAGRE" når du er ferdig




8. + Trykk på "GJENOPPTA INSULIN"


SLIK OPPRETTER DU FLERE BASALPROGRAMMER

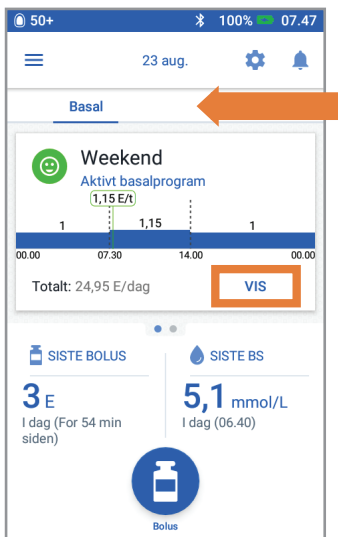

1. + Trykk på "Basal" på startskjermen
+ Trykk på "VIS"

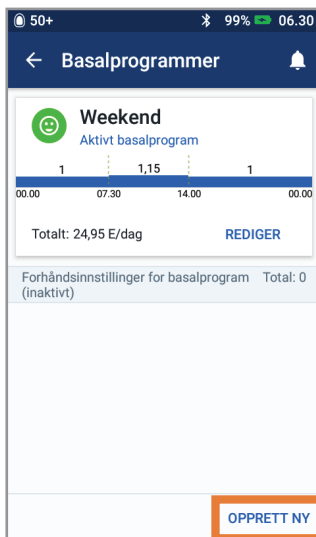

2. + Trykk på "OPPRETT NY"

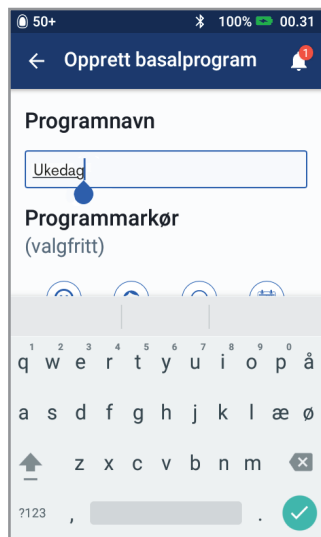

3. + Gi programmet et nytt navn eller behold standardnavnet. Eksempel "Ukedag"
+ Trykk for å velge en programetikett
+ Trykk på "NESTE"




4. + Rediger sluttid og basaldose
+ Trykk på "NESTE"
+ Fortsett for å legge til segmenter for alle 24 timene
+ Trykk på "NESTE" for å fortsette

SLIK OPPRETTER DU FLERE BASALPROGRAMMER

(FORTS.)




5. + Trykk på "FORTSETT" for å gjennomgå tidssegmentene og basaldosene

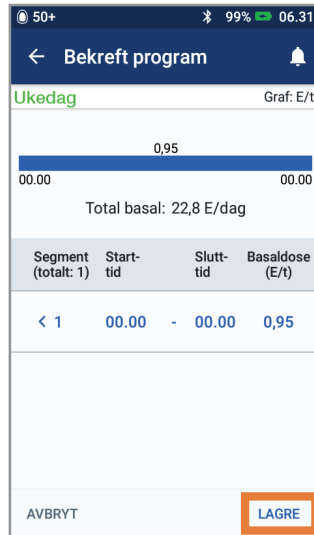

6. + Gjennomgå det nye basalprogrammet
+ Trykk på "LAGRE" hvis det er riktig




7. + Velg om du vil aktivere det nye basalprogrammet nå eller senere

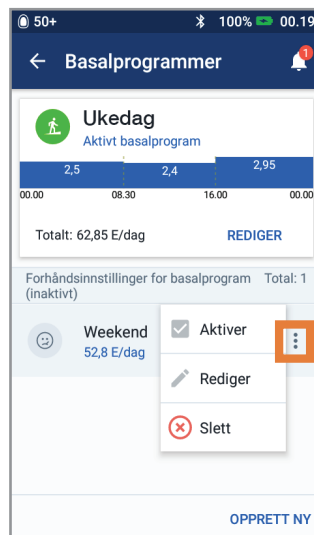


8. + Trykk på Alternativer-ikonet i Basalprogrammer for å aktivere, redigere eller slette de ulike programmene


SLIK ANGIR DU EN MIDLERTIDIG BASAL

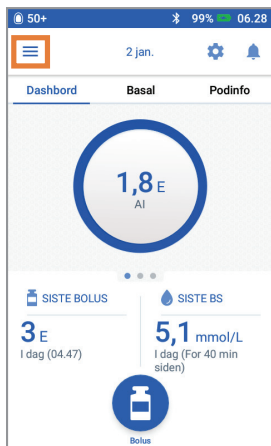


1. + Trykk på menyikonet på startskjermen

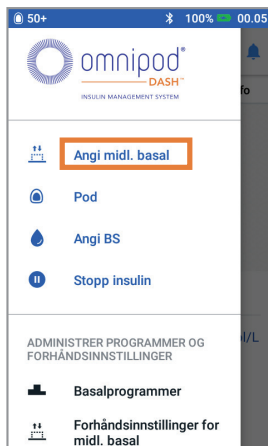

2. + Trykk på "Angi midl. basal"

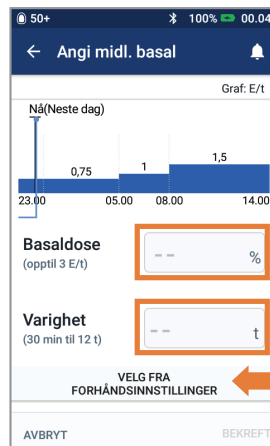


3. + Trykk på oppføringsboksen Basaldose og velg % endring
 + Trykk på oppføringsboksen Varighet og velg tidsvarighet
 + Eller trykk på "VELG FRA FORHÅNDSINNSTILLINGER" (hvis du har lagret forhåndsinnstillinger)

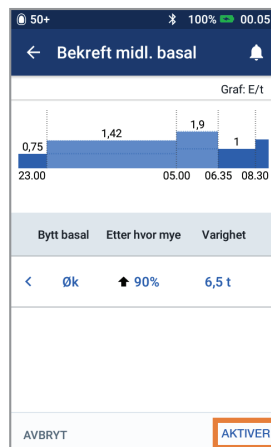


4. + Trykk på "AKTIVER" når du har gjennomgått de angitte verdiene

Visste du?

- Midl. basal er markert med grønt hvis det pågår en aktiv midlertidig basaldose
- Du kan avbryte en midlertidig basal når som helst ved å trykke på Avbryt

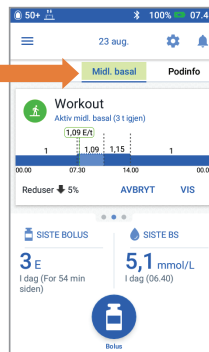


STOPPE OG GJENOPPTA INSULINTILFØRSEL

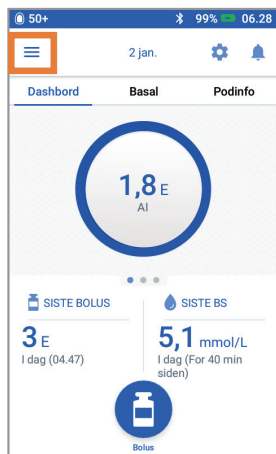


1. + Trykk på menyikonet på startskjermen




2. + Trykk på "Stopp insulin"

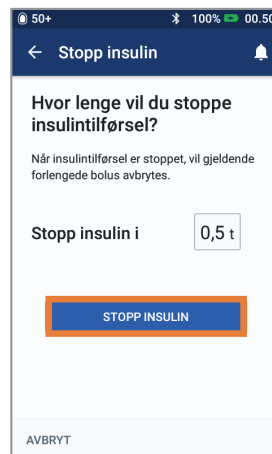

3. + Bla til ønsket varighet av insulinstopp
 + Trykk på "STOPP INSULIN"
 + Trykk på "Ja" for å bekrefte at du vil stoppe insulintilførsel

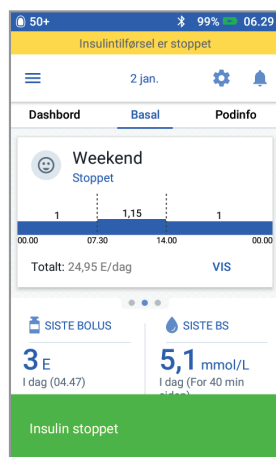

4. + Startskjermen viser et gult banner som angir at insulin er stoppet

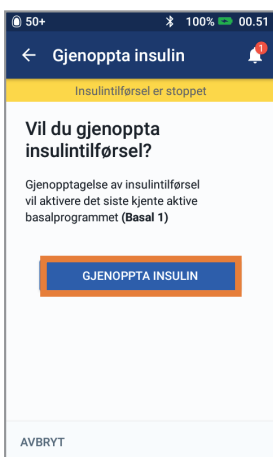

5. + Trykk på "GJENOPPTA INSULIN" for å starte insulintilførsel


Påminnelse

- Du **MÅ** gjenoppta insulin. Insulin gjenopptas ikke automatisk ved utløp av stopperioden
- Poden piper hvert 15. minutt gjennom hele stopperioden for å minne deg på at det ikke tilføres insulin
- De midlertidige basaldosene eller de utvidede bolusene avbrytes når insulintilførselen stoppes
- Stopp kan programmeres for 0,5 time til 2 timer
- Snakk med helsepersonellet ditt angående når det er hensiktsmessig å stoppe insulintilførselen

SLIK REDIGERER DU INSULIN-TIL-KH-FORHOLD OG KORREKSJONSFAKTOR




1. + Trykk på menyikonet på startskjermen

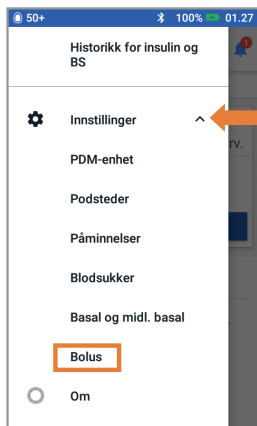



2. + Trykk på "Innstillinger" for å utvide listen
+ Trykk på "Bolus"



3. + Trykk på "Insulin-til-KH-forhold" eller "Korreksjonsfaktor"

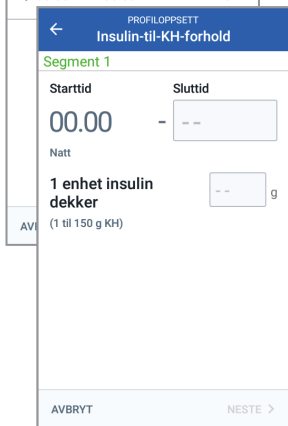

Insulin-til-KH-forhold

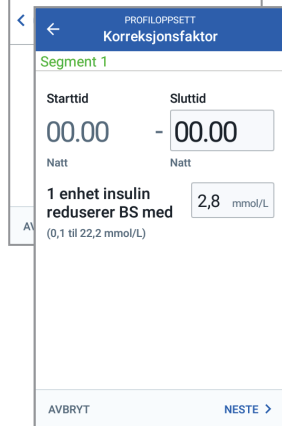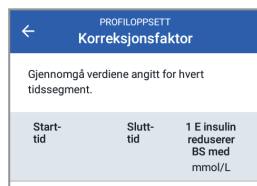

Korreksjonsfaktor

4. + Trykk på segmentet du vil redigere. Rediger tidssegment og/eller beløp
+ Trykk på "NESTE" for å legge til flere segmenter ved behov
+ Trykk på "LAGRE"

Visste du?

- Følg trinnene ovenfor for å justere verdier for BS-mål og Korrigjer over
- Juster Min. BS for beregn., Reversert korreksjon og Varighet av insulinaktivitet ved å navigere til Innstillinger> Bolus
- IKH-forhold kan programmeres i trinn på 0,1 g KH/E
- IKH-forholdet ditt angir hvor mange gram karbohydrater én enhet insulin dekker
- Korreksjonsfaktoren din angir hvor mye én enhet insulin senker blodsukkeret ditt

MERKNADER


MERKNADER



Personal Diabetes Manager-bilder er kun for illustrasjonsformål og skal ikke anses som forslag til brukerinnstillinger.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Omnipod DASH™-insulinadministrasjonssystemet er beregnet på subkutan tilførsel av insulin med angitte og variable hastigheter for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Omnipod DASH Insulin Management System er utformet for anvendelse med hurtigvirkende U-100-insulin. Se brukerhåndboken Omnipod DASH Insulin Management System for hvilke U-100-insulinanaloger som har blitt testet og vist seg å være sikre for anvendelse i poden, samt fullstendig sikkerhetsinformasjon inklusive indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner.

Brugerhåndboken til Omnipod DASH™ Insulin Management System er tilgjengelig online på www.diabetesinfucare.com eller ved å ringe Omnipod kundeserviceteam (24 timer/7 dager) på +47 22 20 60 00. Denne hurtigreferansen er for Personal Diabetes Manager modell PDM-INT2-D001-MM. Modellnummeret til Personal Diabetes Manager er skrevet på bakdekselet av hver Personal Diabetes Manager.

©2020 Insulet Corporation . Omnipod, Omnipod-logoen, DASH og DASH-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Insulet Corporation i USA og andre forskjellige jurisdiksjoner. Med enerett. 1 King St, Hammersmith London W6 9HR. OMNI.NO.003-03-OKT2022

Les mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.no | facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge | [@makingdiabeteseasier_no](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_no)



NordicInfu Care AB (Distributør)
Blindernveien 5, 0361 Oslo, Norge, +47 22 20 60 00 · www.infucare.com

