

VÄLKOMMEN TILL OMNIPOD DASH[™] INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



SNABBGUIDE

INNEHÅLL



3 BYTA EN POD

4 VISA INSULIN- OCH BG-HISTORIK

6 TILLFÖRA EN BOLUS

8 REDIGERA ETT BASALPROGRAM


10 SKAPA YTTRELIGARE BASALPROGRAM

12 STÄLLA IN EN TEMP BASAL


13 PAUSA OCH ÅTERUPPTA INSULINTILLFÖRSEL

14 REDIGERA IK-KVOT OCH KORRIGERINGSFAKTOR


BYTA EN POD

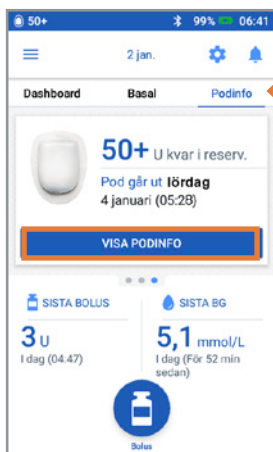

- + Tryck på Podinfo på Hem-skärmen
+ Tryck på VISA PODINFO

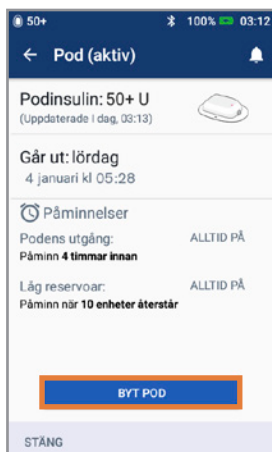

- + Tryck på BYT POD
+ Följ anvisningarna på skärmen nogga
+ Poden inaktiveras

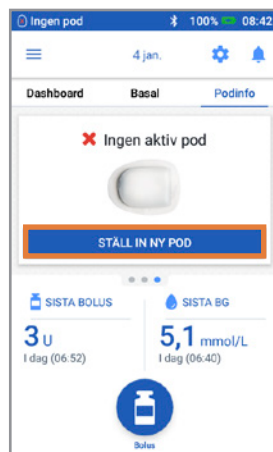

- + Tryck på STÄLL IN NY POD



- + Följ anvisningarna på skärmen nogga




Glöm inte!


- Låt poden ligga still i plaststråget under påfyllning och primning
- Placera poden och Omnipod DASH PDM:en sida vid sida så att de nuddar varandra under primningen

Utförligare instruktioner finns i användarhandboken till Omnipod DASH Insulin Management System

VISA INSULIN- OCH BG-HISTORIK

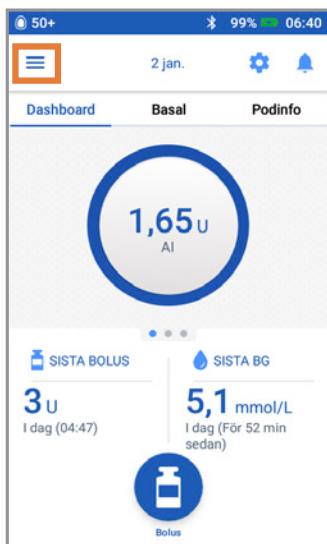

1. + Tryck på menyikonen på Hem-skärmen

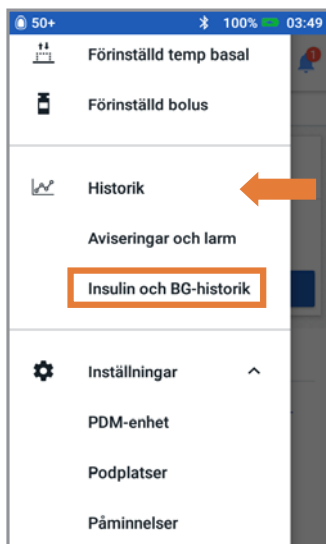


2. + Tryck på Historik för att expandera listan
+ Tryck på Insulin- och BG-historik


Visste du?

- Ikonen som visas med en boluspost indikerar om bolusberäknaren användes
 - 📄 Bolusberäknaren var aktiverad
 - 🔒 Bolusberäknaren var inaktiverad/avstängd
- Tryck på en rad med en boluspost för att se ytterligare bolusinformation
 - Se om bolusberäknaren användes eller om det var en manuell bolus
 - Tryck på VISA BOLUSBERÄKNINGAR för att visa om en manuell justering gjordes

VISA INSULIN- OCH BG-HISTORIK (FORTS.)

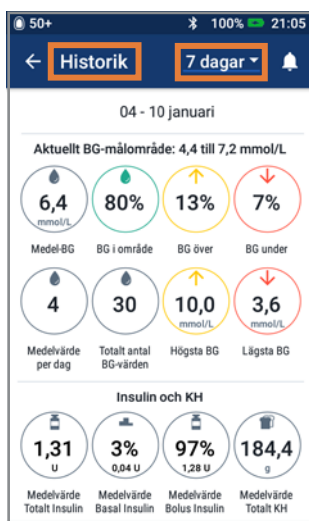

3. + Tryck på rullgardinspilen för att visa en dag eller flera dagar

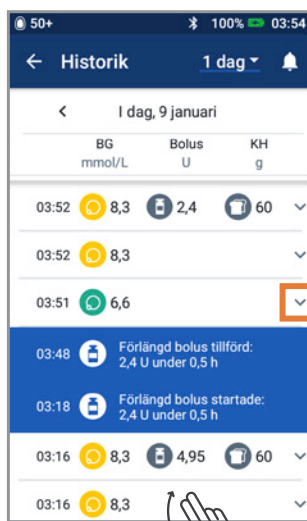


4. + Fortsätt svepa uppåt för att visa informationsavsnittet
+ Tryck på nedåtpilen för att visa mer information

Historik till hands!

- BG-info:
 - Genomsnittlig BG
 - BG inom målnivån
 - BG över och under målnivån
 - Genomsnittliga värden per dag
 - Totala BG (den dagen eller det datumintervallet)
 - Högsta och lägsta BG
- Insulininfo (medelvärden för flera dagar alt. information för en dag):
 - Totalt insulin
 - Basalinsulin
 - Bolusinsulin
 - Kolhydrater totalt
- Omnipod DASH PDM- eller podhändelser:
 - Förlängd bolus
 - Aktivering/återaktivering av ett basalprogram
 - Start/slut/avbrytning av en temp basal
 - Aktivering och inaktivering av pod


TILLFÖRA EN BOLUS

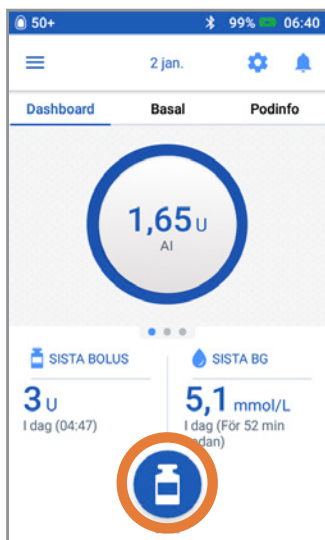

1. + Tryck på Bolusknappen på Hem-skärmen



2. + Ange gram kolhydrater (om du äter)
+ Tryck på ANGE BG

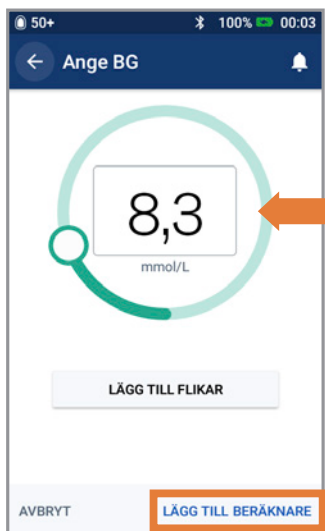

3. + Ange BG manuellt
+ Tryck på LÄGG TILL BERÄKNARE

TILLFÖRA EN BOLUS (FORTS.)

Bolusberäknare

KH totalt: 60 g

Måltidsbolus: 4 U

BG (03:16): 8,3 mmol/L

Korrigeringsbolus: 0,95 U

Total bolus BERÄKNINGAR: 4,95 U

AVBRYT FÖRLÄNG BOLUS **BEKRÄFTA**

4. + Tryck på **BEKRÄFTA** när du har granskat dina angivna värden

Bekräfta bolus

KH: 60 g

BG (03:52): 8,3 mmol/L

Total bolus BERÄKNINGAR: 3,15 U

START

SKAPA BG-PÅMINNELSE

AVBRYT

5. + Tryck på **START** för att påbörja bolustillförseln

Påminnelse

Hem-skärmen visar en förlöppsindikator och information när du tillför en omedelbar (direkt) bolus. Du kan inte använda din Omnipod DASH PDM under en omedelbar (direkt) bolus.

Tillför bolus

Cirka 0,50 U av 2 U har tillförts (25%)

AVBRYT


SISTA BG

6,0 mmol/L


I dag (För 3 min sedan)

8,05 U

REDIGERA ETT BASALPROGRAM

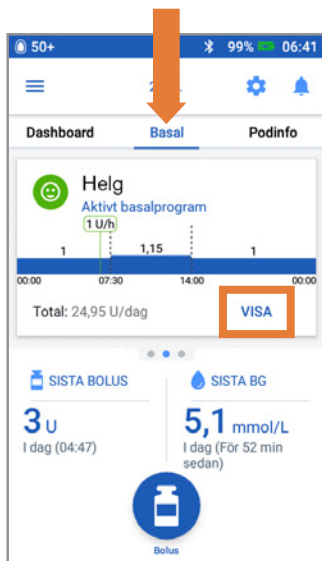


1. + Tryck på Basal på Hem-skärmen
+ Tryck på VISA

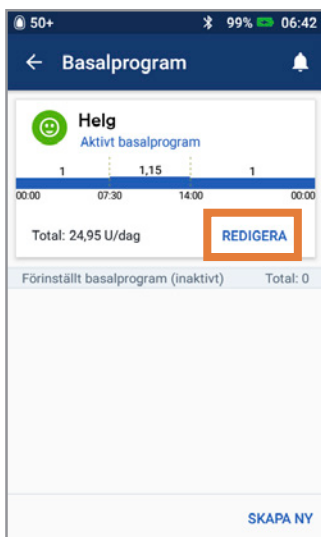

2. + Tryck på REDIGERA i basalprogrammet för att ändra




3. + Tryck på PAUSA INSULIN om du ändrar det aktiva basalprogrammet

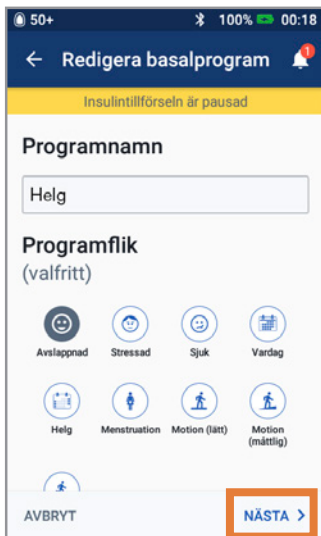


4. + Tryck för att redigera programnamn och tagg, eller tryck på NÄSTA för att redigera basaltidssegment och doser

REDIGERA ETT BASALPROGRAM (FORTS.)

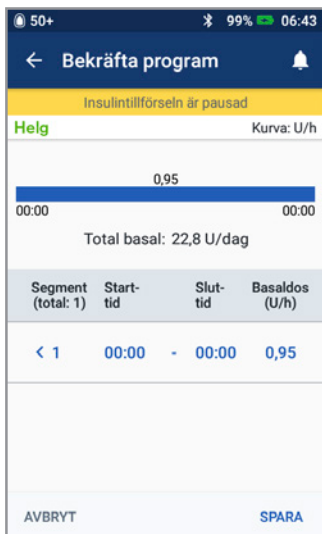

5. + Tryck på segmentet för att redigera

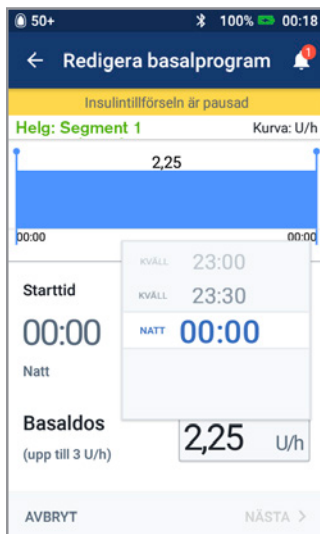

6. + Redigera tid och basaldoser för dygnsperioden





7. + Tryck på SPARA när det är klart




8. + Tryck på ÅTERUPPTA INSULIN

SKAPA YTTERLIGARE BASALPROGRAM

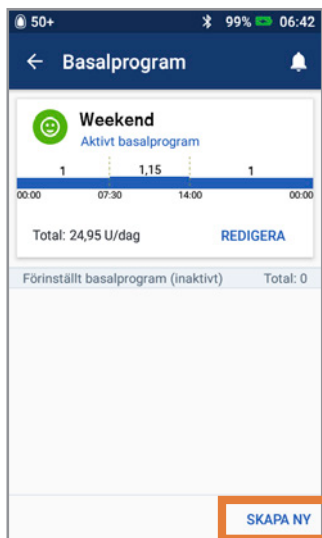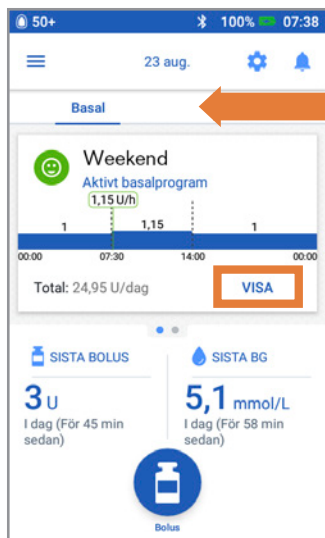

1. + Tryck på Basal på Hem-skärmen
+ Tryck på VISA

2. + Tryck på SKAPA NY

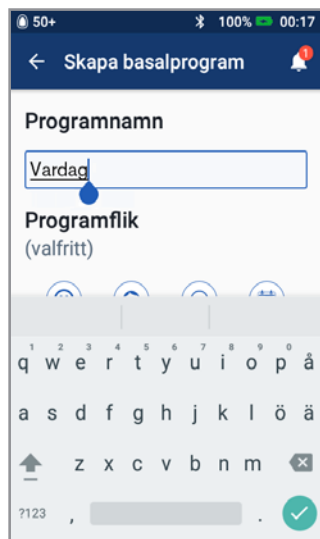


3. + Ändra namn på programmet eller behåll standardnamnet. Exempel Vardag
+ Tryck för att välja en programtagg
+ Tryck på NÄSTA


4. + Redigera Sluttid och Basaldos
+ Tryck på NÄSTA
+ Försätt lägga till segment för hela dygnet
+ Tryck på NÄSTA för att fortsätta

SKAPA YTTERLIGARE BASALPROGRAM

(FORTS.)

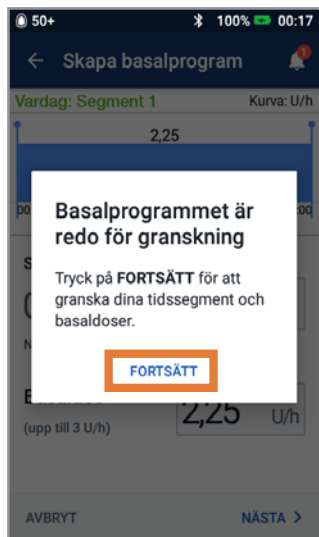


5. + Tryck på FORTSÄTT för att granska tidssegmenten och basaldoserna

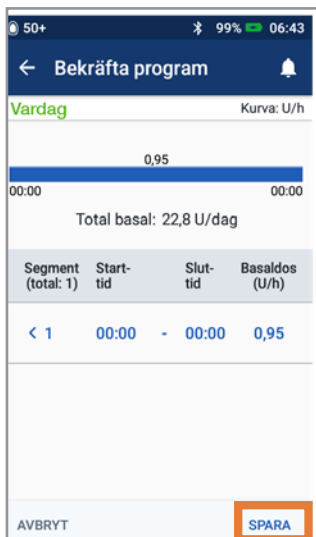

6. + Granska det nya basalprogrammet
+ Tryck på SPARA om det är korrekt




7. + Välj att aktivera det nya basalprogrammet nu eller senare

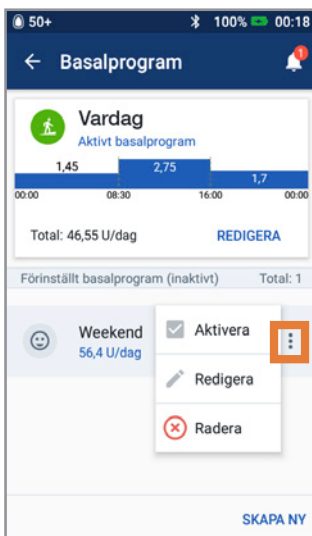


8. + Tryck på alternativikonen i Basalprogram för att aktivera, redigera eller radera de olika programmen


STÄLLA IN EN TEMP BASAL

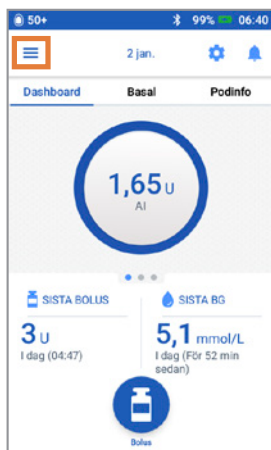

1. + Tryck på menyikonen på Hemskrämnen

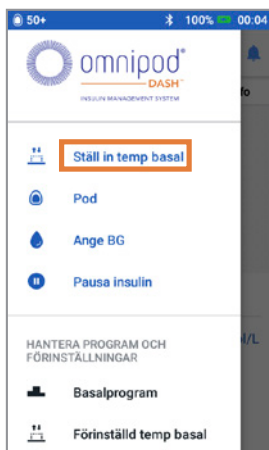

2. + Tryck på Ställ in temp basal

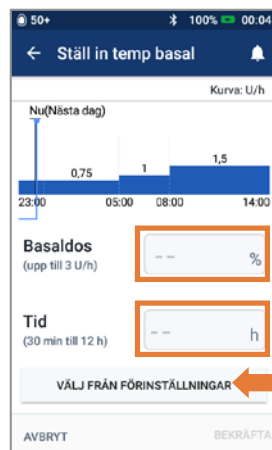


3. + Tryck på textrutan Basaldos och välj din procentändring
 + Tryck på Tid och välj din duration
 + Eller tryck på VÄLJ FRÅN FÖRINSTÄLLNINGAR (om du har sparat förinställningar)




4. + Tryck på AKTIVERA när du har granskat dina angivna värden

Visste du?


- Temp basal markeras med grönt om det finns en aktiv temp basaldos som körs.
- Du kan avbryta en temp basal när som helst genom att trycka på Avbryt

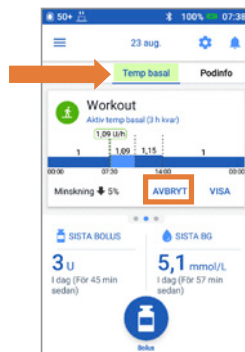


PAUSA OCH ÅTERUPPTA INSULINTILLFÖRSEL

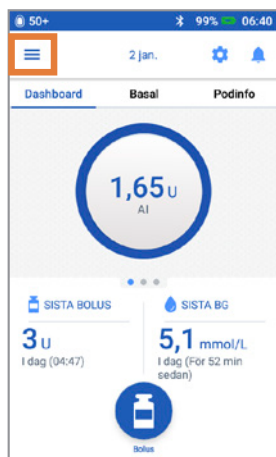


1. + Tryck på menyikonen på Hemskrermen

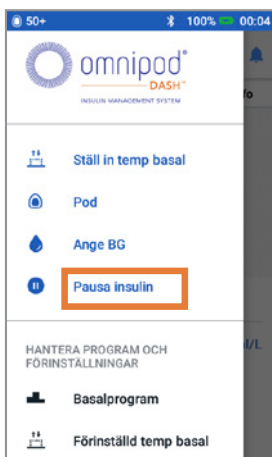


2. + Tryck på Pausa insulin

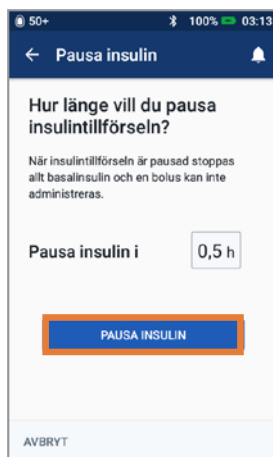

3. + Rulla till önskad duration (tidslängd) för insulinpausen
 + Tryck på PAUSA INSULIN
 + Tryck på Ja för att bekräfta att du vill stoppa insulintillförelsen

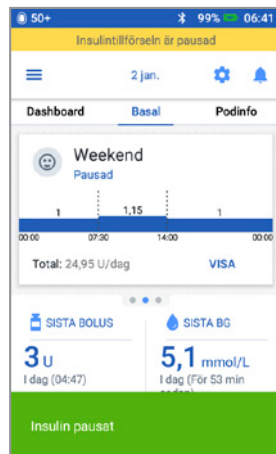

4. + Hemskrermen visar ett gult fält med uppgift om att insulin har pausats

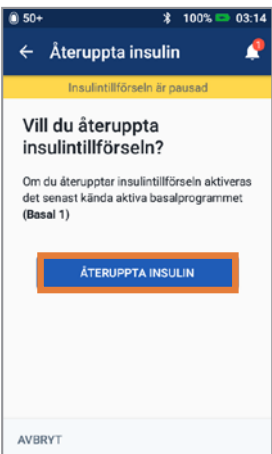


5. + Tryck på ÅTERUPPTA INSULIN för att starta insulintillförelse

Påminnelse

- Du **MÅSTE** återuppta insulin. Insulin återupptas inte automatiskt efter avslutad paus
- Poden piper var 15:e minut under hela paustiden för att påminna dig om att insulin inte levereras
- Dina temp basaldoser eller förlängda bolusar avbryts när insulintillförelsen pausas
- Paus kan programmeras för 0,5 timmar till 2 timmar
- Prata med din vårdgivare vid vilka tillfällen det är lämpligt att pausa insulintillförelsen.


REDIGERA IK-KVOT OCH KORRIGERINGSFAKTOR

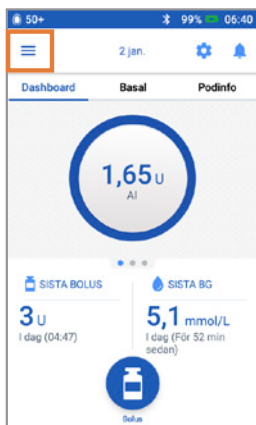

1. + Tryck på menyikonen på Hem-skärmen




2. + Tryck på Inställningar för att expandera listan
+ Tryck på Bolus

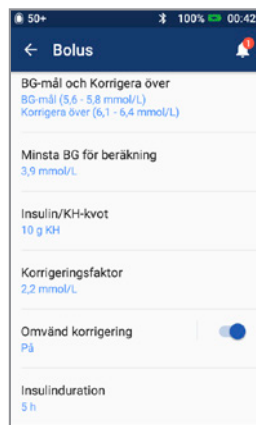

3. + Tryck på Insulin/KH-kvot eller Korrigeringsfaktor



Insulin/KH-kvot

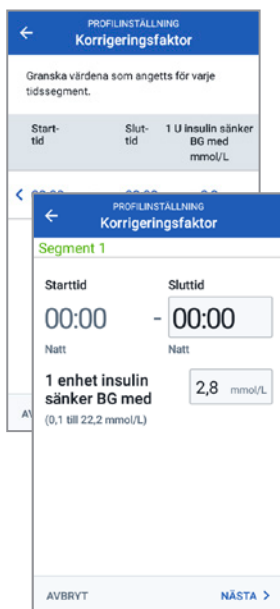

Korrigeringsfaktor

4. + Tryck på det segment du vill redigera. Redigera tidssegment och/eller mängd
+ Tryck på NÄSTA för att lägga till fler segment efter behov
+ Tryck på SPARA

Visste du?


- Följ stegen ovan för att justera värdena som angetts för varje tidssegment.
- Justera Minsta BG för beräkning, Omvänd korrigering och Insulininduration genom att navigera till Inställningar > Bolus
- IK-kvoter kan programmeras i steg om 0,1 g kolhydrater/U
- Din IK-kvot anger hur många gram kolhydrater 1 enhet insulin täcker
- Din korrigeringsfaktor anger hur mycket 1 enhet insulin sänker ditt BG.



Skärmbilderna på PDM är endast för illustrativa ändamål och bör inte betraktas som förslag till användarinställningar.

Viktig säkerhetsinformation: Omnipod DASH[™] Insulin Management System är avsett för subkutan tillförsel av insulin i fasta och variabla hastigheter för hantering av diabetes mellitus hos personer som behöver insulin. Omnipod DASH Insulin Management System är utformat för användning med snabbverkande U-100-insulin. Se användarhandboken Omnipod DASH Insulin Management System för vilka U-100-insulinanaloger som har testats och befunnits säkra för användning i poden samt fullständig säkerhetsinformation inklusive indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Användarhandboken till Omnipod DASH[™] Insulin Management System är tillgänglig för nedladdning på www.diabetesinfucare.com eller genom att kontakta Nordic Infucare på 08-6012440.

Nordic Infucare Distributör. ©2023 Insulet Corporation . Tillverkare Omnipod, Omnipod-logotypen, DASH och DASH-logotypen är varumärken eller registrerade varumärke som tillhör Insulet Corporation i USA och diverse andra jurisdiktioner. Alla rättigheter förbehållna. Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521AZ Utrecht, Pays-Bas.

OMNI.SE.005-02-APR2023