


INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

OMNIPOD DASH™ INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

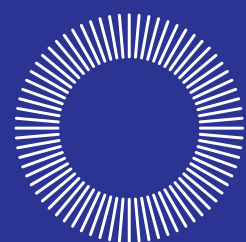

omnipod®
DASH™

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

OMNIPOD DASH INSULIN MANAGEMENT SYSTEM KAN FORENKLE BYRDEN VED FLERE DAGLIGE INJEKTIONER (MDI)



Omnipod:

1

vs.



MDI:

14

Gennemsnitligt antal nødvendige injektioner hver 3.
dag (MDI: ~ 4,5 pr. dag)



Velegnet til alle aldre og livsstile



Frihed



Komfort



Fleksibilitet

Hvorfor folk vælger at
skifte fra MDI til
Omnipod Systemet¹

1. De ønsker bedre blodsukkerkontrol
2. De ønsker mere frihed
3. De er trætte af injektioner

Hvorfor folk vælger
Omnipod System fremfor
andre insulinpumper¹

1. Slangeløst design
2. Let at anvende
3. Vandtæt*
4. Stoler på det til at håndtere deres diabetes med²

* Pod'en har en IP28-klassificering af vandtæthed til en dybde på 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

1. Insulet Customer Satisfaction Survey. US data on file. Dec 2017. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.

2. Polonsky WH et al. Impact of Omnipod® Insulin management System on Quality of Life: A Survey of Current Users. Diabetes Technology & Therapeutics. 2016;18(10):664-670. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.

OMNIPOD DASH SYSTEM GIVER DIG FLEKSIBILITET OG FRIHED

+ **Håndfri, automatisk kanyleindføring** så du aldrig behøver at håndtere en indførgskanyle


+ Med forudindstillingerne på Personal Diabetes Manager (PDM) får du en mere **personligt tilpasset insulinlevering**

Let at bruge

Pod og Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) kommunikerer via Bluetooth® trådløs teknologi* med henblik på at opnå kontinuerlig insulinlevering

Ingen sifoneffekt³

Ingen slanger, hvilket reducerer variationen i pumpeflowet

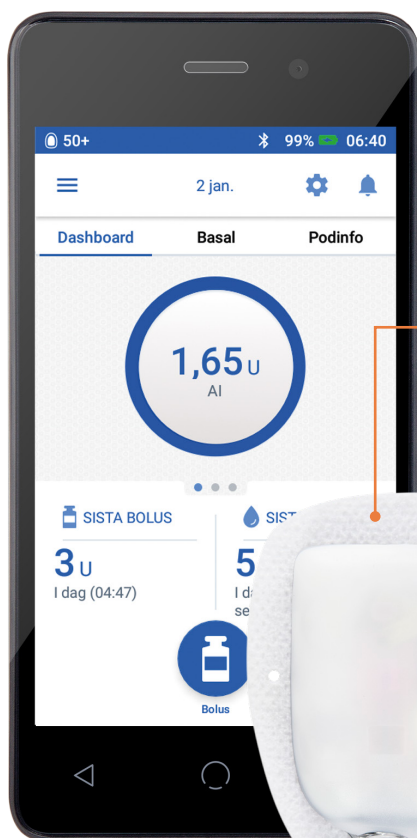

Hyppigt skift af infusionssted

Placer Pod'en hvor som helst, hvor brugerne ville give dem selv en injektion

Bæres i højst 3 dage**

Letvægts-Pod til engangsbrug; indeholder op til 200 enheder insulin

Ingen grund til at koble fra

Vandtæt Pod***

Automatisk kanyleindføring

Ensartet, håndfri kanyleindføring

Skærbilledet er kun et eksempel til illustrative formål.


* Ved opstart skal PDM'en og Pod'en røre ved hinanden, enten i eller uden for bakken, for at sikre korrekt kommunikation under priming. Under normal drift: Højst 1,5 m fra hinanden. Afhængigt af lokaliteten kan kommunikationsafstanden være op til 15 meter.

** Op til 72 timers kontinuerlig insulinlevering.

*** Pod'en har en IP28-klassificering af vandtæthed til en dybde på 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.

3. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.

OMNIPOD DASH SYSTEMET KAN REDUCERE KOMPLEKSITETEN FOR BÅDE BRUGERE OG SUNDHEDSPERSONALE

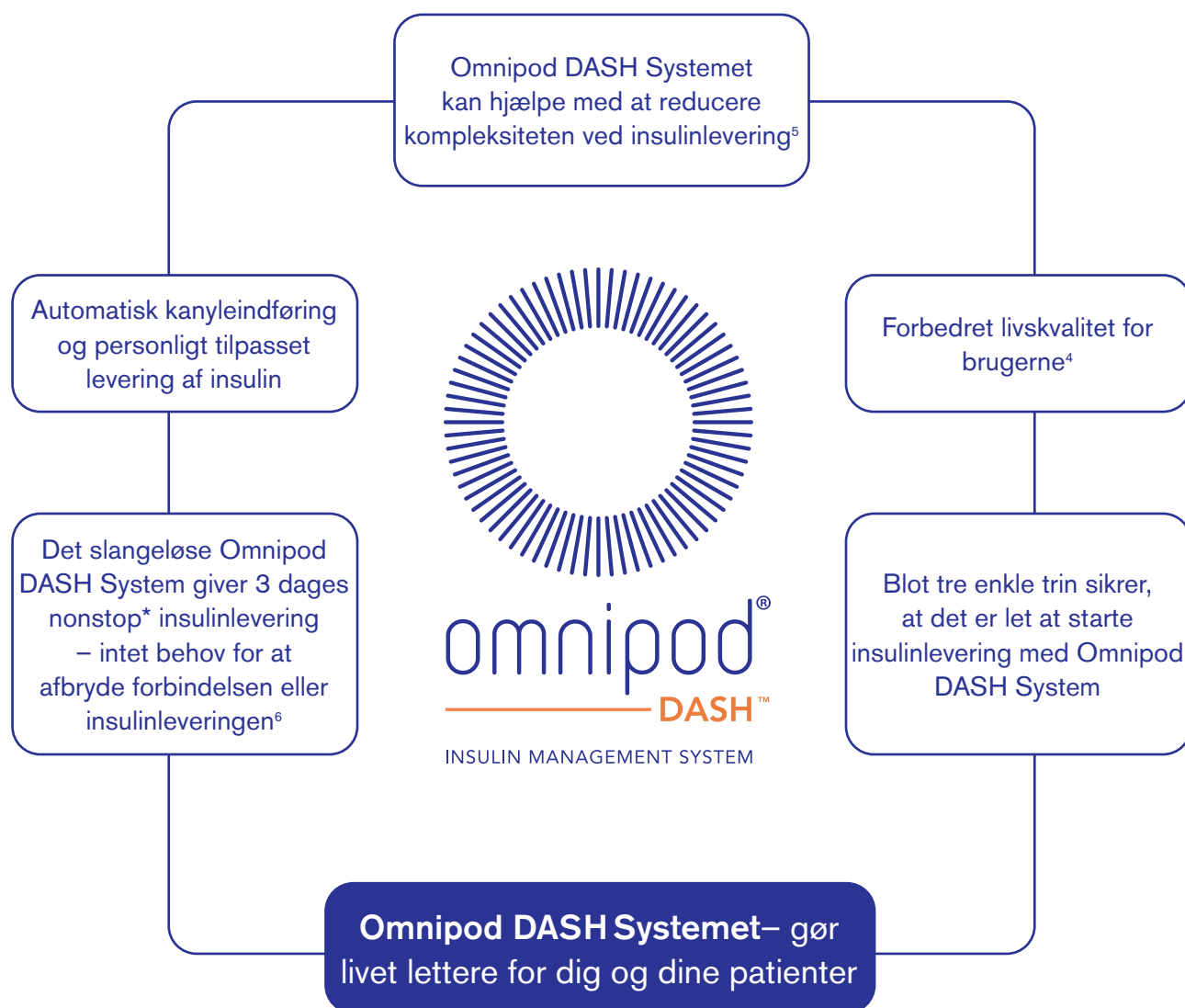

www.myomnipod.com

* Op til 72 timers kontinuerlig insulinlevering

4. Polonsky WH, Hessler D, Layne JE, Zisser H. Impact of the Omnipod Insulin Management System on Quality of Life: A Survey of Current Users. Diabetes Technology & Therapeutics. 2016;18(10):664-670. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod® Insulin Management System.

5. Argent data on file. Metoden analyserede brugervejledningerne til adskillige kommercielt tilgængelige, selvadministrerede insulinleveringssystemer, herunder Insulet Omnipod® System, Tandem t:slim®, Medtronic MiniMed® 630G, MiniMed® 670G og NovoLog® FlexPen® og etablerede et panel af certificerede diabetesundervisere (CDE'er) med henblik på at evaluere, hvilket produkt der ud fra deres ekspertviden var det nemmeste at bruge. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod® Insulin Management System.

6. Zisser HC. Quantifying the impact of a short interval interruption of insulin-pump infusion sets on glycemic excursions. Diabetes Care. 2008;31:238-239. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.

BLOT TRE ENKLE TRIN SIKRER, AT DET ER LET AT STARTE INSULINLEVERING MED OMNIPOD DASH SYSTEMET

Omnipod DASH Systemets enkle design betyder, at det blot kræver **tre trin at starte insulinlevering**



Trin 1. Påfyld

Fyld Pod'en med insulin (fra 85 til 200 enheder hurtigtvirkende U-100-insulin). Pod'en primer sig selv og udfører en række sikkerhedskontroller.



Trin 2. Påsæt

Sæt Pod'en på det forberedte infusionssted, og kør fingeren rundt på plastret for at sikre, at det sidder fast.




Trin 3. Pumpe

Tryk på 'Start' for at aktivere den næsten smertefrie, automatiske indføring af den bløde kanyle og påbegynde insulinleveringen.


PERSONLIGT TILPASSET INSULINLEVERING OG MERE FRIHED TIL AT LEVE LIVET FULDT UD

Pod'en kan **sættes overalt, hvor insulin normalt ville blive injiceret**, og uden besværet med insulinpumper med slanger får din patient **større frihed** til at bevæge sig, lege, træne, svømme, sove, være intim og **leve livet fuldt ud**.

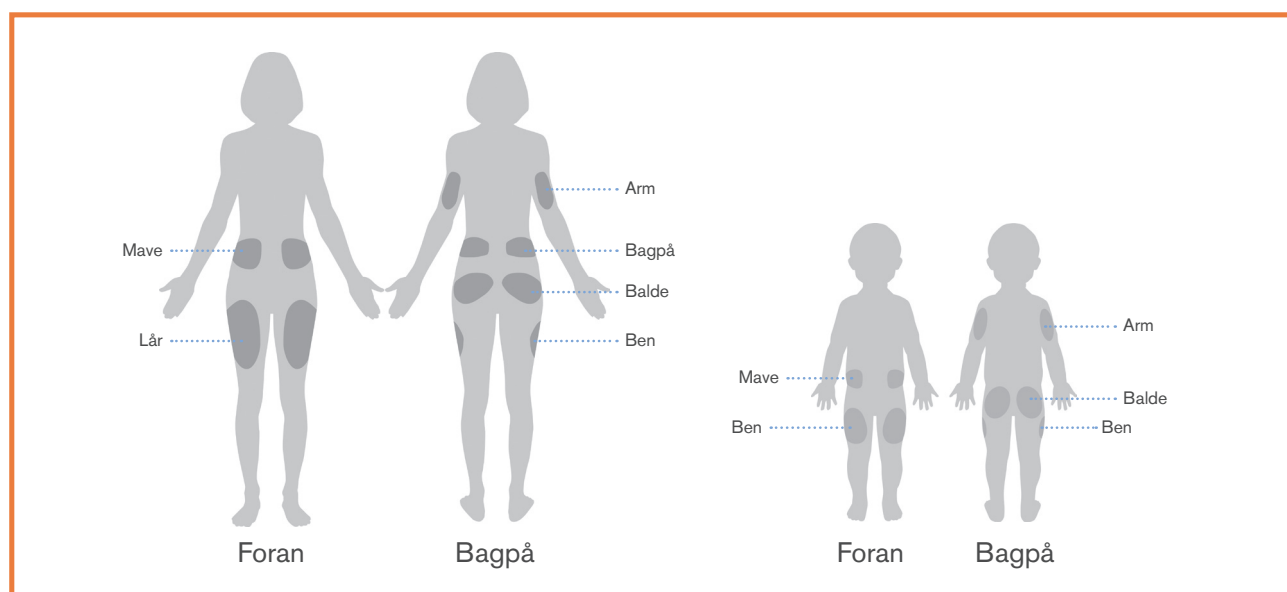


En undersøgelse har vist, at en pumpe's position i forhold til infusionsstedet kan påvirke den forventede insulinlevering med op til 25 % (hastighed på 1 IE/t.).¹⁰

Da Omnipod DASH Systemet er slangeløst, er en sådan variation i insulinleveringen minimal.

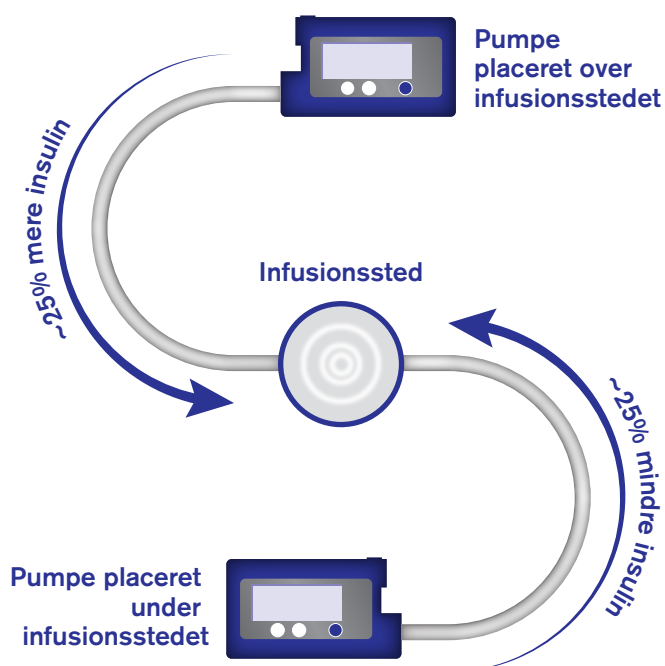

OMNIPOD DASH SYSTEMET KAN FORBEDRE BRUGERNES LIVSKVALITET

Procentdel af patienter, der rapporterede forbedret livskvalitet i en amerikansk undersøgelse⁷

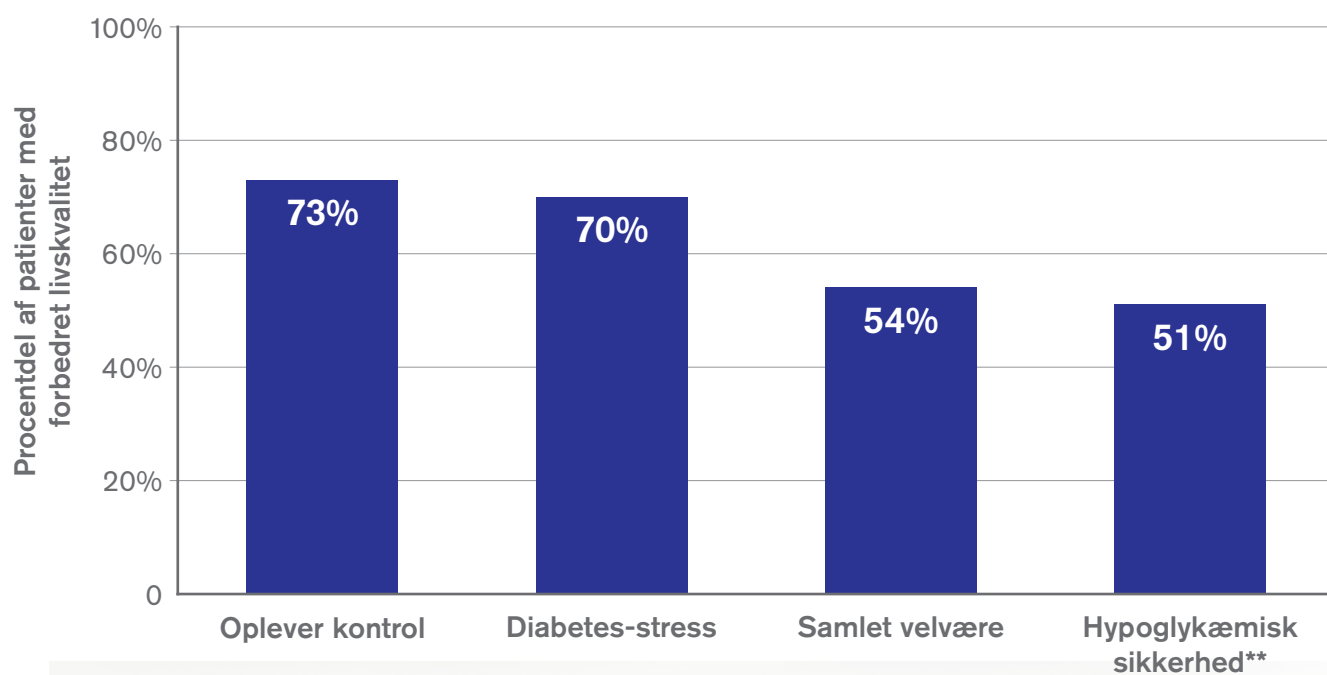


⁷ Polonsky WH, Hessler D, Layne JE, Zisser H. Impact of the Omnipod® Insulin Management System on Quality of Life: A Survey of Current Users. Diabetes Technology & Therapeutics. 2016;18(10):664-670. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod® Insulin Management System.

VED AT VÆRE UDEN SLANGE SIKRER OMNIPOD DASH SYSTEMET, AT DER IKKE ER NOGEN AFBRYDELSE AF BASAL INSULININFUSION

Omnipod DASH System sættes direkte på kroppen, og der er ingen grund til, at patienter afbryder forbindelsen. Tre dages nonstop* insulinlevering kan reducere den vedvarende stigning i blodsukkerværdierne, der observeres, når insulinpumper med slanger frakobles.⁹

Måling af virkningen af kortvarige afbrydelser af insulinleveringen på blodsukkerniveauerne⁹

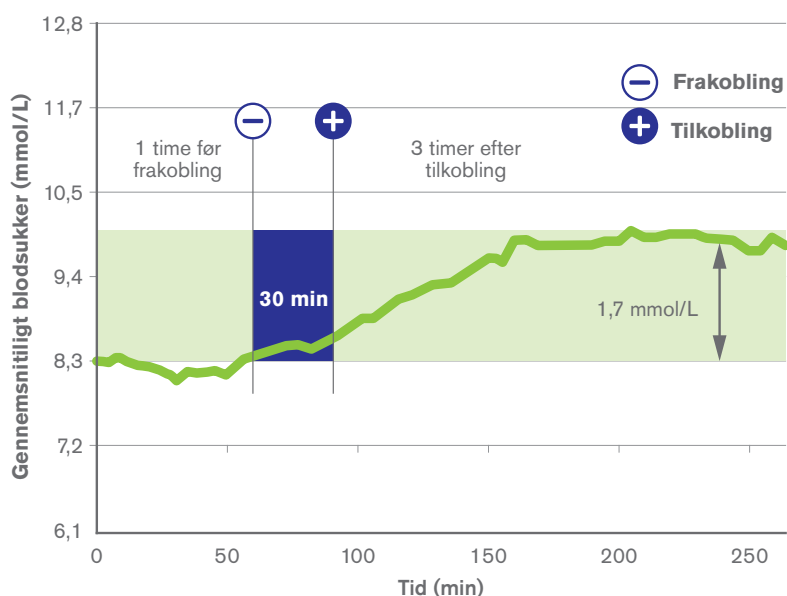

En prospektiv, åben undersøgelse, der blev offentliggjort i Diabetes Care, målte virkningen af kortvarige afbrydelser af insulinleveringen på blodsukkerniveauerne. Konklusionen: En "30-minutters afbrydelse af basal insulininfusion resulterede i betydelig blodsukkerstigning; ~ 1 mmol/l for hvert minuts afbrydelse af basal insulininfusion."⁹



* Op til 72 timers kontinuerlig insulinlevering

9. Zisser HC. Quantifying the impact of a short interval interruption of insulin-pump infusion sets on glycemic excursions. Diabetes Care. 2008;31:238-239. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.

10. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.



Omnipod® **Support**
Programme

OMNIPOD SUPPORTPROGRAM

Omnipod Supportprogrammet er designet til at gøre overgangen til Omnipod DASH Systemet så **nem som muligt**. Programmet tilbyder en række **værdiskabende tjenester**, som hjælper din patient med at få mest muligt ud af det, som Omnipod DASH System har at tilbyde.

+ **Pod Experience Kit***

En gratis, ikke-fungerende prøve-Pod til de af dine patienter, som gerne vil prøve Pod'en

+ **Omnipod DASH System Træning**

Vores lokale produktspecialister er tilgængelige til at hjælpe dig med at få dine patienter oplært i og startet på Omnipod DASH System

+ **Undervisnings- og træningsressourcer**

"Sådan gør du"-videoer, ressourceguider, tips og tricks, masser af undervisnings- [og trænings-] support til dig og dine patienter, altid tilgængeligt på www.myomnipod.com

+ **PDM Holiday Loaner Programme*****

Yder support til din patient, uanset hvor hun/han befinder sig i verden. Kontakt dit lokale Omnipod Kundeserviceteam for at få flere oplysninger

+ **Program til bortskaffelse af Insulet Pod**

Giver Podders™ en alternativ måde at bortskaffe brugte Pods på. Henvi venligst dine Podders til deres lokale Omnipod Kundeserviceteam eller deres nuværende Omnipod DASH System-leverandør for yderligere information



Besøg venligst www.myomnipod.com for at få flere oplysninger om de enkelte tjenester og deres tilgængelighed i dit land, eller ring til dit lokale Omnipod Kundeserviceteam].

*Prøve-Pod'en er en kanyelfri, ikke-fungerende Pod, der kan bæres i op til 3 dage.

OMNIPOD KUNDESERVICETEAM

Vores mål er at gøre livet lettere for dig og dine patienter.

Omnipod Kundenserviceteam er **tilgængeligt 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen** for at hjælpe dig.

Land:	Telefonnummer*:	Telefonnummer, når du ringer fra udlandet:	E-mail:
Danmark	80 25 36 09	+45 70 28 10 24	Omnipod-DK@insulet.com
Finland	0800 91 2942	+358 207 348 760	Omnipod-FIN@insulet.com
Norge	800 22 612	+49 69 1540 8728	Omnipod-NO@insulet.com
Sverige	020 033 6809	+46 8 601 24 40	Omnipod-SE@insulet.com

Besøg os på **www.myomnipod.com**

Vigtig sikkerhedsinformation:

Omnipod Insulin Management Systemet er beregnet til subkutan levering af insulin med faste og variable mængder ved behandling af diabetes mellitus hos personer, der har behov for insulin, og til den kvantitative måling af blodsukker i frisk kapillær fuldblood fra fingeren. Blodsukkermålingerne bør ikke bruges til diagnosticering eller screening for diabetes. Personal Diabetes Manager (PDM) blodsukkermåler er beregnet til brug for individuelle patienter og bør ikke deles. Omnipod DASH Insulin Management Systemet er beregnet til subkutan levering af insulin med faste og variable mængder ved behandling af diabetes mellitus hos personer, der har behov for insulin. Omnipod Insulin Management System og Omnipod DASH Insulin Management System er designet til brug sammen med hurtigvirkende U-100 insulin. Se Brugervejledningen Omnipod Insulin Management System eller Omnipod DASH Insulin Management System, hvilke U-100 insulinanaloger der er testet og fundet at være sikre til brug i pod'en, samt komplette sikkerhedsoplysninger inklusive indikationer, kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner.

* Opkald bliver muligvis overvåget og optaget med henblik på kvalitetsformål. Opkald til 0800-numre er gratis fra lokale fastnetnumre, men andre mobilnetværk opkræver muligvis gebyr for disse opkald.





www.myomnipod.com