


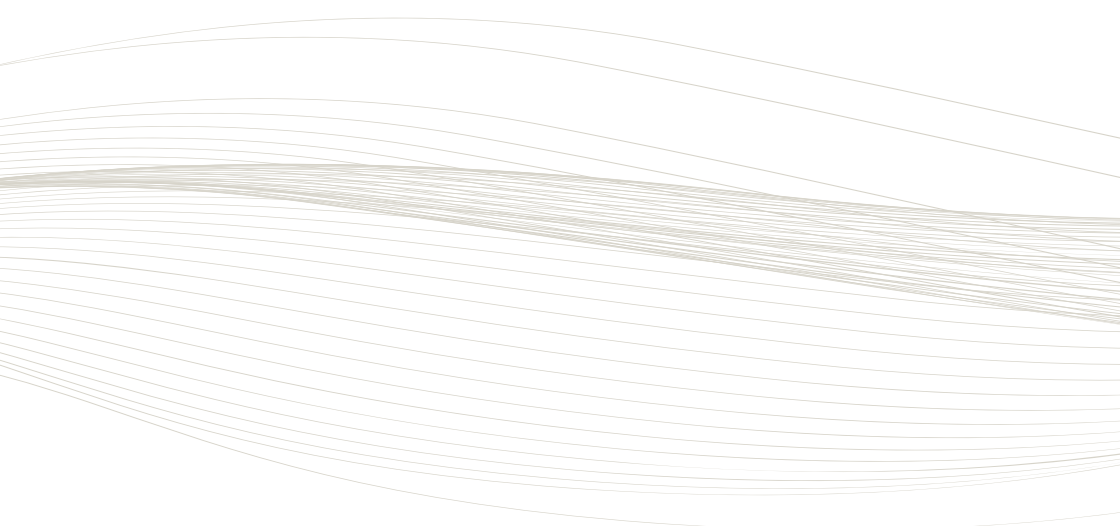

omnipod.com

© 2022-2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod og Omnipod DASH er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Insulet Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Glooko er et varemærke tilhørende Glooko, Inc. og bruges med tilladelse. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Brug af tredjeparters varemærker udgør ikke en godkendelse af disse varemærker og forudsætter ikke en relation eller en anden tilknytning.
Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland. PT-000043-DNK-DAN-AW Rev 03 04/24

Kom godt i gang med Glooko®

Til dit Omnipod DASH® Insulin Management System



Hvad er indholdet?

Lær, hvordan du:

Opretter en Glooko-konto på internettet	2
Uploader data ved hjælp af din computer	3-4
Får vist og deler data på din iPhone	5
Synkroniserer, får vist og deler data på din personlige Android-smartphone...	6
Får vist dine rapporter	7

Hvis din behandler anvender Glooko, skal du bede vedkommende om dennes ProConnect-kode. Du kan tilføje denne kode til din eksisterende konto eller bruge den, når du tilmelder dig en ny konto. Dette vil gøre, at du automatisk kan dele dine Omnipod-systemdata med din behandler, når du først har uploadet data hjemmefra.

Brugernavn [E-mail]

ProConnect-kode



Alt, hvad du skal bruge på farten!

Synkroniser enheder

Synkroniser din Omnipod DASH PDM, blodglukosemåler, CGM og træningstracker, så du kan se alle dine data på ét sted.

Registrer levevis

Du kan nemt registrere mad, medicin, insulin, motion og meget mere for at skabe en digital logbog.

Identificer mønstre

Se dine blodglukosemønstre, og find ud af, hvilke dage og hvilke tidspunkter der er dine bedste.

Få påmindelser

Gå ikke glip af en vigtig opgave. Indstil påmindelser om at tjekke din blodglukose, tage din medicin, insulin og meget mere.

Få support

Del dine data med dit diabetesteam for at få den support, du har brug for mellem konsultationer.

Adgang online

Gennemgå detaljerede rapporter online på www.my.glooko.com hjemme i trygge rammer.

Opret en Glooko®-konto på internettet

Følg disse trin:

BEMÆRK: Hvis din læge tidligere har uploadet din nuværende Omnipod PDM til Glooko, har du allerede en Glooko-konto. Hvis du ikke kan huske dine loginoplysninger, skal du kontakte Glooko Support. De kan sende dem til dig og sikre, at din konto er forbundet med din læges.

1 Gå til my.glooko.com

2 Klik på "Tilmeld dig Glooko her", og udfyld dine oplysninger

- Indtast en ProConnect-kode for automatisk at dele dine Omnipod DASH System-data med din behandler

3 Vælg Jeg er en Omnipod® System-bruger



DET VAR DET HELE! Se næste side for at læse om, hvordan du installerer Glooko Uploader for at uploade data hjemmefra.

Upload data ved hjælp af din computer

Du skal bruge følgende:



PC- eller
Mac-computer



USB-A til mikro-kabel

Dette kabel er i dit startssæt.
Kontakt din behandler
eller *Omnipod Customer
Experience Team*, hvis du har
mistet dit kabel.




Omnipod DASH PDM

Følg disse trin:

1 Installer Glooko Uploader

- Hvis du allerede har installeret softwaren, skal du gå til trin 2

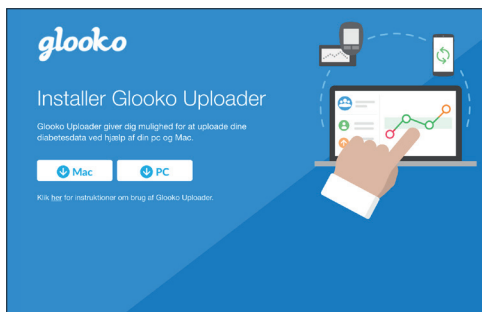

- Log på din konto på **my.glooko.com**
- Vælg **Indstillinger** øverst til højre
- Rul ned til bunden, og klik på **Hent Glooko Uploader**
- Vælg Mac eller PC
- Åbn filen, og følg anvisningerne
- Genstart computeren for at fuldføre installationen

(fortsættes på næste side)

Bemærk: Alle skærmbilleder er eksempler til instruktionsmæssige formål.


(fortsat fra forrige side)

2 Upload dine data

- Tænd for PDM'en, og lås den op med pinkode
- Tilslut PDM'en til computeren

Bemærk: Windows Media Player åbnes muligvis.
Luk programmet – det er ikke relevant.

- Tryk på **Eksport** på PDM'en
- Åbn Glooko Uploader-softwaren på computeren
- Når upload er fuldført, skal du klikke på **Vis data** på computeren

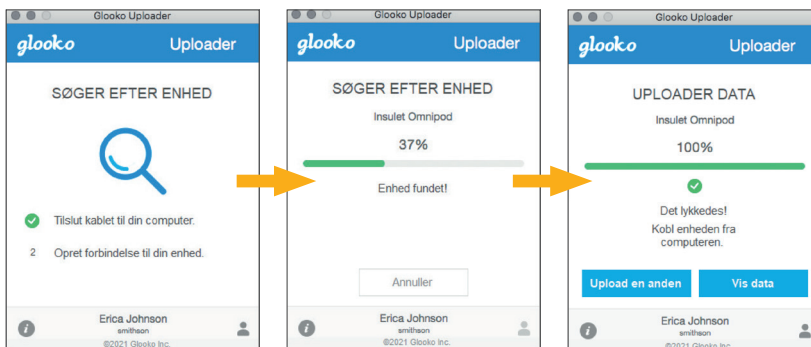

3 Del dine data

- Fra **my.glooko.com** skal du klikke på **Opret rapport** og vælge de rapporter og i den tidsramme, der skal deles
- Klik på **Opret** for at generere en PDF
- Gem eller udskriv PDF'en, og send den med e-mail eller fax til dit diabetesteam

Bemærk: Hvis du har indtastet din læges ProConnect-kode, har din behandler adgang til at se dine PDF-rapporter, så snart du uploader.

Følg disse trin:

1 Download appen, og log ind



- Fra App Store skal du søge efter og installere Glooko Mobile-appen
- Log på, eller opret en konto ved at udfylde oplysningerne, der anmodes om


2 Få vist dine data

- Når du har uploadet dine data til din computer, kan du se dine tendenser og grafer på din iPhone

Gå til side 3 for at lære, hvordan du uploader dine data.

3 Del data med dit diabetesteam

- Tryk på fanen **Mere**, og tryk derefter på **Del rapport** for at sende rapporter via e-mail eller fax til dit diabetesteam

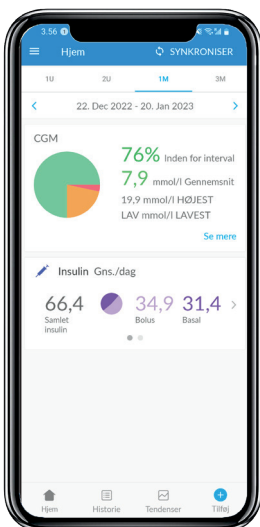

Synkroniser, få vist og del data på din personlige Android-smartphone

Følg disse trin:

1 Download appen, og log ind






- Søg efter, og installer Glooko Mobile-appen fra Google Play™-butikken
- Log på, eller opret en konto ved at udfylde oplysningerne, der anmodes om

2 Synkroniser og få vist dine data

- Tryk på **Synkroniser** på startskærmen, og vælg **Omnipod DASH System**
- Slut Omnipod DASH PDM til din telefon med et mikro-til-mikro-USB-kabel.
- Følg anvisningerne for at fuldføre synkroniseringen

3 Del data med dit diabetesteam

- Tryk på **Del rapport** for at sende rapporter via e-mail eller fax til dit diabetesteam

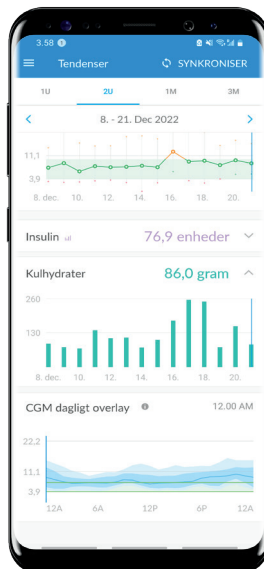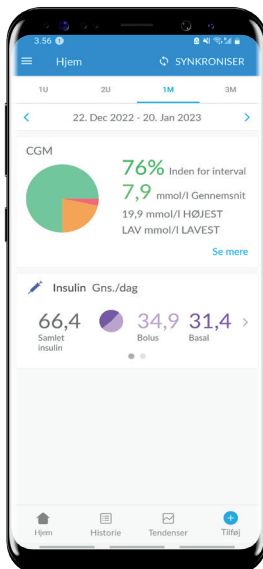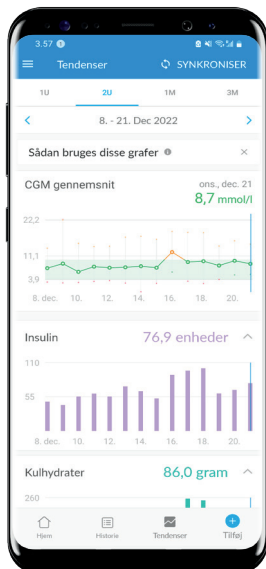

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Hvis du oplever problemer med Glooko, skal du kontakte Glooko Support.

Få flere oplysninger om Omnipod DASH System ved at kontakte Insulets kundeserviceteam.

Besøg: omnipod.com

VIGTIGT: Før du foretager ændringer i PDM-indstillinger, som kan påvirke insulintilførslen, skal du gennemgå de aktuelle indstillinger og oversigter over historikken i PDM'en.