

2G/3G-netværksopdateringer: Vigtig information til Omnipod DASH[®]-brugere

Kære sundhedspersonale og Omnipod DASH-brugere

Retningslinjerne for brugere af Omnipod DASH[®] er opdateret på grund af den seneste tids lukninger af 2G- og 3G-nettet. Da netværkslukningerne er forskellige rundt om i verden, kan batteriet i din Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) blive hurtigere afladet, hvis den bruges i et af de berørte områder.

Aktivér Flytilstand for at optimere batteritiden. Det påvirker ikke Omnipod DASH[®]-systemets funktionalitet.

Når Flytilstand aktiveres, forbedres batteriets ydeevne, også selvom du ikke er ude at rejse, og det hjælper din enhed med at fungere mere effektivt.

Læs mere om rejseanvisninger for Omnipod DASH PDM og instruktioner for Flytilstand i vores Ofte stillede spørgsmål: www.diabetesinfucare.com/da/omnipod-dash/hjaelp-og-support

Om Hvis du har spørgsmål eller har behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på 70 28 10 24* eller teknisksupport@infucare.dk

Tak for din fortsatte støtte.
Omnipod[®]

**Din samtale kan blive optaget med henblik på kvalitetssikring og uddannelse.*