



Omnipod® 5 -järjestelmän käytön aloittaminen



1. Ennen koulutusta

Jos aiot käyttää Dexcom G6- tai Dexcom G7 -Sensoria

Ennen Omnipod 5 -koulutusta sinun on aktivoitava Dexcom G6- tai Dexcom G7 -Sensori ja yhdistettävä se Dexcom G6- tai Dexcom G7 -sovellukseen yhteensopivassa älypuhelimessa[‡].

Jos käytät tällä hetkellä Dexcom-Vastaanotinta, lataa älypuhelimieesi Dexcom G6- tai Dexcom G7 -sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmälle.

Jos aiot käyttää FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoria

Sinun on pitänyt saada koulutusta FreeStyle Libre -Sensorin käytössä.

Sinun on pitänyt saada hoitavalta lääkäritäsi lähete FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoreille. Ota Omnipod 5 -koulutukseen mukaasi uusi, avaamaton FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori[‡].




Omnipod-tunnus

On tärkeää, että luot Omnipod-tunnuksen ennen Omnipod 5 -koulutusta.

-  Luo Omnipod-tunnus osoitteessa [Webpage: www.omnipod.com/setup].
-  On tärkeää, että muistat Omnipod-tunnuksesi ja salasanasasi, koska tarvitset niitä Omnipod 5 -Ohjaimeen kirjautumiseen koulutuksessa.
-  Jos olet huoltaja ja asennat sovelluksen huollettavasi puolesta, luo Omnipod-tunnus huollettavallesi.
-  Käy läpi näyttöön tulevat sivut, jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä ja suostumustasi siihen.

Omnipod-tunnuksesi on rekisteröity, kun saat vahvistusviestin.

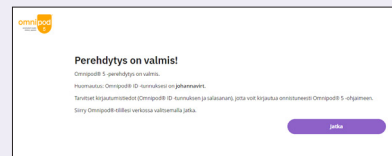

[‡] Sensorit vaativat erillisen reseptin. Sensorit eivät sisälly järjestelmään.

Dexcom G6 -Sensoria on käytettävä Dexcom G6 -sovelluksen kanssa. Dexcom G6 -Vastaanotin ei ole yhteensopiva Omnipod 5 -järjestelmän kanssa. Dexcom G7 -Sensoria on käytettävä Dexcom G7 -sovelluksen kanssa. Dexcom G7 -Vastaanotin ei ole yhteensopiva Omnipod 5 -järjestelmän kanssa.

Glooko®-palveluun yhdistäminen

Glooko on sovellus, jota voi käyttää Omnipod 5 -tietojen käsittelyyn. Sen avulla voit:

- tarkastella glukoosi- ja insuliinitietoja
- jakaa tietosi reaaliajassa diabeteshoitotiimi kanssa, jotta tiimi voi olla tukenasi järjestelmän asetusten säätämisessä.

☞ Jotta diabeteshoitotiimi voi nähdä glukoosi- ja insuliinitietosi, sinun on yhdistettävä Omnipod-tunnuksesi Glooko-tiliin.

Jos sinulla ei ole Glooko-tiliä, voit luoda sen Omnipod-tunnuksen luotuasi.

☞ Jotta voit jakaa tietosi diabeteshoitotiimin kanssa, sinun on lisäksi pyydettävä klinikan ProConnect-koodi.

ProConnect-koodi:

**Olet nyt valmis aloittamaan
Omnipod 5 -tuotekoulutuksen!**



2. Koulutuspäivänä

Osana Omnipod 5 -järjestelmän käyttöön valmistautumista noudata diabeteshoitotiimisi antamia ohjeita, jotka koskevat muutoksia nykyiseen hoitoosi, mukaan lukien kirjallisia insuliinihoitoa koskevia ohjeita. Tämä on **edellytys koulutukseen osallistumiselle**.

Omnipod 5 -Aloituspakkaus

☞ Jos suoritat koulutuksesi verkossa, sinulle lähetetään Omnipod 5 -Aloituspakkaus ja Omnipod 5 -Pumppuja. Lisäksi tarvitset injektiopullon, joka sisältää hoitavan lääkärin määräämää nopeavaikutteista insuliinia.

TAI

☞ Jos saat koulutuksesi klinikalla, varmista diabeteshoitotiimiltä, että saat Omnipod 5 -Aloituspakkauksen ja Omnipod 5 -Pumput joko klinikalla koulutuksen alkaessa tai että pakkaukset lähetetään sinulle kotiin, jotta voit tuoda ne mukaasi koulutukseen. Muista noutaa ja ottaa mukaasi nopeavaikutteinen insuliini, jota sinulle on määrätty Omnipod 5 -hoitoa varten.

Jos odotat Omnipod 5 -Aloituspakkausta ja -Pumppuja, eikä niitä ole vielä toimitettu, kun koulutukseen on aikaa 3 päivää, ota yhteyttä tuotteidesi tilauksesta ja toimituksesta vastaavaan yksikköön.

Sensorit

Dexcom G6- ja Dexcom G7 -Sensorit

- ☞ Saavu koulutukseen aktivoitu Dexcom G6- tai Dexcom G7 -Sensori kiinnitettynä ja Sensori yhteensopivaan älypuhelimien ladattuun Dexcom G6- tai Dexcom G7 -sovellukseen yhdistettynä. Varmista myös, että Dexcom G6/G7 -Vastaanottimesi on suljettuna.


FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori

- ☞ Varmista, että hoitava lääkärisi on määrännyt sinulle FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoreita.
- ☞ Ota Omnipod 5 -koulutukseen mukaasi uusi, avaamaton FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori.

Insuliini

- ☞ Muista ottaa nopeavaikutteista insuliinia* sisältävä injektiopullo mukaasi koulutukseen.

Esimerkkejä Pumpun ja Sensorin kiinnityspaikoista*

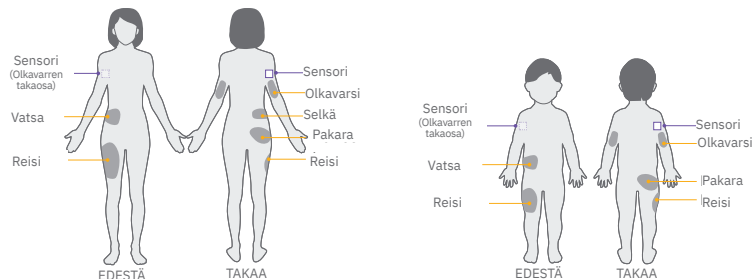

*Pumpun kiinnityspaikkojen esimerkit perustuvat siihen, että Sensori on kiinnitetty olkavarren takaosaan.

Lisätietoja Sensorin mahdollisista kiinnityspaikoista on Sensorijärjestelmän käyttöohjeessa.

Vinkki: Ota huomioon, että Pumpun ja Sensorin välinen yhteys toimii parhaiten, kun laitteilla on "näköyhteys" toisiinsa. Siksi Pumppu ja Sensori on suositeltavaa kiinnittää samalle puolelle kehoa niin, ettei niiden välissä ole kehon muodostamaa estettä.



*Seuraavat insuliinit ovat yhteensopivia Omnipod 5 -järjestelmän kanssa 72 tunnin (3 vuorokauden) annostelua varten: NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi®, Kirsy® ja Admelog®/Insulin lispro Sanofi®.

Kiitos, että valitsit
Omnipod 5 Automated
Insulin Delivery System
-järjestelmän, jota
voi käyttää yhdessä
markkinoiden johtavien
Sensorien kanssa*.



***Lue tämä seloste huolella,
jotta Omnipod 5 -järjestelmän
käyttöönotto sujuu
mahdollisimman hyvin.***



*Yhteensopiva Dexcom G6-, Dexcom G7- ja FreeStyle Libre 2 Plus -Sensorien kanssa.

3. Tarkistuslista ja lisäaineisto

Tarkistuslista

- ☐ Oletko luonut Omnipod-tunnuksen ja salasanan?
- ☐ Oletko saanut näyttöön vahvistuksen siitä, että Omnipod-tunnuksesi rekisteröiminen onnistui? Oletko saanut sähköpostivahvistuksen?
- ☐ Onko sinulla nopeavaikutteista insuliinia sisältävä injektioipullo koulutusta varten?
- ☐ Onko sinulla aktivoitu Dexcom G6- tai Dexcom G7 -Sensori, joka on yhdistetty Dexcom G6- tai Dexcom G7 -sovellukseen yhteensopivassa älypuhelimessa, ja oletko varmistanut, että Dexcom-Vastaanotin on suljettu?
TAI
- ☐ Onko sinulla uusi, avaamaton FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori, jonka voit aktivoida koulutuksen aikana?
- ☐ Onko sinulla insuliinipumppusi asetukset ylös kirjoitettuna?
Se on **edellytys Omnipod 5 -järjestelmän käyttöä koskevan koulutuksen saamiselle**. Sinun on pitänyt saada insuliinipumpun asetuksia koskevat ohjeet diabeteshoitotiimiltäsi.
- ☐ Jotta olet mahdollisimman hyvin valmistautunut Omnipod 5 -järjestelmän käyttökoulutukseen, **suosittelemme, että tutustut sitä ennen Omnipod 5-verkkoaineistoon diabeteshoitotiimisi ohjeiden mukaan.**

Hoitoasi koskevissa kysymyksissä käänny diabeteshoitotiimisi puoleen.

*Puhelusi saatetaan tallentaa laadunvarmistusta varten. Puhelut 0800-alkuisiin numeroihin ovat maksuttomia kiinteistä puhelinliittymistä, mutta mobiiliverkko-operaattorit saattavat periä maksun tällaisista puhelusta.

©2024 Insulet Corporation. (Valmistaja) Omnipod, Omnipod-logo, Simplify Life ja Podder ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Dexcom, Dexcom G6 ja Dexcom G7 ovat Dexcom, Inc:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja niitä käytetään luvalla. Sensorin ulkokuori, FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tuotemerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä, ja niitä käytetään luvalla. Glooko on Glooko, Inc:n tavaramerkki, ja sitä käytetään luvalla. Insulet Netherlands B.V., Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Alankomaat. www.mymnipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System on CE-merkitty lääkinällisistä laitteista annetun asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti. INS-OHS-07-2024-00058 V2 OMNI.FI.101-02-MAR2025



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.fi
[@makingdiabeteseasier_fi](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi)

NordicInfu Care AB (Jakelija) · Tekniikantie 14 · 02150 Espoo, +358 (0) 207 348 760 · www.infucare.com

Lisäaineisto



Verkkokoulutusaineisto on saatavilla osoitteessa



Jos sinulla on kysyttävää Omnipod-tunnuksesta tai Omnipod 5 -järjestelmästä etkä ole saanut riittävää vastausta verkkokoulutusaineistosta, ota yhteyttä Nordic Infucaren Omnipod-asiakaspalveluun soittamalla numeroon

0207 348 760*

tai +358 0207 348 760, jos soitat ulkomailta.

