



Kom i
gang med
Omnipod® 5



1. Før undervisningen

Hvis du skal bruge Dexcom G6 eller Dexcom G7

Før du modtager undervisning i Omnipod 5-systemet, skal du have modtaget undervisning i og være kommet i gang med Dexcom G6 eller Dexcom G7 og bruge Dexcom G6- eller Dexcom G7-appen på en kompatibel smartphone†.

Hvis du i øjeblikket kun bruger Dexcom-modtageren, skal du også downloade Dexcom G6- eller Dexcom G7-appen til iOS eller Android.

Hvis du skal bruge FreeStyle Libre 2 Plus

Du skal have modtaget undervisning i at bruge en FreeStyle Libre-sensor.

Din behandler skal have ordineret FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer til dig. Tag en ny, uåbnet FreeStyle Libre 2 Plus-sensor med til Omnipod 5-undervisningen†.



Omnipod-ID

Det er vigtigt, at du opretter dit Omnipod-ID før undervisningen i Omnipod 5.

- ➡ Gå til www.omnipod.com/setup, og opret et Omnipod-ID
- ➡ Det er vigtigt, at du husker dit Omnipod-ID og din adgangskode, da du skal bruge dem til at logge ind på Omnipod 5 Kontrolenheden i løbet af undervisningen.
- ➡ Hvis du er behandler og installerer appen for en person, som du har behandlingsansvaret for, skal du oprette et Omnipod-ID til personen.
- ➡ Gennemgå skærbillederne om samtykke, hvor du finder information om behandlingen af dine personoplysninger.

Dit Omnipod-ID er klar, når du ser bekræftelsesmeddelelsen.

Onboarding fuldført!

Omnipod 5 onboarding fuldført.

Bemærk: Dit Omnipod-ID er **kalibreret**.

Du skal bruge dine personoplysninger (Omnipod-ID og adgangskode) for at kunne logge på din Omnipod 5 Kontrolenhed.

Klik på Fortsæt for at få adgang til din online Omnipod-konto.

Fortsæt

† Der kræves en særskilt ordination til sensorer. Sensorer sælges separat.

Dexcom G6-sensoren skal anvendes med Dexcom G6-appen til mobiltelefon. Dexcom G6-modtageren er ikke kompatibel. Dexcom G7-sensoren skal anvendes med Dexcom G6-appen. Dexcom G7-modtageren er ikke kompatibel.

Forbind med Glooko®

Glooko er platformen til håndtering af data fra Omnipod

5. Med den kan du:

- Se glukose- og insulindata
- Dele realtidsdata med dine behandlere som pålideligt grundlag for justeringer af systemet
- ☞ Hvis din behandler skal kunne se dine glukose- og insulindata, skal du knytte dit Omnipod-id til din Glooko-konto.
Hvis du ikke har en Glooko-konto, kan du oprette en, når du installerer Omnipod-systemet.
- ☞ Bed din behandler om klinikkens ProConnect-kode, så du kan dele dine diabetesdata.

ProConnect-kode:

**Nu er du klar til at starte din
tundervisning i at bruge Omnipod 5!**



2. På undervisningsdagen

Som forberedelse til at tage Omnipod 5 i brug skal du følge vejledningen fra din behandling om ændringer i din nuværende behandling, blandt andet skriftlig information om justeringer af insulinbehandlingen. Det er **et krav for at kunne deltage**.

Omnipod 5 Startsat

- ☞ Hvis du får undervisningen digitalt, skal du på forhånd have et Omnipod 5 Startsat og æsker med Omnipod 5 Pods. Du skal også bruge et hætteglas med hurtigtvirkende insulin, som din behandler ordinerer.

ELLER

- ☞ Hvis du får undervisningen på sygehuset, skal du tjekke med behandleren, at du får dit Omnipod 5 Startsat og æskerne med Omnipod 5 Pods, når undervisningen begynder, eller at de bliver sendt hjem til dig, så du kan tage dem med til undervisningen. Husk at medbringe det hurtigtvirkende insulin, du har fået ordineret til brug med Omnipod 5.

Hvis du venter på at få dit Omnipod 5 Startsat og Pods, og de ikke er kommet 3 dage før undervisningen, skal du kontakte den afdeling, der har ansvaret for at bestille og levere tilbehør i din region.

Sensorer

Dexcom G6- og Dexcom G7-sensorer

- ☞ Når du kommer til undervisningen, skal du bære en aktiv Dexcom G6- eller Dexcom G7-sensor, som bruger Dexcom G6- eller Dexcom G7-appen på en kompatibel smartphone. Du skal også omhyggeligt kontrollere, at din Dexcom G6/G7-modtager er slukket.


FreeStyle Libre 2 Plus-sensor

- ☞ Kontrollér, at behandleren har ordineret FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer til dig.
- ☞ Tag en ny, uåbnet FreeStyle Libre 2 Plus-sensor med til Omnipod 5-undervisningen.

Insulin

- ☞ Husk at medbringe et hætteglas med hurtigtvirkende insulin* til undervisningen.

Eksempler på placering af Pod og Sensor*

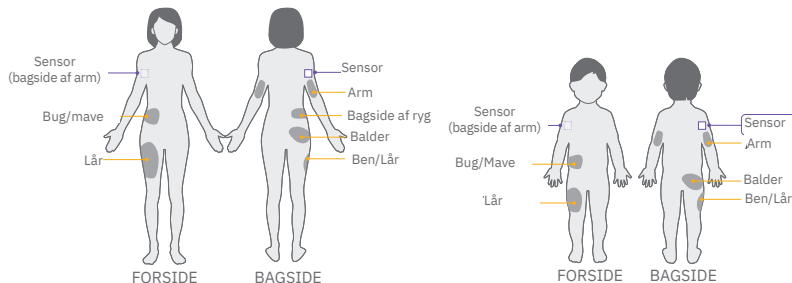

*Eksemplerne på placering af Pod'en bygger på, at Sensoren fastgøres på bagsiden af armen.

I brugervejledningen til sensorsystemet er der mere information om godkendte placeringer af Sensoren.

Et godt råd: Tænk allerede fra start over, at Poden og Sensoren bør placeres, så der er fri synslinje mellem dem for den bedst mulige forbindelse. Fri synslinje betyder, at Pod og Sensor skal bæres på samme side af kroppen, så de to enheder kan "se" hinanden, uden at kroppen blokerer for kommunikationen imellem dem.



*NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi®, Kirsty® og Admelog®/Insulin lispro Sanofi® er kompatible med Omnipod 5-systemet til brug op til 72 timer (3 dage).

Vi er glade for, at du har valgt Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System, som kan bruges med de førende sensorer på markedet*.



Læs denne brochure grundigt igennem. Det er den sikreste måde at komme godt i gang med Omnipod 5 på.

*Kompatibel med Dexcom G6-, Dexcom G7- og FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer.



3. Tjekliste og flere ressourcer

Tjekliste

- ☐ Har du oprettet et Omnipod-ID og en adgangskode?
- ☐ Har du fået bekræftelse på skærmen på, at du er klar med forberedelserne? Har du fået en bekræftende e-mail?
- ☐ Har du et hætteglas med hurtigtvirkende insulin til undervisningen?
- ☐ Har du en aktiv Dexcom G6- eller en Dexcom G7-sensor koblet til Dexcom G6- eller Dexcom G7-appen på en kompatibel smartphone, og har du kontrolleret, at din modtager er slukket?
ELLER
- ☐ Har du en uåbnet FreeStyle Libre 2 Plus-sensor, som er klar til at blive aktiveret i forbindelse med undervisningen?
- ☐ Har du skrevet indstillingerne til din insulinpumpe ned?
Det er et krav til undervisningen i at bruge Omnipod 5. Du skal have modtaget instruktioner om indstillingerne til insulinpumpen fra din behandler.
- ☐ For at du kan være helt forberedt til undervisningen i at bruge Omnipod 5, skal du helst bruge undervisningsressourcerne til Omnipod 5 før produktundervisningen.
Følg anvisningerne fra din behandler om de digitale ressourcer.

Flere ressourcer



Her finder du de digitale ressourcer



Hvis du har spørgsmål om dit Omnipod-ID eller Omnipod 5-system, som du ikke får svar på igennem onlineundervisningen, kan du kontakte Nordic Infucare Omnipod Support på

70 28 10 24*

eller +45 70 28 10 24, hvis du ringer fra udlandet.

Hvis du har spørgsmål til din behandling, skal du henvende dig til dit diabetesteam.

*Din samtale kan blive overvåget og optaget med henblik på kvalitetssikring. Samtaler til 0800-numre er gratis fra fastnettelefoner, men andre netværk kan opkræve betaling for disse samtaler.

©2024 Insulet Corporation. (Producent) Omnipod, Omnipod-logotypen Simplify Life og Podder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Insulet Corporation i USA og andre retsområder. Med eneret. Dexcom, Dexcom G6 og Dexcom G7 er registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og andre land og de må bruges med tilladelse. Sensorenheden, FreeStyle, Libre og relaterede varemærker tilhører Abbott og anvendes med tilladelse. Glooko er et varemærke, som tilhører Glooko, Inc. og anvendes med tilladelse. Insulet Netherlands B.V., Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland. www.mymomnipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System er CE-mærket i henhold til MDR (EU) 2017/745 INS-OHS-07-2024-00059 V2 OMNI.DK.080-02-MAR2025



2797



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk
facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark | @makingdiabeteseasier_dk

NordicInfu Care AB (Distributør) · Industrivej 21, 4000 Roskilde · telefon 70 28 10 24 · www.infucare.com