

OMNIPOD® 5 ER NU KOMPATIBEL

med Dexcom G6-, Dexcom G7- og
FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer



Skift Sensor - sådan gør du

Sådan forbinder du en anden Sensor med Omnipod 5


1. Tal med din behandler om skiftet.

Hvis behandleren er med på skiftet:

- Du skal bede om at få ordineret den nye Sensor.
- Du skal have undervisning i at bruge den nye Sensor, enten af din behandler eller sensorproducenten.

2. Kontrollér kompatibiliteten med dine Pods. Den står med fed skrift på Pod-bakkens låg og i det øverste højre hjørne på Pod-æskens (se nedenfor).

- Brug de Pods og Sensorer, du allerede har, inden du skifter til en ny Sensor.
- Nordic Infucare har nu to versioner af Pods:
 1. Omnipod 5-pods, som er kompatible med både Dexcom G6- og G7-sensorer.
 2. Omnipod 5-pods, som er kompatible med både FreeStyle Libre 2 Plus- og Dexcom G6-sensorer.

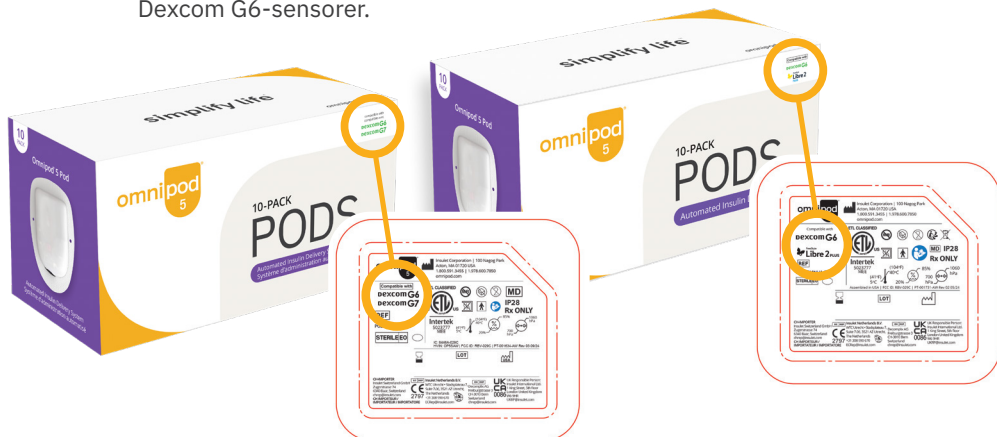

3. Se videoerne ved at scanne QR-koden til højre for at forstå, hvordan Omnipod 5 forbindes til de forskellige sensortyper.

Når du har modtaget din nye Sensor og Pod, skal du gøre følgende for at skifte til en ny sensortype:

1. Gå til Manuel Tilstand
2. Afslut den aktuelle sensorsession og deaktiver Pod
3. Vælg en ny sensortype under "Håndter Sensor" i menuen
4. Tilslut den nye Sensor
5. Aktivér en ny Pod
6. Automatiseret Tilstand: Begrænset, indtil Sensorens opvarmning er færdig

**TILSLUTNING AF SENSOR:
DEXCOM G6, G7 &
FREESTYLE LIBRE 2 PLUS
(VIDEO)**



Link:

www.diabetesinfucare.com/da/omnipod5/skift-sensor



©2018-2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, Omnipod-logotypen og SmartAdjust™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Insulet Corporation i USA og andre retsområder. Med eneret. Dexcom, Dexcom G6 og Dexcom G7 er registrerede varemærker, som tilhører Dexcom, Inc. og anvendes med tilladelse i USA og andre retsområder. Sensorenheden, FreeStyle, Libre og relaterede varemærker tilhører Abbott Diabetes Care Inc. og anvendes med tilladelse i USA og andre retsområder. Bluetooth®-ordmærket og -logotypen er registrerede varemærker, som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af sådanne mærker af Insulet Corporation sker på licens. Med eneret. Insulet producent af Omnipod Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland. www.myomnipod.com. Omnipod 5 automated insulin delivery system er CE-mærket i henhold til MDR (EU) 2017/745
INS-OHS-07-2025-00258, OMNI.DK.134-01-AUG2025



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk
facebook.com/omnipoddanmark | @omnipoddk

NordicInfu Care AB ((Distributør) · Industrivej 21 · 4000 Roskilde, telefon +45 70 28 10 24· www.infucare.com