

OMNIPOD® 5 ON NYT YHTEENSOPIVA

Dexcom G6-, Dexcom G7- ja FreeStyle
Libre 2 Plus -Sensorien kanssa



Sensorin vaihtaminen

Jos aiot yhdistää toisen Sensorin Omnipod 5 -järjestelmään, ota huomioon seuraavat seikat:


1. Keskustele vaihdosta hoitotiimisi kanssa.

Jos he hyväksyvät vaihdon:

- Pyydä lähete uutta Sensoria varten.
- Tarvitset koulutuksen uuden Sensorin käyttöön joko hoitavalta taholtasi tai sensorivalmistajalta.

2. Tarkista yhteensopivuus Pumpuista. Sensoriyhteensopivuutta koskevat tiedot on merkitty lihavoituna tekstinä Pumpun sisäpakkauksen kanteen sekä Pumpun ulkopakkauksen oikeaan yläkulmaan (katso alta).

- Käytä jo käytössäsi olevat Pumput ja Sensorit ennen kuin vaihdat uuteen Sensoriin.
- Nordic Infucare myy nyt kahta versiota Pumpuista:
 1. Omnipod 5 -Pumppu, joka on yhteensopiva Dexcom G6- ja Dexcom G7 -Sensoreiden kanssa.
 2. Omnipod 5 -Pumppu, joka on yhteensopiva FreeStyle Libre 2 Plus- ja Dexcom G6 -Sensoreiden kanssa.

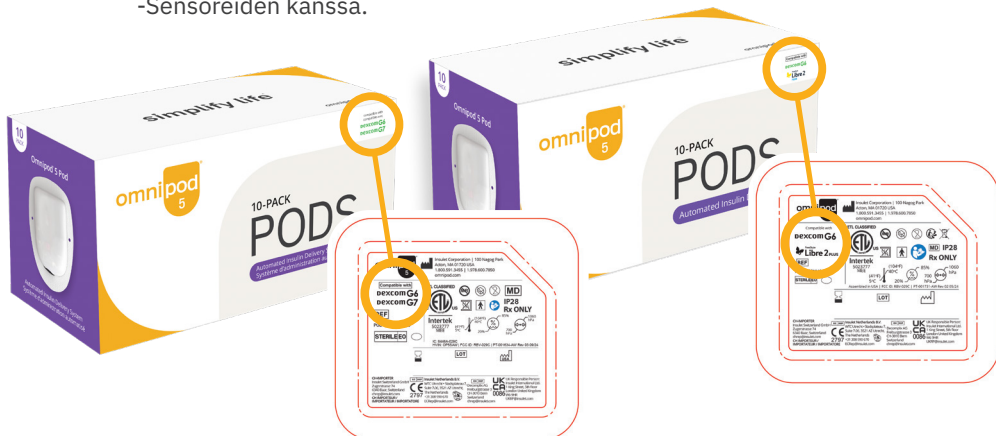

3. Skannaamalla oikealla olevan QR-koodin voit katsoa videot, jotka näyttävät, miten Omnipod 5 liitetään eri Sensoreihin.

Kun olet saanut uuden Sensorin ja Pumpun, vaihda sensortyyppiä seuraavasti:

1. Siirry Manuaalitilaan
2. Pysäytä nykyisen Sensorin käyttöjakso ja poista Pumppu käytöstä.
3. Valitse uusi sensortyyppi Sensorin Hallinta -valikossa.
4. Liitä uusi Sensori.
5. Aktivoi uusi Pumppu.
6. Omnipod 5 on Automatisoitu Tila: Rajoitettu -tilassa, kunnes Sensorin käynnistysvaihe on päättynyt.

**SENSORIN LIITTÄMINEN:
DEXCOM G6, DEXCOM G7 JA
FREESTYLE LIBRE 2 PLUS
(VIDEO)**



Linkki:

www.diabetesinfucare.com/fi-fi/omnipod5/sensorin-vaihto



©2018–2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, Omnipod-logo ja SmartAdjust™ ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Dexcom, Dexcom G6 ja Dexcom G7 ovat Dexcom, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään luvalla Yhdysvalloissa tai muilla lainkäyttöalueilla. Sensorin ulkokuori, FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tavamerkit ovat Abbott Diabetes Care Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla, ja niitä käytetään luvalla. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Insulet Corporation käyttää niitä lisenssillä. Kaikki oikeudet pidätetään. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Alankomaat. www.myunipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System on CE-merkitty lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti. INS-OHS-07-2025-00257, OMNI.FI.198-01-AUG2025



diabetesinfucare.com | [makingdiabetesasier.fi](https://www.facebook.com/omnipodsuomi)
[facebook.com/omnipodsuomi](https://www.facebook.com/omnipodsuomi) | @omnipodi

NordicInfu Care AB (jakelija) · Tekniikantie 14 · 02150 Espoo, +358 (0) 207 348 760 · www.infucare.com