

OMNIPOD® 5 ER KOMPATIBEL

med Dexcom G6-, Dexcom G7- og
FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer



Bytt Sensor - slik gjør du

Slik kobler du en annen Sensor til Omnipod 5


1. Diskuter bytte av sensortype med din behandler.

Hvis de er med på at du kan bytte:

- Du må be om å få en søknad på den nye Sensoren.
- Motta opplæring i bruk av den nye Sensoren, enten av helsepersonellet ditt eller av sensorprodusenten.

2. Kontroller kompatibiliteten til Podene dine. Det står med fet skrift på lokket til Pod-emballasjen og øverst i høyre hjørne på Pod-esken (se nedenfor).

- Bruk de Podene og Sensorene du allerede har, før du bytter til en ny Sensor.
- Nordic Infucare har to forskjellige typer Poder:
 1. Omnipod 5-poder som er compatible med både Dexcom G6- og G7-sensorer.
 2. Omnipod 5-poder som er compatible med både FreeStyle Libre 2 Plus- og Dexcom G6-sensorer.

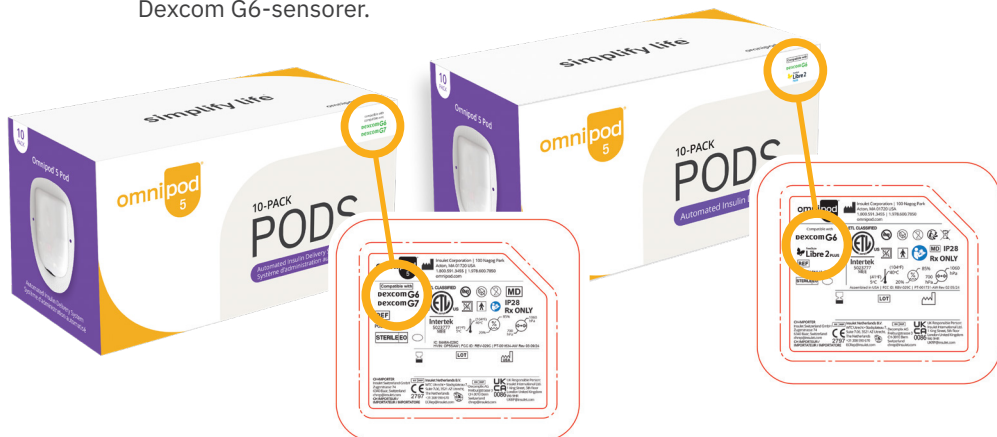

3. Se på filmene ved å skanne QR-koden til høyre for å forstå hvordan Omnipod 5 kobles til de ulike sensortypene.

Når du har mottatt den nye Sensoren og Poden, gjør du følgende for å bytte til en ny sensortype:

1. Gå til Manuell Modus
2. Avslutt den pågående sensorøkten og deaktiver Pod
3. Velg den nye sensortype under «Håndtere Sensor» i menyen
4. Koble til den nye Sensoren
5. Aktiver en ny Pod
6. Automatisert Modus: Begrenset til Sensoren er varmet helt opp

**SENSORTILKOBLING:
DEXCOM G6, G7 &
FREESTYLE LIBRE 2 PLUS
(VIDEO)**



Lenke:

www.diabetesinfucare.com/no/omnipod5/bytt-sensor



©2018-2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, Omnipod-logotypen og SmartAdjust™ er varemerker eller registrerte varemerker som eies av Insulet Corporation USA og andre jurisdiksjoner. Med enerett. Dexcom, Dexcom G6 og Dexcom G7 er registrerte varemerker som tilhører Dexcom, Inc. og brukes med tillatelse i USA og andre jurisdiksjoner. Sensorenheten, FreeStyle, Libre og tilknyttede varemerker tilhører Abbott Diabetes Care Inc og brukes med tillatelse i USA og andre jurisdiksjoner. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Insulet Corporation skjer på lisens. Med enerett. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland. www.myomnipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System er CE-merket i henhold til MDR (EU) 2017/745. INS-OHS-07-2025-00256, OMNI.NO.143-01-AUG2025

CE
2797



diabetesinfucare.com | [makingdiabetesasier.no](https://www.facebook.com/omnipodnorge)
facebook.com/omnipodnorge | @omnipod_no

NordicInfu Care AB ((Distributør) · Blindernveien 5 · 0361 Oslo telefon · +47 22 20 60 00 · www.infucare.com