

# OMNIPOD® 5 ÄR NU KOMPATIBELT

med Dexcom G6-, Dexcom G7- och  
FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer



## Byta Sensor – så gör du

För att ta en ny Sensor i bruk med Omnipod 5 behöver du


### 1. Diskutera bytet med din vårdgivare.

Om din vårdgivare godkänner bytet:

- Behöver du få den nya Sensorn förskriften.
- Du behöver också få utbildning i hur du använder den nya Sensorn – antingen från din vårdgivare eller från sensortillverkaren.

### 2. Kontrollera kompatibiliteten på dina Podar. Kompatibilitetsinformationen står med fetstil på etiketten på Pod-förpackningen och i det övre högra hörnet på Pod-kartongen (se bilder nedan).

- Använd de Podar och Sensorer du redan har innan du byter till en ny Sensor.
- Nordic Infucare har två versioner av Omnipod 5-podar:
  1. Omnipod 5-podar som är kompatibla med både Dexcom G6- och G7-sensorer.
  2. Omnipod 5-podar som är kompatibla med både FreeStyle Libre 2 Plus-och Dexcom G6-sensorer.

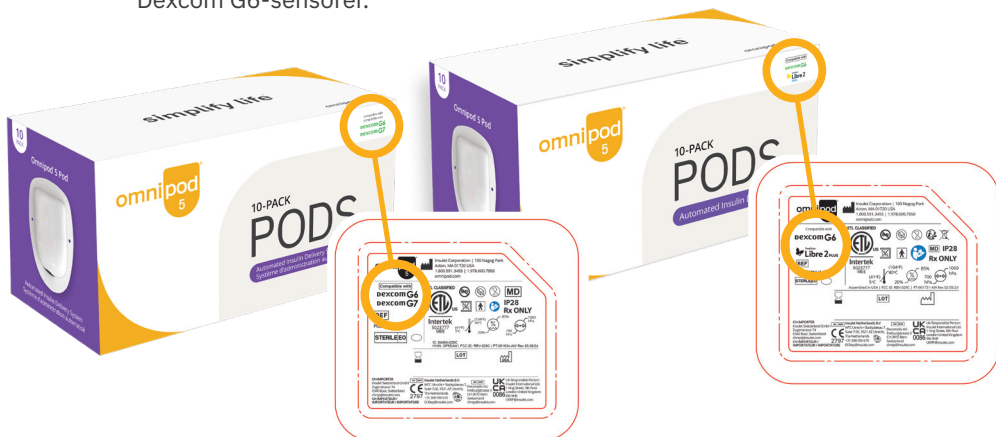

3. Titta på filmerna genom att skanna QR-koden till höger för att förstå hur Omnipod 5 ansluter till de olika sensortyperna.

När du har fått din nya Sensor och Pod ska du göra följande för att byta till en ny sensortyp:

1. Gå till Manuellt Läge
2. Avsluta aktuell sensorsession och deaktivera Poden
3. Välj ny sensortyp under "Hantera Sensor" i menyn
4. Anslut den nya Sensorn
5. Aktivera en ny Pod
6. Automatiserat Läge Begränsat tills Sensorn är helt uppvärmd

**SENSORANSLUTNING:  
DEXCOM G6, G7 &  
FREESTYLE LIBRE 2 PLUS  
(VIDEO)**



Länk:

[www.diabetesinfucare.com/sv/omnipod5/by-ta-sensor](http://www.diabetesinfucare.com/sv/omnipod5/by-ta-sensor)



©2018-2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, Omnipod-logotypen och SmartAdjust™ är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Insulet Corporation USA och andra jurisdiktioner. Med ensamrätt. Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom G7 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. och används med tillstånd i USA och andra jurisdiktioner. Sensorns hölje, FreeStyle, Libre och relaterade varumärken tillhör Abbott Diabetes Care Inc och används med tillstånd i USA och andra jurisdiktioner. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Insulet Corporation sker på licens. Med ensamrätt. Insulet tillverkare av Omnipod Netherlands B.V. Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht Nederländerna.] Omnipod 5 - Automated Insulin Delivery System är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745  
INS-OHS-07-2025-00255, OMNI.SE.208-01-AUG2025



**nordic**  
**INFUcare**

**omnipod**  
5  
automated insulin  
delivery system

[diabetesinfucare.com](http://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.se](http://makingdiabeteseasier.se)  
[facebook.com/omnipodsverige](https://facebook.com/omnipodsverige) | [@omnipodse](https://twitter.com/omnipodse)

NordicInfu Care AB (Distributör) · Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · [www.infucare.com](http://www.infucare.com)