


Hvad betyder tendenspilene?

	Konstant: Glukoseværdien er stabil (stiger/falder ikke mere end 0,06 mmol/l pr. minut). Glukoseværdien kan stige eller falde med op til 0,9 mmol/l på 15 minutter.
	Stiger langsomt: Glukoseværdien stiger 0,06–0,11 mmol/l pr. minut. Hvis den fortsætter med at stige med samme hastighed, kan den stige op til 1,7 mmol/l på 15 minutter.
	Stiger: Glukoseværdien stiger 0,11–0,17 mmol/l pr. minut. Hvis den fortsætter med at stige med samme hastighed, kan den stige mellem 1,7 og 2,5 mmol/l på 15 minutter.
	Stiger hurtigt: Glukoseværdien stiger mere end 0,17 mmol/l pr. minut. Hvis den fortsætter med at stige med samme hastighed, kan den stige mere end 2,5 mmol/l på 15 minutter.
	Falder langsomt: Glukoseværdien falder 0,06–0,11 mmol/l pr. minut. Hvis den fortsætter med at falde med samme hastighed, kan den falde op til 1,7 mmol/l på 15 minutter.
	Falder: Glukoseværdien falder 0,11–0,17 mmol/l pr. minut. Hvis den fortsætter med at falde med samme hastighed, kan den falde mellem 1,7 og 2,5 mmol/l på 15 minutter.
	Falder hurtigt: Glukoseværdien falder mere end 0,17 mmol/l pr. minut. Hvis den fortsætter med at falde med samme hastighed, kan den falde mere end 2,5 mmol/l på 15 minutter.
Ingen pil	Hvis der ikke vises nogen ændringshastighed: Systemet kan ikke beregne, hvor hurtigt glukoseværdien stiger eller falder i denne situation.

Brug din G6, Brugervejledning. LBL016312 Rev 001 MT25285

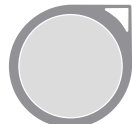

**Making
Diabetes
Easier**



Nordic Infucare • Tel: 70 28 10 24 • teknisksupport@infucare.dk
www.infucare.dk • makingdiabeteseasier.dk